

# Mobi Pro Flexi II



Compact  
Comfortabel  
Draagvermogen 180kg  
Ergonomisch



De Mobi Pro Flexi II is een ergonomisch en compact mobiel hulpmiddel voor het uitvoeren van transfers, ideaal voor mensen met weinig beenkracht en enige rompbalans die moeite hebben met lopen en tot stand komen. De Mobi Pro Flexi II is een uitstekend en veilig transfer hulpmiddel voor vroege mobilisatie. Het biedt ondersteuning tijdens het staan en is een efficiënt hulpmiddel voor het verplaatsen van patiënten, waardoor de veiligheid en efficiëntie worden verbeterd.



## Comfortabel opstahulpmiddel

De Mobi Pro Flexi II is een efficiënt en veilig opstahulpmiddel die zorgvragers helpt op te staan uit eigen kracht. De gepolsterde onderbeen/kniesteun ondersteunt de benen van de zorgvrager tijdens transfer. Op de stevige antislip voetenplank kan de zorgvrager eenvoudig de voeten positioneren en zichzelf omhoog trekken naar een staande positie met behulp van de dwarsbeugel. Door simpelweg de ergonomische zitsteunen te draaien, wordt de Mobi Pro Flexi II een comfortabele stoel waarop de zorgvrager zich kan laten verplaatsen. De Mobi Pro Flexi II kan een zorgvrager tot maximaal 180 kilo moeiteloos verplaatsen.

## Veelzijdig ontwerp

Door het compacte en ergonomische ontwerp van de Mobi Pro Flexi II kan één enkele zorgverlener de transfer van zitten naar staan ondersteunen van cliënt naar bed, stoel of toilet. De Mobi Pro Flexi II is uitgerust met een mechanische pootspreiding met voetpedalen, zodat de breedte gemakkelijk is aan te passen aan brede stoelen.

## Kwaliteit

Onze producten worden met veel zorg ontwikkeld waarbij de mobiliteit van de zorgvrager centraal staat op een betrouwbare, veilige en ergonomische wijze. Al onze hulpmiddelen voldoen aan de MDR en aan alle geldende wetten, normen en richtlijnen.



Walking Aids



Healthcare Beds



Lifting Solutions



Hygiene



Convertible chairs


## Gebruik



**Gebruik van/naar een bed**  
Gebruik om een patiënt van/naar een bed te verplaatsen.



**Gebruik van/naar een stoel**  
Gebruik om een patiënt van/naar een bed te verplaatsen.

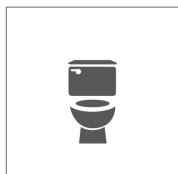


**Gebruik van/naar het toilet**  
Gebruik om een patiënt van/naar een toilet te verplaatsen.

## Kenmerken




**Gemakkelijke beweging**  
De Mobi Pro Flexi is eenvoudig te verplaatsen door een enkele zorgverlener. Een kleine draaicirkel maakt hem ideaal voor kleinere ruimtes.

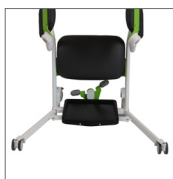

**Verstelbare basis**  
Handmatige aanpassing van de pootspreiding zorgt ervoor dat het onder de meeste stoelen past.



**Gepolsterde zitsteunen**  
Maakt het mogelijk om het apparaat als zitplaats te gebruiken als alternatief voor een rolstoel.

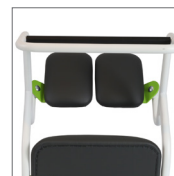

**Gepolsterde kniesteun**  
Comfortabel kniekussen om de patiënt meer comfort te bieden en de druk op de knieën tijdens het staan te verminderen.



**Ergonomische handgrepen**  
Ergonomische handgrepen voor zowel zorgverleners als patiënten



**Voetplaat**  
Duurzaam ABS-kunststof. Antislip.

## Technische specificaties

Mobi Pro Flexi II			
Artikelnummer:	100200	Verstelbare poot (Min - Max)	49 cm - 92 cm
Breedte	62 cm	Hoogte handvat	101.5 cm
Lengte	90.5 cm	Gewicht	35.5 kg
Hoogte	102 cm	Draagvermogen	180 kg
Diameter van wielen met rem	10 cm	Diameter van wielen zonder rem	7.5 cm



*We improve freedom of movement and quality of care for people.*

[www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com)



**HUMAN CARE SWEDEN (HQ)**  
Årstaängsvägen 21B  
117 43 Stockholm  
+46 8 665 35 00  
info@humancaregroup.com

**HUMAN CARE CANADA**  
10-155 Colonnade Road  
ON K2E 7K1 Ottawa  
+1 613 723 6734  
info.ca@humancaregroup.com

**HUMAN CARE THE NETHERLANDS**  
Elspeterweg 124  
8076 PA Vierhouten  
+31 577 41 21 71  
info.nl@humancaregroup.com

**HUMAN CARE UNITED STATES**  
8006 Cameron rd, Suite K  
TX 78754 Austin  
+1 5 124 76 7199  
info.us@humancaregroup.com