





Voordelen van uw Cochlear draadloze telefoonclip

- Handenvrij bellen, rechtstreeks naar uw Baha 4 geluidsprocessor.
- Uw Bluetooth-navigatiesysteem rechtstreeks in uw Baha 4 geluidsprocessor horen.
- Uw Baha 4 geluidsprocessor onopvallend aanpassen door de telefoonclip als afstandsbediening te gebruiken.
- Muziek streamen vanaf een Bluetooth-apparaat.

*De telefoonclip kan gemakkelijk op kleding worden geklemd.
De ingebouwde microfoon zal uw stem opvangen en overdragen,
ook al is uw telefoon meerdere meters van de telefoonclip verwijderd.*

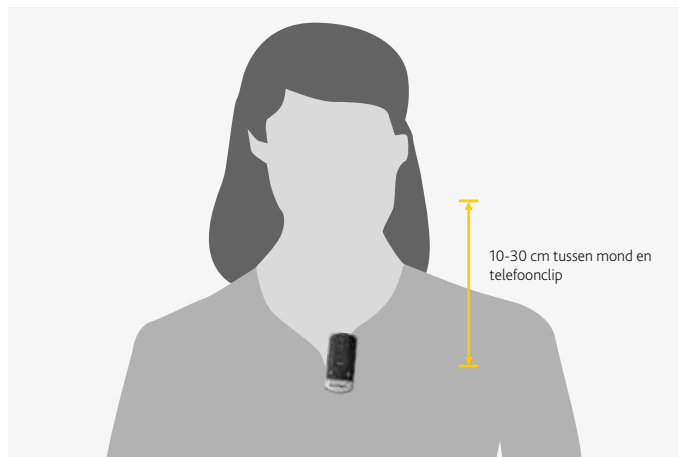

Overzicht van het product

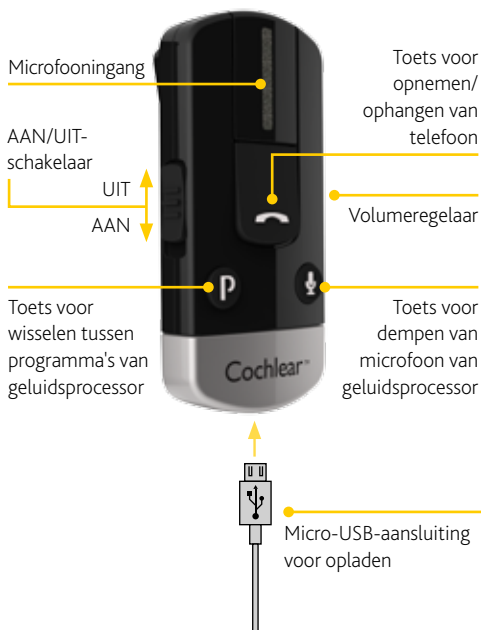

Aan de slag

Vraag uw audioloog of uw geluidsprocessor gekoppeld is met uw telefoonclip. Een geluidsprocessor die al eerder gekoppeld werd, hoeft niet opnieuw te worden gekoppeld.

Als uw geluidsprocessor nog niet gekoppeld is, volg dan de instructies voor het eenvoudig koppelen van uw geluidsprocessor met uw telefoonclip op de laatste pagina van deze handleiding.

Tip! Zorg ervoor dat het volume van uw geluidsprocessor is aangepast tot een aangenaam niveau voordat u de instellingen wijzigt met behulp van de volumeregelaar op de telefoonclip.

De batterij opladen

Steek één uiteinde van de bijgeleverde micro-USB-oplaadkabel in de telefoonclip en het andere uiteinde in een computer, of via de bijgeleverde adapter in een stopcontact. De batterij is vol wanneer het rode LED-lampje op de bovenkant van de telefoonclip groen wordt en elke 2 seconden rood oplicht.

Wanneer u uw telefoonclip voor de eerste keer oplaadt, raden wij aan uw telefoonclip ten minste 3 uur op te laden, ook al geeft het indicatielampje aan dat de batterij vol is. De batterij kan niet te veel opgeladen worden.

Opmerking: Met een volle batterij biedt de telefoonclip 6 uur gesprekstijd of 80 uur stand-by tijd.



Indicatielampjes (LED-lampjes)

Het LED-lampje op de bovenkant van uw telefoonclip dient als gebruikersinterface voor meerdere toepassingen en geeft informatie over de status van het apparaat.

Knipperpatroon	Betekenis
	Normale werking (groen)
	Batterij bijna leeg (geel)
	Bezig met opladen (rood)
	Volledig opgeladen, maar nog steeds aangesloten op de lader (rood/groen)
	Gereed voor koppelen met geluidsprocessor (geel)
	Gereed voor koppelen met Bluetooth-apparaat (blauw)
	Bluetooth-gesprek actief (blauw)

De telefoonclip verbinden met uw mobiele telefoon

Om met de telefoonclip te bellen of gebeld te worden, moet de Bluetooth®-functie in uw mobiele telefoon geactiveerd worden.

Na een geslaagde koppeling, kan uw telefoon u vragen om te bevestigen dat u een verbinding met de telefoonclip tot stand wilt brengen.

Als u de verbinding handmatig tot stand moet brengen, zoek dan de lijst van "Gekoppelde apparaten" op in het Bluetooth®-menu van uw telefoon. Ga in deze lijst naar "Hoortoesteltelefoon" (Hearing Aid Phone) en selecteer "Verbinden" (Connect).

U bent nu klaar om uw telefoonclip te gebruiken.

Op sommige telefoons kunt u "Automatisch opnieuw verbinden" (Automatic Reconnection) inschakelen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon om te zien hoe u dit moet doen.



Tip! Bij de meeste mobiele telefoons kunt u aan het icoontje van een hoofdtelefoon op het hoofdscherm zien dat de verbinding tot stand is gebracht.

De telefoonclip gebruiken

Gesprekken beheren met de toets voor opnemen/ophangen



- Inkomende gesprekken:**
 Om de telefoon op te nemen, klikt u eenmaal.
 Om een oproep te weigeren, klikt u tweemaal snel achter elkaar.
- Tijdens een gesprek:**
 Om een gesprek dat op uw telefoon is begonnen, over te zetten naar de telefoonclip, drukt u eenmaal.
 Om een gesprek in de wacht te zetten, houdt u de toets gedurende 2 seconden ingedrukt.
- Om zelf te bellen:**
 Om het laatst gekozen nummer opnieuw te bellen, klikt u tweemaal snel achter elkaar.
 Om spraakgestuurd bellen te activeren, houdt u de toets gedurende 2 seconden ingedrukt.

De telefoonclip gebruiken als afstandsbediening

Wanneer u niet aan het bellen bent, kan de telefoonclip ook worden gebruikt als eenvoudige afstandsbediening voor uw geluidsprocessor(s).



- Druk eenmaal om de microfoons van de geluidsprocessor te dempen of in te schakelen.
- Druk eenmaal of meerdere malen om te wisselen tussen de programma's op de geluidsprocessor

Pas het volume van de geluidsprocessor aan

Ondersteuning

Uitgebreide informatie over de Cochlear draadloze telefoonclip vindt u in de gebruikershandleiding.


Uitgebreide informatie over de Cochlear Baha 4 geluidsprocessor vindt u in deel A van de gebruikershandleiding.

Ga voor verdere ondersteuning en video's naar de website van Cochlear: www.cochlear.com




De telefoonclip koppelen met uw Baha 4 geluidsprocessor


A Zet uw Baha 4 geluidsprocessor uit:

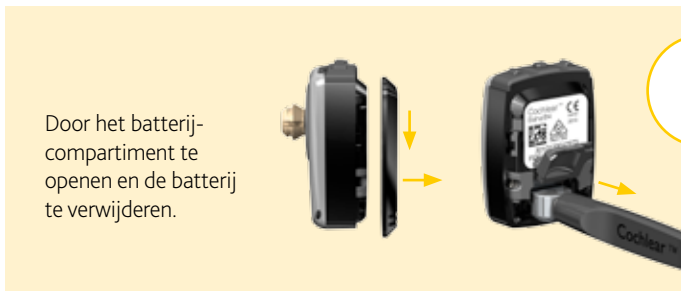

B Zet uw telefoonclip aan en verwijder het zilverkleurige beschermkapje.

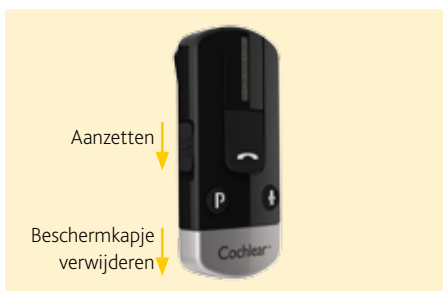

C Druk eenmaal op de witte koppeltoets op de telefoonclip met de punt van een pen of een soortgelijk voorwerp.

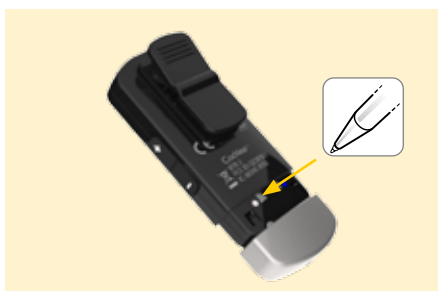


D Het LED-lampje zal elke 2 seconden geel oplichten en de telefoonclip blijft gedurende 20 seconden in de koppelmodus.



E Zet uw geluidsprocessor aan terwijl de koppelmodus actief is:



F Als de koppeling gelukt is, hoort u een melodietje dat in de geluidsprocessor wordt afgespeeld.

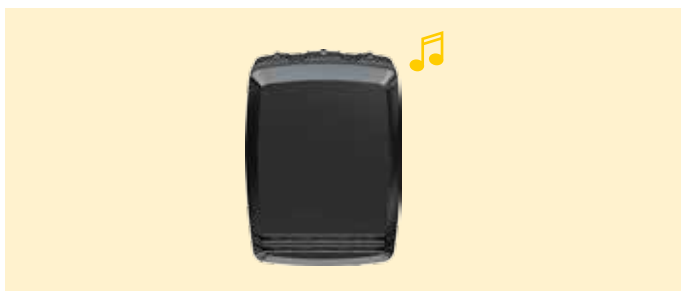

De telefoonclip koppelen met uw mobiele telefoon

- A** Zet uw telefoonclip aan en verwijder het zilverkleurige beschermkapje.
- B** Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie van uw telefoon is ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon voor instructies of ga naar www.jabra.com.
- C** Druk eenmaal op de blauwe Bluetooth-koppeltoets op de telefoonclip om de koppelmodus gedurende 2 minuten te activeren. Tijdens het koppelen wordt het LED-lampje blauw.
- D** Zoek op uw mobiele telefoon naar nieuwe Bluetooth-apparaten en selecteer "Hoortoesteltelefoon" (Hearing Aid Phone).
- E** Als uw mobiele telefoon om een wachtwoord vraagt, vul dan "0000" (vier nullen) in.
- F** Uw telefoonclip zou nu gekoppeld moeten zijn met uw mobiele telefoon. Als uw mobiele telefoon vraagt welke Bluetooth-service u wilt inschakelen, selecteer dan "Hoofdtelefoon" (Headset).



Manufacturer:

Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, SE - 435 33 Mölnlycke, Sweden
Tel: +46 31 792 44 00 Fax: +46 31 792 46 95

www.cochlear.com