

# He hajo

He hajo is een hulpmiddel bij de communicatie voor mensen met een verstandelijke beperking en/of communicatie beperking.


**Handleiding**



## 1. Spreken

- zinnen maken
- zinnen wijzigen
- zinnen verwijderen
- zinnen afspelen
- zinnen in de agenda zetten
- picto's bewerken
- nieuwe picto maken

3  
3  
4  
4  
4  
5  
6  
7

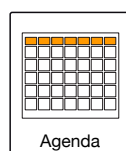

## 2. Agenda

- week-, dag- en maandindeling
- tekst toevoegen
- agenda bewerken


8  
8  
9  
9



## 3. Foto's

- nieuw album maken
- foto's bewerken
- foto's in agenda zetten
- foto's in agenda zetten
- foto's afspelen
- album verwijderen
- naam album wijzigen

10  
10  
11  
11  
12  
12  
13  
13

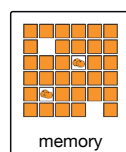

## 4. Memory

- spel spelen
- spelgrootte aanpassen

14  
14  
14



## 5. Instellingen



15

# 1. Spreken


zinnen maken




terug naar het hoofdmenu

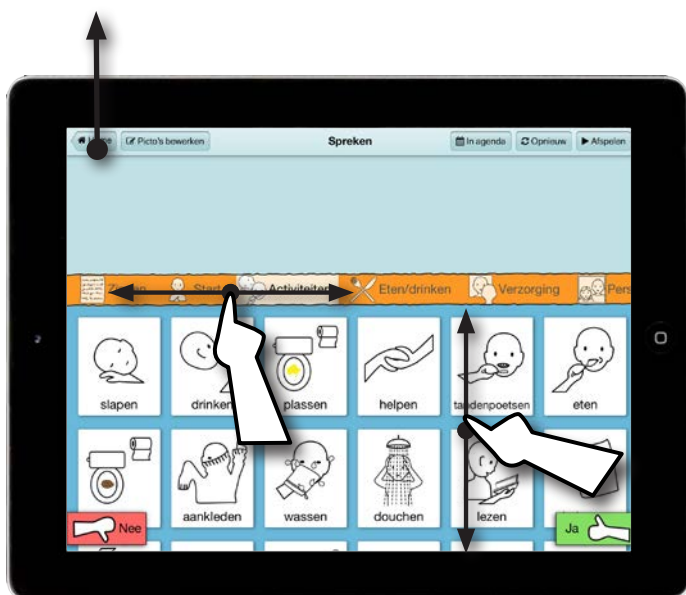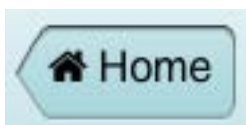


categorie kiezen: horizontaal scrollen  
picto kiezen: verticaal scrollen

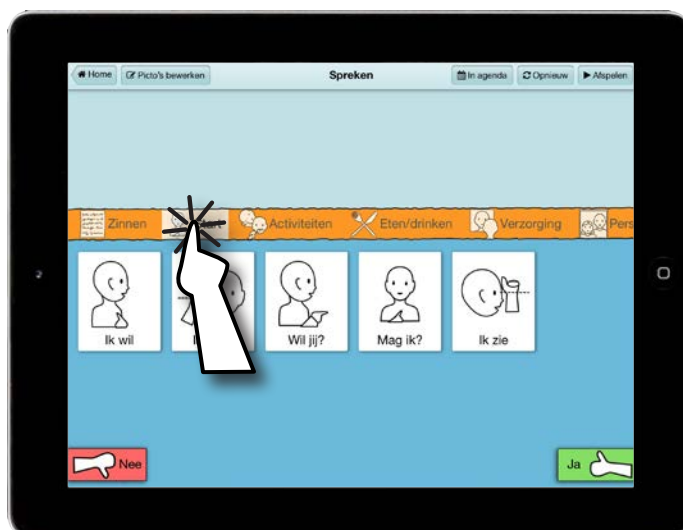

categorie kiezen door aan te tikken

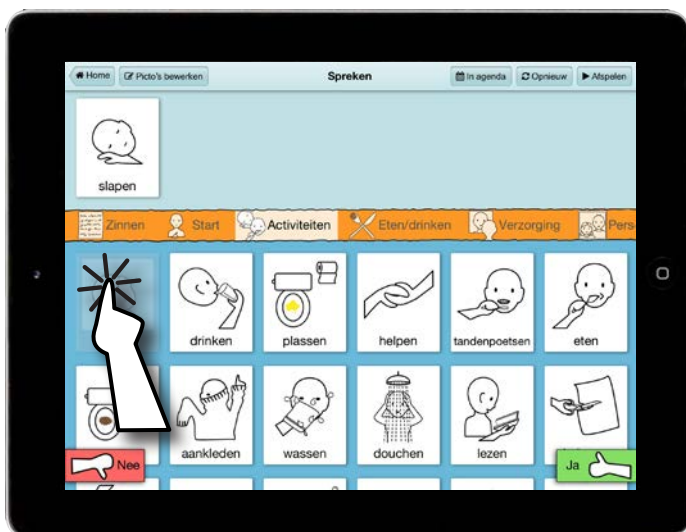


picto kiezen door aantikken

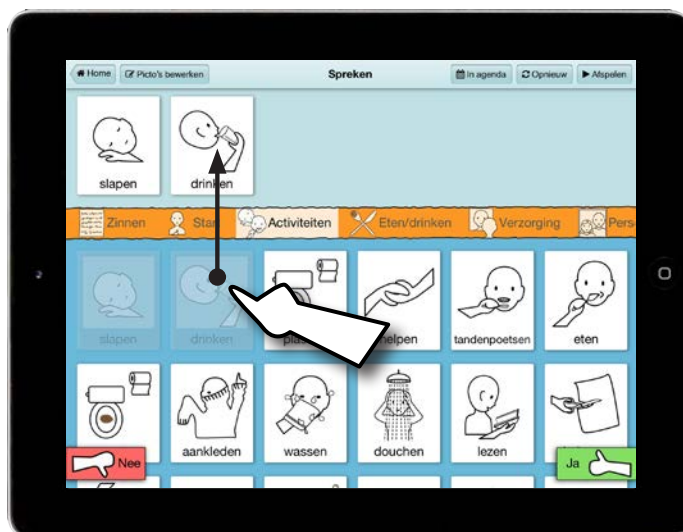


picto kiezen door slepen


zinnen wijzigen  
zinnen verwijderen  
zinnen afspelen

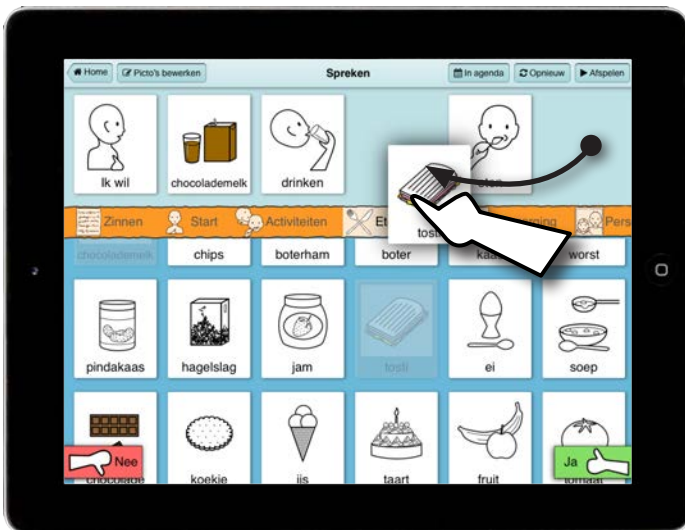

picto verplaatsen door slepen

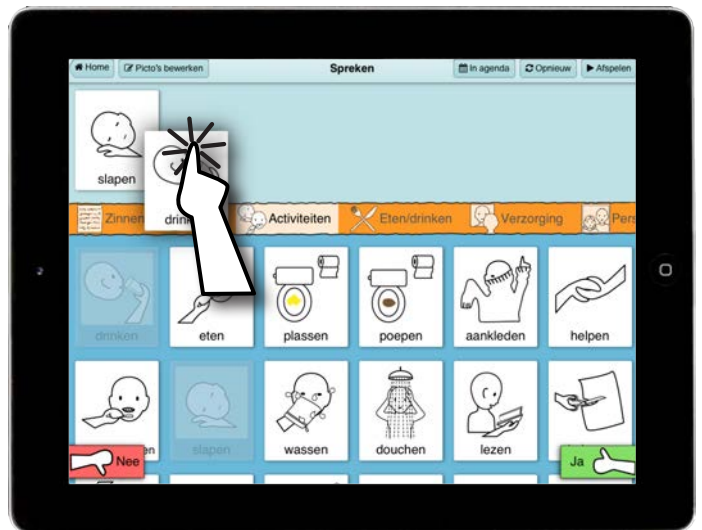

picto verwijderen door aantikken

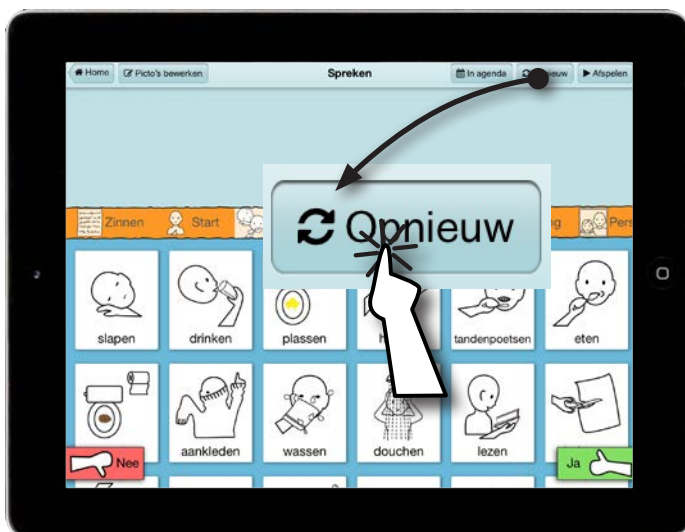

zin verwijderen



zin afspelen



# zinnen in de agenda zetten




Terug


terug naar spreken,  
zonder opslaan.




zin in de agenda zetten

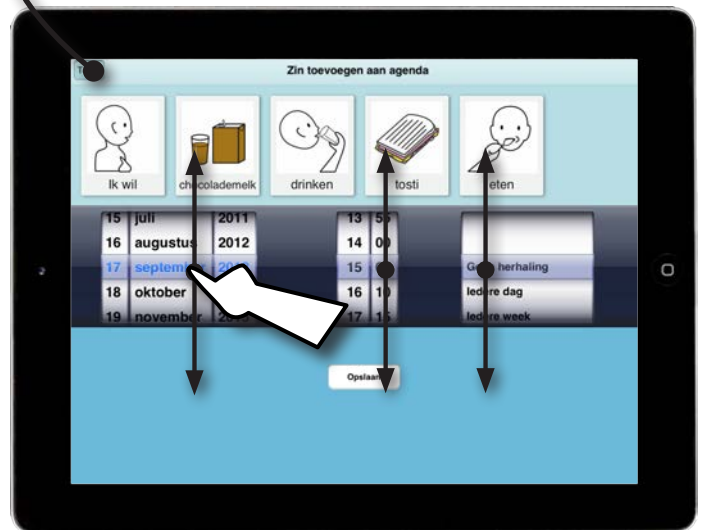

datum, tijd en herhaling instellen

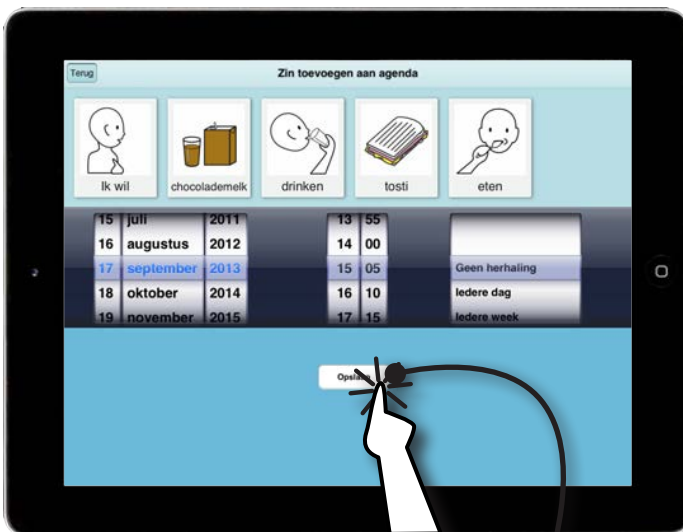


opslaan in de agenda

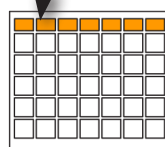





Picto's bewerken

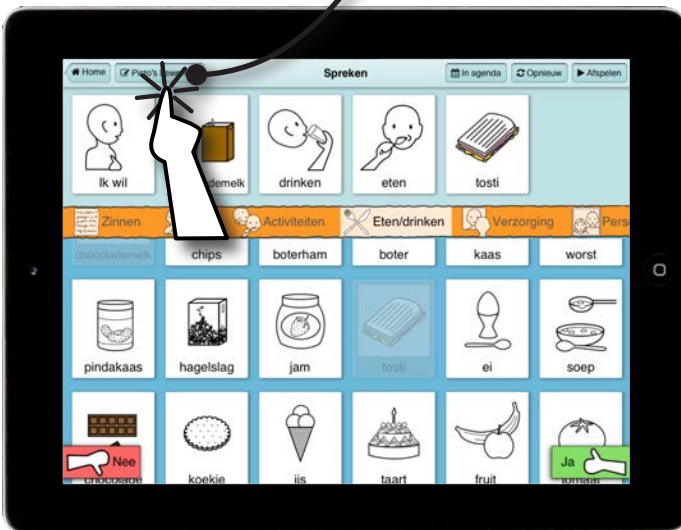


naar picto's bewerken

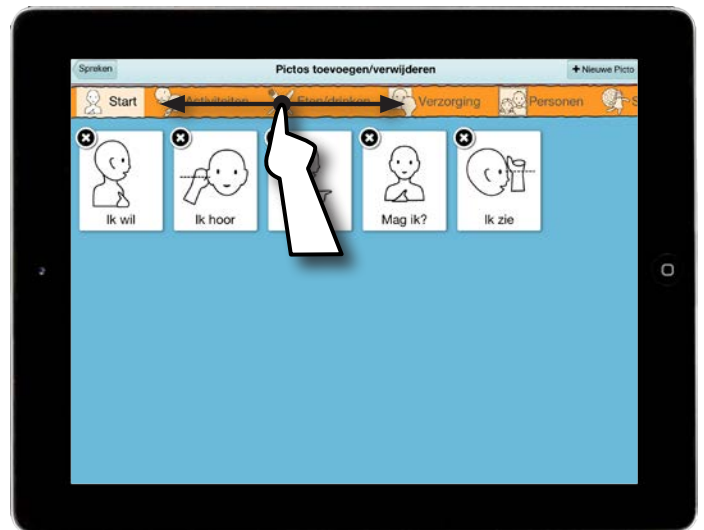

categorie kiezen door horizontaal scrollen

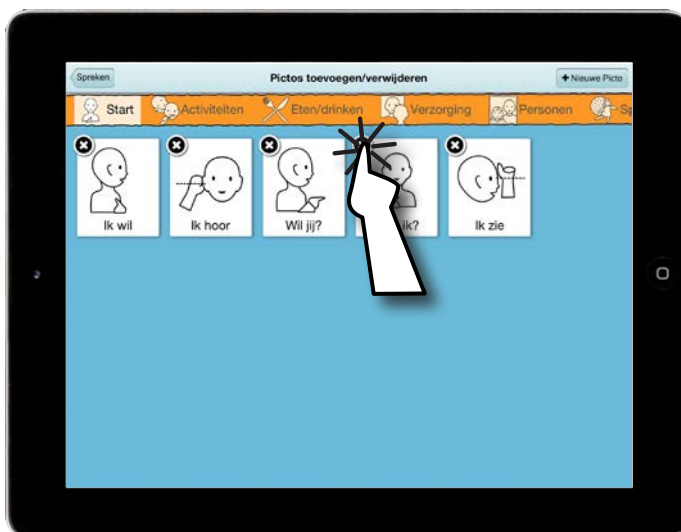


picto verwijderen

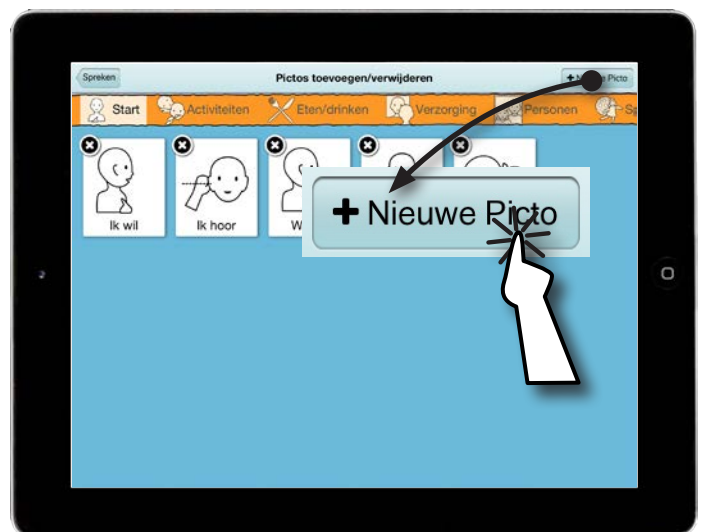


naar nieuwe picto maken


nieuwe picto maken

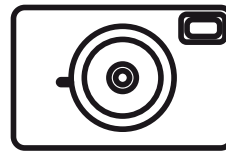


picto een naam geven en de categorie kiezen.

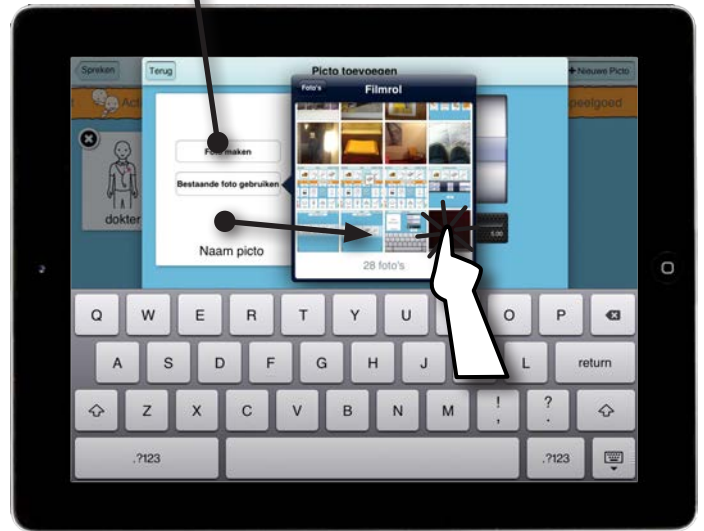

een foto maken of een bestaande foto kiezen

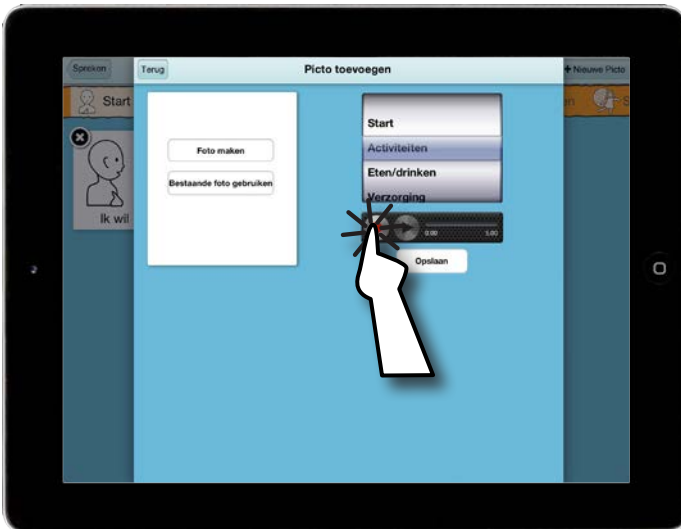

picto inspreken:  
start opname - stop opname - afspelen

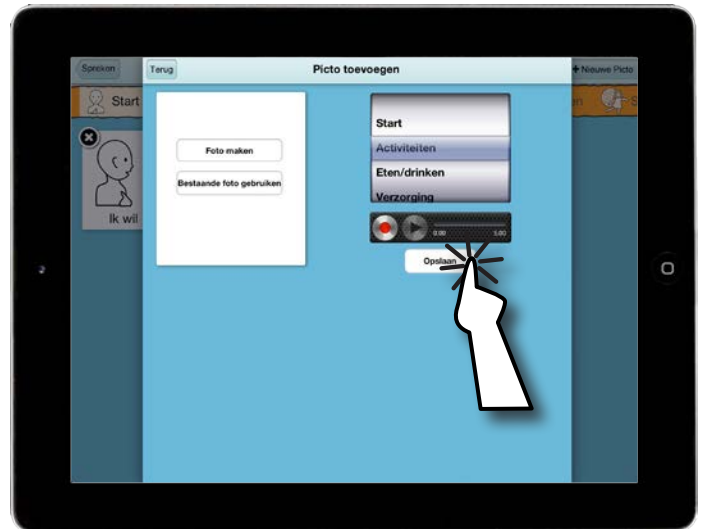


nieuwe picto opslaan





tekst toevoegen  
agenda bewerken

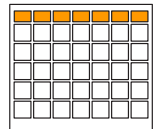


Agenda



+ Tekst toevoegen


Tekst toevoegen

▶ zin afspeelen

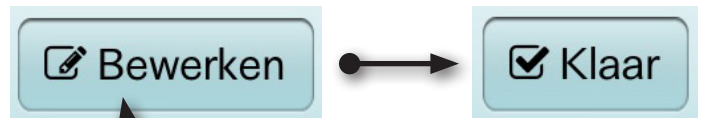


Bewerken

Klaar

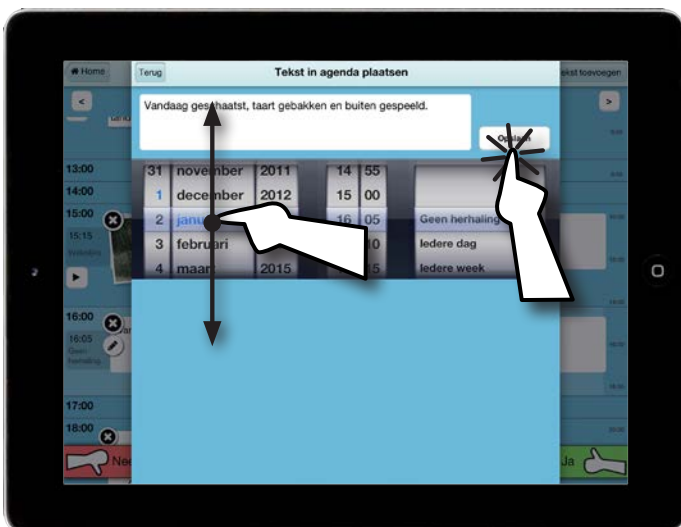

datum en herhaling instellen door verticaal scrollen  
tekst plaatsen door opslaan.

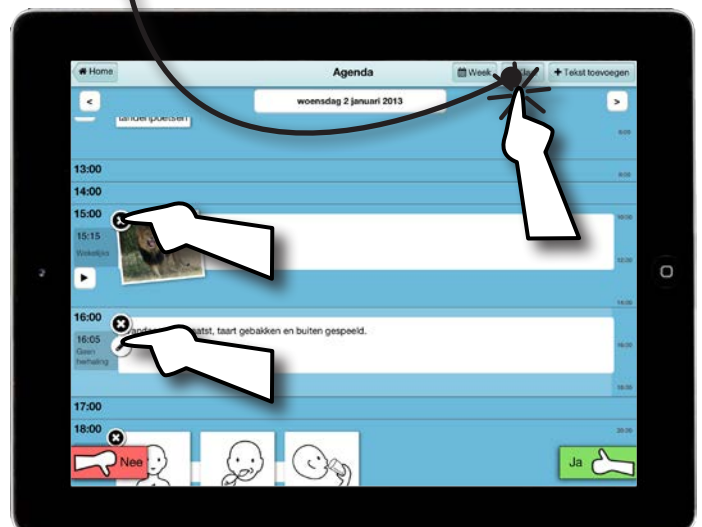

✕ verwijderen

✎ tekst wijzigen

### 3. Foto's


nieuw album maken



nieuw album maken



album toevoegen

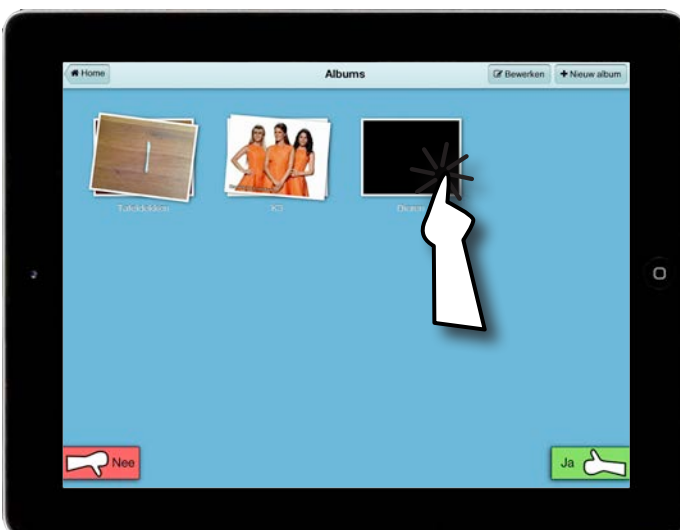

foto's in een album plaatsen

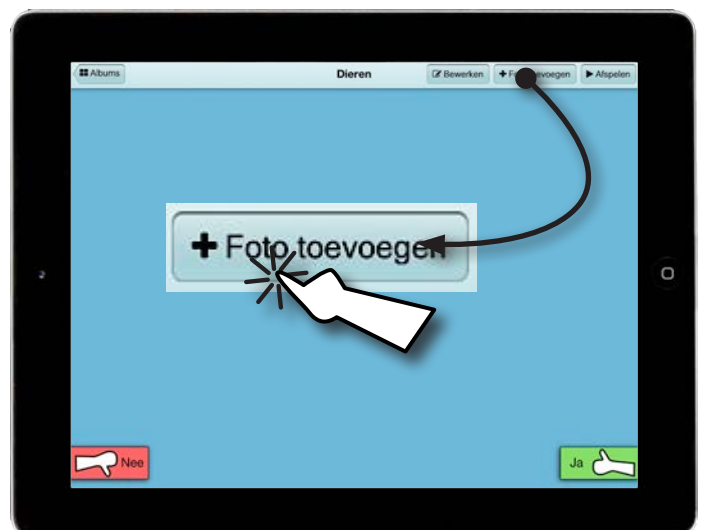


foto toevoegen

foto's bewerken  
foto's in agenda zetten



titel invoeren  
tekst invoeren  
foto opslaan



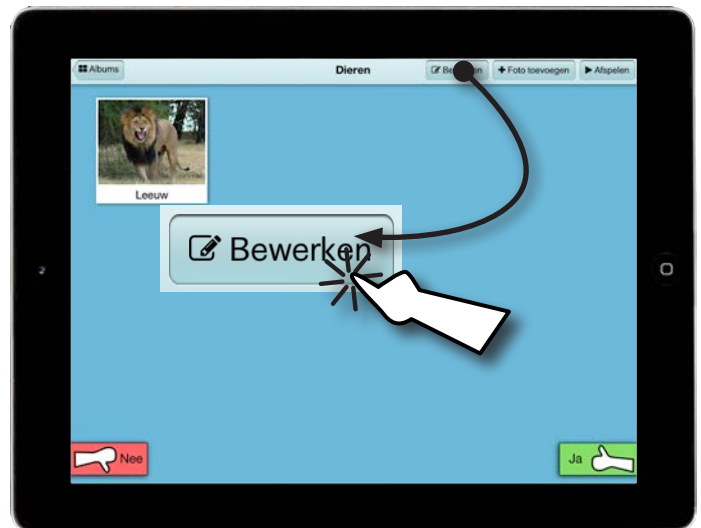


foto inspreken:  
start opname - stop opname - afspelen



foto bewerken

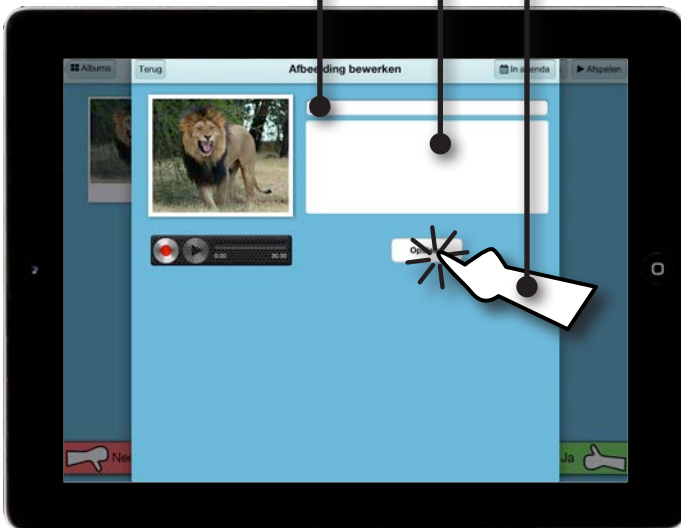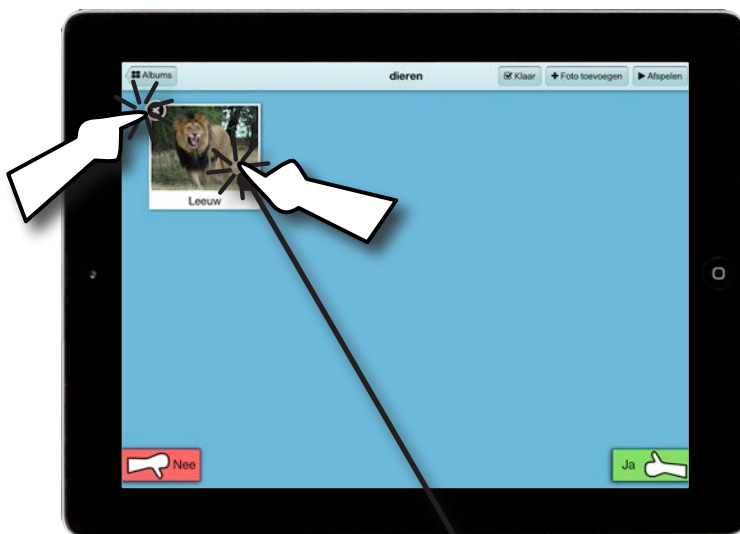

✕ foto verwijderen  
foto bewerken



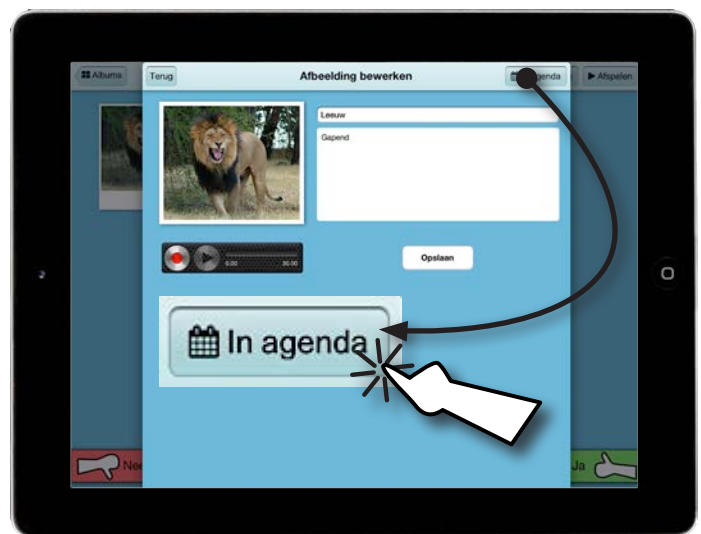


foto in agenda plaatsen


foto's in agenda zetten  
foto's afspelen

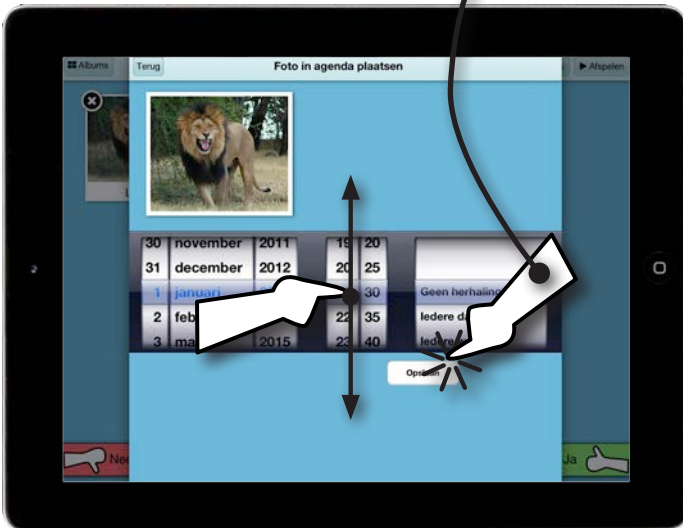


in agenda plaatsen

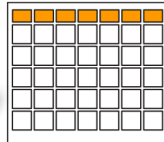


datum, tijd en herhaling instellen  
door verticaal scrollen

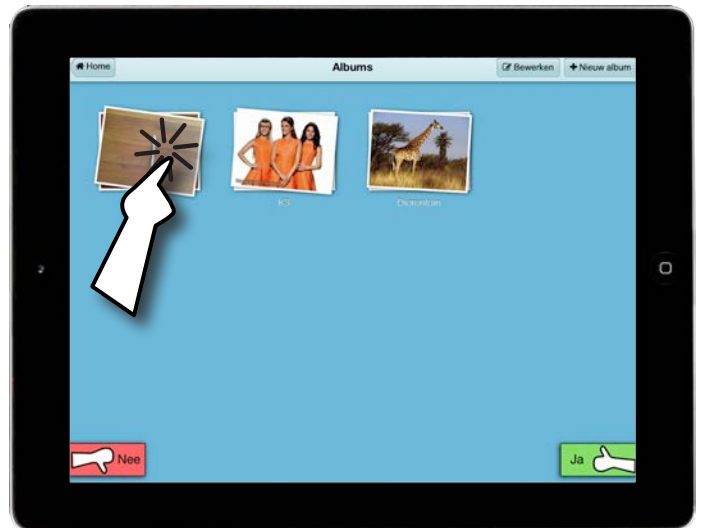

album openen

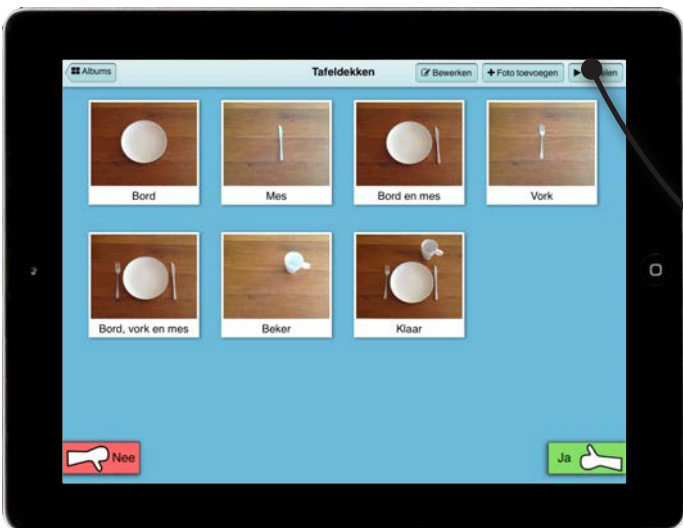


diapresentatie met opgenomen tekst  
afspelen

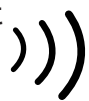


album verwijderen  
naam album wijzigen



Foto's

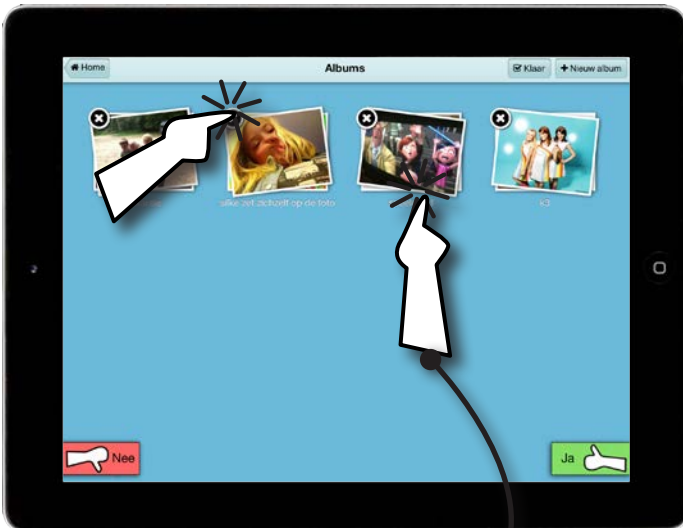



album verwijderen  
naam album wijzigen

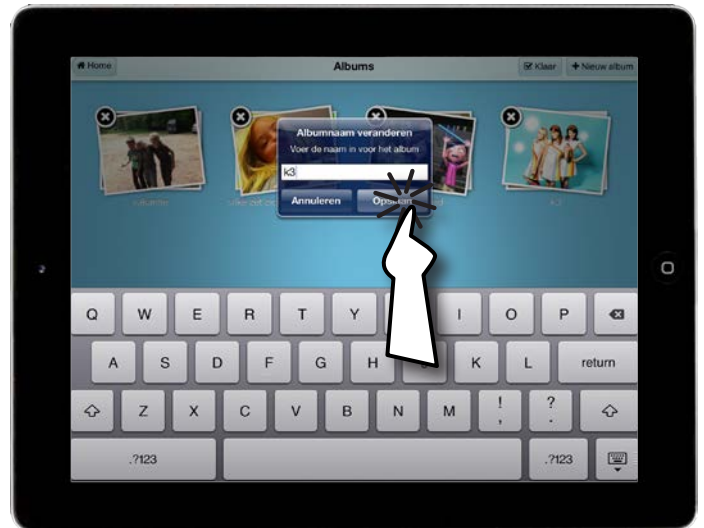

nieuwe naam opslaan

## 4. Memory


spel spelen  
spelgrootte aanpassen

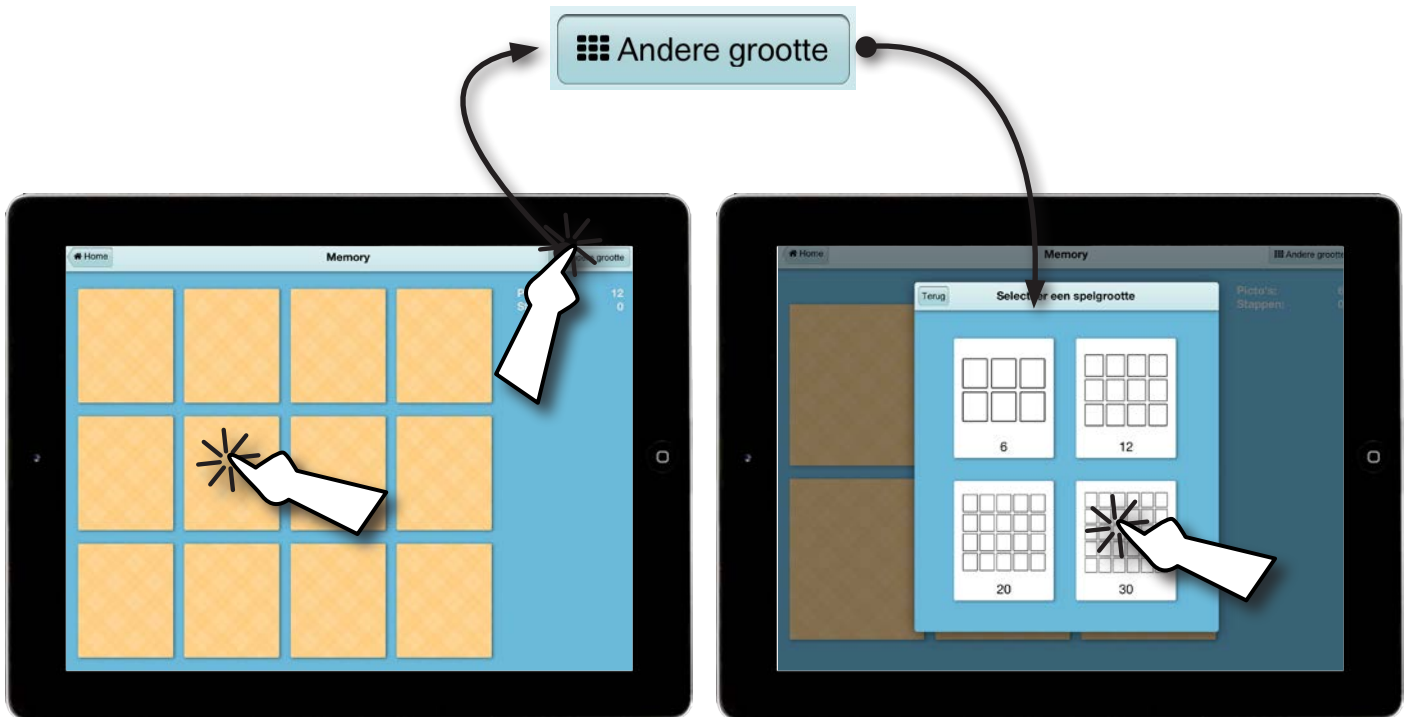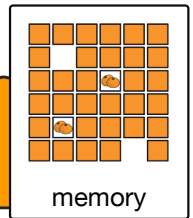

spel spelen:  
tik steeds twee kaartjes aan en probeer  
twee dezelfde te vinden.

spelgrootte aanpassen

## 5. Instellingen

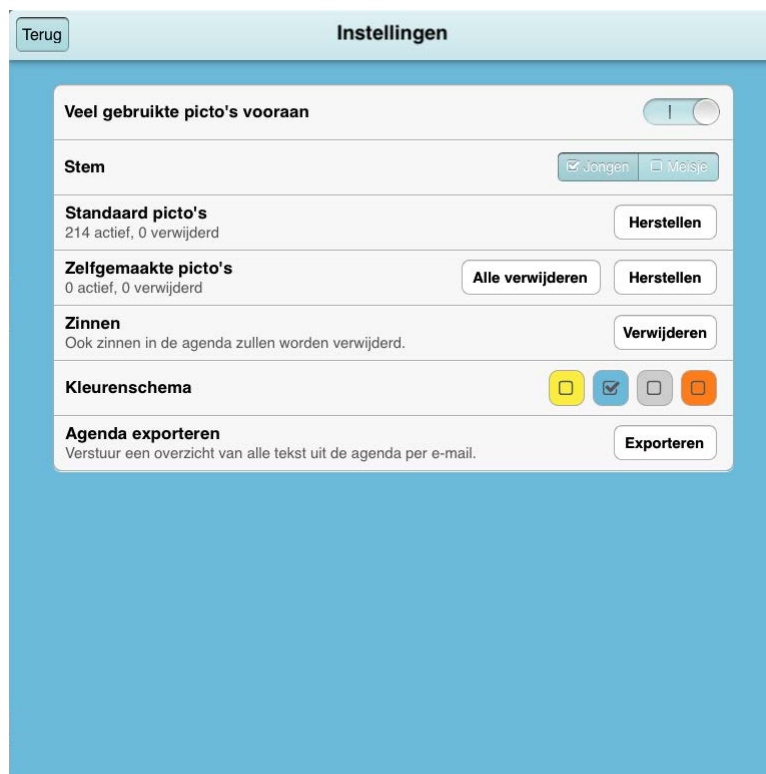

- Veel gebruikte picto's vooraan
  - 1: veel gebruikte picto's vooraan
  - 0: vaste volgorde picto's
- Stem
  - Jongen: jongensstem
  - Meisje: meisjesstem
- Standaard picto's
  - Herstellen: oorspronkelijke instelling van de picto's herstellen
- Zelfgemaakte picto's
  - Alle verwijderen: verwijdert alle picto's
  - Herstellen: zet de zelfgemaakte picto's terug
- Zinnen
  - Verwijderen: alle picto-zinnen worden uit a"spreken" en "agenda" verwijderd
- Kleurenschema
  - Vier keuzes
- Agenda exporteren
  - Exporteren: alle tekstvakken worden via de mail verstuurd en kunnen zo opgeslagen worden