


# Aerolet® toiletlift


## Natuurlijk opstaan



De laagste stand is de normale brilhoogte

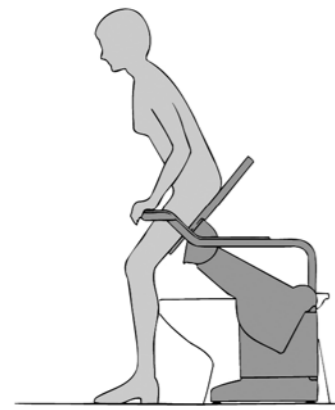

Hoogste stand bij een korte onderbeenlengte

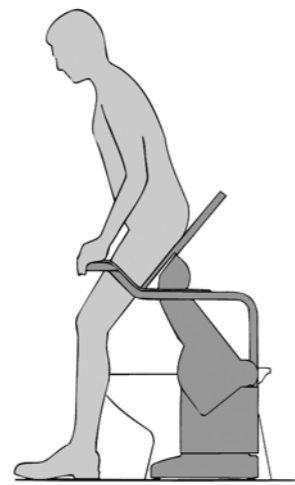

Hoogste stand bij een lange onderbeenlengte

### Zelfstandigheid

Het opstaan van het toilet is een dagelijks regelmatig terugkerende beweging. Als het opstaan moeilijk wordt, kan men proberen de zithoogte aan te passen. Dit gebeurt vaak d.m.v. het plaatsen van verhoogde toiletbrillen (46 of 50 cm) met daarop soms nog verhoogde riskante opzetbrillen. Een té hoog toilet kan leiden tot moeite met de stoelgang of tot onvoldoende uitplassen. Kortom de hoogte van het toilet zou dus eigenlijk variabel moeten zijn: voor het opstaan hoger en voor de stoelgang lager. De Aerolet toiletlift van Economic Holland is de ergonomische oplossing, die het zelfstandig gebruik van het toilet mogelijk maakt voor iedereen met een restcapaciteit van minimaal 25% van de spierkracht in de benen.

### Uniek concept

Een belangrijk voordeel van de Aerolet toiletlift is de aanpasbaarheid voor de gebruiker. Zo wordt de Aerolet toiletlift afgesteld op de onderbeenlengte van de gebruiker én op de mate van rompstabiliteit: de zogenaamde multi-instelling.

### Optimale beweging

Uitgaande van een normale opsta-beweging, biedt de Aerolet toiletlift de ideale ondersteuning om deze beweging te bewerkstelligen. Hierbij wordt de romp voorwaarts bewogen en het zwaartepunt boven de voeten gebracht, terwijl knie- en heupgewricht zich synchroon strekken.



# Aerolet® toiletlift

### Het type Standaard (ST)

- de toiletlift (breedte: 675 mm – hoogte: 400 mm) past in praktisch alle gangbare toiletruimten
- de toiletlift is op duoblokken en verhoogde toiletbrillen (46 of 50 cm) toe te passen
- de toiletlift is op wandhangende toiletbrillen (op min. hoogte van 37 cm) toe te passen
- de toiletlift is met verschillende type toiletbrillen leverbaar (zie accessoireslijst)
- bij alle typen toiletliften ondervindt een valide persoon geen hinder van de lift
- alle typen toiletliften kunnen met opklapbare armsteunen (optie) uitgevoerd worden
- belastbaar gewicht alle typen toiletliften: 180 KG. Belastbaar gewicht vlg. TÜV-norm 125 KG.

### Het type Spoel-Föhn (SF)

- de toiletlift kan met diverse spoel-föhn-installaties (IVY, WC-VAmat etc.) geleverd worden of op deze reeds aanwezige installaties gemonteerd worden
- ideaal voor gebruiker met functiebeperkingen aan armen en/of handen
- deze installaties met warm spoelwater en warme luchtstroom zijn niet in een toiletspot geïntegreerd, maar worden gemonteerd op de Aerolet toiletlift en bewegen met de zit- en sta-op-beweging mee.

### Het type Geberit DoucheWC 7000 / 8000 (GE)

[www.geberit.nl](http://www.geberit.nl)

- de toiletlift in combinatie met de Geberit DoucheWC (staande en/of hangende modellen) is de ideale oplossing voor optimale zelfredzaamheid, hygiëne en privacy voor de gebruiker
- de reiniging en droging vindt vanuit het in de toiletspot geïntegreerde spoel-föhn-systeem plaats en heeft als voordeel, dat het niet tijdens de zit- en sta-op beweging meebeweegt
- de toiletlift wordt namelijk bovenop de Geberit DoucheWC (bestaand of nieuw) gemonteerd

### Het type Closomat - DoucheWC (CL)

- de toiletlift in combinatie met de Closomat (modellen Samoa en Rio) is de ideale oplossing voor optimale zelfredzaamheid, hygiëne en privacy voor de gebruiker
- de reiniging en droging vindt vanuit het in de toiletspot geïntegreerde spoel-föhn-systeem plaats en heeft als voordeel, dat het niet tijdens de zit- en sta-op beweging meebeweegt
- de toiletlift wordt namelijk bovenop de Closomat DoucheWC (bestaand of nieuw) gemonteerd

### Het type Douche (DO)

- de douchelift biedt de ideale ondersteuning tijdens het douchen om veilig te gaan zitten en te gaan staan
- de douchelift (24V) is uitgevoerd met een externe 230V voedingsbron
- de compacte douchelift (slechts 540 mm breed) past praktisch in iedere doucheruimte
- de douchelift wordt met een zachte antislip douchezitting uitgevoerd
- de douchelift kan met opklapbare armsteunen (optie) voorzien worden

### Het type Small (SM)

- de toiletlift (breedte: 615 mm – hoogte: 400 mm) past in alle gangbare toiletruimten
- de toiletlift is op duoblokken en verhoogde toiletbrillen (46 of 50 cm) toe te passen
- de toiletlift is op wandhangende toiletbrillen (op min. hoogte van 37 cm) toe te passen
- de toiletlift is met verschillende type toiletbrillen leverbaar (zie accessoireslijst)
- de toiletlift kan met opklapbare armsteunen (optie) voorzien worden

## Typen



Type Standaard (ST) Hangend



Type Standaard (ST) Staand



Type Spoel-Föhn (SF)



Type (GE) 8000



Type (GE) 7000



Type Closomat (CL)



Type Douche (DO)



Type Small (SM)

# Aerolet® toiletlift

### Het type Mobiel (MO)

- de mobiele toiletlift is een ideale oplossing voor bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen
- met de mobiele toiletlift hoeft niet iedere toiletruimte aangepast te worden
- de mobiele toiletlift kan snel en eenvoudig met de bestaande toiletspot verbonden worden
- verhuist de bewoner cq. gebruiker intern of extern; de toiletlift 'mobiel' mee

### Het type Automatic (AU)

- de enige toiletlift die voorzien is van een automatische instelling voor verschillende onderbeenlengten. Dit i.p.v. een handmatige instelling waar alle andere typen mee uitgevoerd zijn
- in zorginstellingen doet zich vaak de situatie voor, waarbij meerdere bewoners hetzelfde toilet gebruiken
- meerdere gebruikers met verschillende onderbeenlengten kunnen van dezelfde toiletlift gebruik maken en zelf de juiste liftinstelling programmeren die voor hen nodig is
- hierbij is het van belang om met de voeten contact met de vloer te behouden

### Het type 24Volt (24V)

- de 24V toiletlift kan in toiletruimten ingezet worden waar een wandcontactdoos niet voorhanden is of als het niet tot de mogelijkheid behoort deze aan te leggen
- de 24V toiletlift wordt geleverd met 2 accu's en een oplader
- het opladen van de accu in de oplader (230V) vindt buiten de toiletruimte plaats
- de 24V toiletlift kan met een volle accu 30-35 maal (bij een belasting van 125 KG) gebruikt worden
- alle typen toiletliften kunnen met een 24V uitrusting (optie) uitgevoerd worden

### Het type Non-Contact (NC)

- de toiletlift heeft een open frame voorzide en is voorzien met een "non-contact" toiletzitting
- de open voorzide geeft meer toegankelijkheid voor vaginale reiniging
- de "non-contact" toiletzitting is tevens in zachte uitvoering leverbaar
- voor toepassing van de "non-contact" zitting op andere typen toiletliften verwijzen wij naar het overzicht 'Aerolet maat-specificaties'

### Het type Bariatric (BA)

- de toiletlift wordt ingezet voor obesitas (zwaarlijvige) gebruikers
- de toiletlift heeft een liftcapaciteit van 300 KG
- de toiletlift is voorzien van een ergonomische toiletzitting, welke speciaal geschikt is voor deze gebruikers

### Het type Sani Broyeur (SA)

- de toiletlift in combinatie met een Sani Broyeur vermaal- en pomprijsrichting wordt ingezet, wanneer een rioolafvoer niet aanwezig is of niet aangelegd kan worden
- de Sani Broyeur vermaal- en pomprijsrichting heeft een beperkte afmeting en kan zonder breekwerk geïnstalleerd worden
- de vermaler vermaalt de faecaliën en voert het afvalwater door een dunne afvoerbuis naar een hoger of verder weg gelegen hoofdleiding

### Het type Vertikaal (VE)

- de verticale toiletlift is ideaal geschikt voor personen met beperkte knie- en/of heupflexie
- de toiletlift (breedte 69 cm) past in praktisch alle gangbare toiletruimten
- maximale toiletbrilstijging 85 cm bij 40 cm toiletphoogte



Type Mobiel (MO) detail



Type Mobiel (MO)



Type Automatic (AU)



Type Automatic (AU)



Type 24Volt (24V)



Type Non-Contact (NC)



Type Bariatric (BA)



Model Vertical (VE)



Type Sani Broyeur (SA)



# Aerolet® toiletlift

## Bediening

### Toiletlift bediening



De drukknoppen (hoog/laag) op linker- of rechterarmsteun voor het bedienen van de Aerolet toiletlift

### Douchelift bediening



De waterdichte drukknoppen (hoog/laag) op linker- of rechterarmsteun voor bedienen van de Aerolet douchelift

### Handafstandsbediening



De handafstandsbediening wordt toegepast indien de Aerolet zonder armsteunen gebruik wordt. Of indien men over beperkte hand- en/of vingerfunctie beschikt. De bediening is tevens in combinatie met de drukknoppen toe te passen.

### Lucht bediening



De luchtbediening (blazen en zuigen) wordt toegepast, indien men niet over de kracht beschikt om de drukknoppen te bedienen. Of indien men één of twee handen vrij wil houden om zich aan handgrepen vast te houden tijdens de op- en neergang van de lift.

## Accessoires

### Antislip toiletzitting



De zitting is vooral geschikt voor gebruikers met zwakke spieren of als men minder controle heeft over het onderlichaam. Het warme, antislip oppervlak staat garant voor zitcomfort, en voorkomt 'doorzitten' (decubitus)

### Zachte toiletzitting



De zitting is voor personen met zwakke spieren of personen met minder controle over het onderlichaam. Het warme, zachte oppervlak staat garant voor zitcomfort en voorkomt 'doorzitten' (decubitus).

### Non-Contact zitting (zacht)



De zachte toiletzitting heeft een open voorzijde, welke meer toegankelijkheid biedt voor vaginale reiniging.

### Ergonomische toiletzitting



De ergonomische zitting heeft een groot zitoppervlak, terwijl de zijkanalen een goed houvast bieden. De pasvorm bevordert een juiste belasting of ontspanning van verschillende spiergroepen van de dijen en draagt bij tot een goede stoelgang. De rillen in de zitting bevorderen de bloedsomloop en voorkomen het plakken van de huid bij langer gebruik.

### Non-Contact toiletzitting



De open voorzijde van de zitting biedt meer toegankelijkheid voor vaginale reiniging.

### Rug- en lendengordel



De rug- en lendengordel biedt achter- en voorwaartse ondersteuning en is direct aan de toiletlift gemonteerd, zodat totale ondersteuning tijdens het liftraject intact blijft. Zeer geschikt voor personen met een instabiele rompbalans.

### Opklapbare armsteun



De liften kunnen geleverd worden met opklapbare armsteunen i.p.v. met vaste armsteunen. Vooral bij het zijdelings benaderen van het toilet kan bij beperkte ruimte de armsteun opgeklapt worden.

### Toiletrolhouder



De houder biedt de mogelijkheid om de toiletrol aan één van de armsteunen te bevestigen. Zo is het toilet papier altijd binnen handbereik.

# Aerolet® toiletlift maat specificaties in cm

Maat	Omschrijving	ST standaard	SF spoel-föhn	GE-7000 geberit	GE-8000 geberit	CL closomat	DO douche	SM smal	SB sani-broyeur	NC non-contact	
A	Tussen muur en bevestigingsgaten van het closet	9,5	11 / 17,5	-	-	-	-	9,5	9,5	9,5	
B	Lengte armsteunen	68	68	68	68	68	68	68	68	68	
C	Tussen de kappen	42,5	42,5	50	45	52	-	36,5	42,5	42,5	
D	Breedte armsteunen instelbaar	65 / 70	65 / 70	68 / 74	67 / 72	68 / 74	65 / 70	59 / 64	65 / 70	65 / 70	
E	Breedte van de lift	67,5	67,5	76	70	77,5	54	61,5	67,5	67,5	
G	Hoogte opklapstand armsteun	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
H*	Montage hoogte instelbaar m.b.v. adaptor	39,5 / 50	39,5 / 50	39,5 / 50	39,5 / 50	39,5 / 50	43 / 53	39,5 / 50	39,5 / 50	39,5 / 50	
I	Maximum stijging closetzitting bij H=40 cm (instelbaar)	100	100	100	100	100	103	100	100	100	
J	Min. en max. hoogte armsteun bij H=40 cm en H=50 cm	63 / 89 / 73 / 99	63 / 89 / 73 / 99	63 / 89 / 73 / 99	63 / 89 / 73 / 99	63 / 89 / 73 / 99	63 / 89 / 73 / 99	63 / 89 / 73 / 99	63 / 89 / 73 / 99	63 / 89 / 73 / 99	
K	Lengte voet van de lift	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	
L	Lengte frame van de lift	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
M	Max. verschuiving toiletzitting	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
N	Afstand bedieningsknoppen	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
O	Afstand bevestigingsbouten aan de toiletpot (variabel)	14,2 / 17,7	14,2 / 17,7	vaste maat	vaste maat	vaste maat	aan de muur	14,2 / 17,7	14,2 / 17,7	14,2 / 17,7	
P	Hoogte tot max. snoerlengte	40 / 300	40 / 300	-	-	-	500	300	40 / 300	40 / 300	
Q	Minimale afstand	45	45	-	-	-	-	42	45	45	
R	Water stopkraan 1/2"	-	17 / 45	-	-	-	-	-	-	-	
S	Hoogte stopkraan 1/2"	-	20 / 100	-	-	-	-	-	-	-	
<b>OPTIES</b>		● = mogelijk ○ = niet mogelijk									
	Batterij back-up	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Automatische verstelling	●	●	●	●	○	○	●	●	●	
	24 volts uitvoering	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Bariatric (300 Kg)	●	○	○	○	○	○	○	●	○	
	Mobiele uitvoering	●	○	○	○	○	○	○	●	○	
	Opklapbare armsteunen L - R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
H*	Hoogte lift 37cm bij wandmodel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Een lift met een Bariatric uitvoering kan NIET uitgevoerd worden met een Automatische verstelling											
Materiaal : RVS en KTL-lak op staal. Rilsan coating ABS omhuizing											
Kleur : Wit											
Garantie : 12 maanden											
Maximum hefgewicht : 180 Kg 125 Kg TOV norm											
Netspann. : 230 V - 50 Hz.											
Netstroom : Max. 3 A											
Stroom opn.: 120 VA											
		<p>Boven aanzicht      Voor aanzicht      Zij aanzicht</p>									



Frankfurtstraat 37  
1175 RH LIJNDEN  
Telefoon : 020-497 77 71  
Telefax : 020-497 74 91  
E-mail : info@economic-holland.nl  
Internet : www.economic-holland.nl  
**Patient Care Systems**

advies - service - verkoop

# Aerolet® toiletlift



Natuurlijk opstaan

Zelfstandig gebruik

Uniek concept

Natuurlijke opsta-beweging



De beweging van de Aerolet toiletlift gaat uit van de natuurlijke opsta-beweging