

# Het juiste Invacare sling model kiezen



*Knowledge bank*



Yes, you can.®



## Het juiste sling model kiezen

Zorg er altijd voor dat de sling specifiek gemaakt is voor de tillift die je gebruikt, want als je dit niet doet, kan dit serieus letsel veroorzaken. Er zijn verschillende types en maten liftmatten beschikbaar. De meest geschikte sling kiezen voor je cliënt zorgt voor veiligheid en comfort tijdens de transfer. Je moet denken aan:

- Functieniveau, maat, breedte en gewicht van de cliënt
- Het type transfer
- Slingvorm passend bij lichaamscontrole, bijvoorbeeld U-vorm of volledige lichaamsondersteuning
- Voorkeurspositie als gevolg van medische conditie, zoals beroerte of amputatie
- Materiaal type en eventuele polstering
- Mogelijke gevoeligheid voor druk op een bepaalde plek

Het belangrijkste doel bij het kiezen van een liftmat is om de lichaamsondersteuning te bieden die nodig is. *Invacare slings* zijn ontworpen om de gebieden waar lichaamscontrole en spiersterkte verminderd zijn te ondersteunen. De belangrijkste lichaamsdelen zijn de benen, heupen, romp en hoofd. Het volgende geeft een overzicht van welke slingmodel geschikt is bij welke fysieke mogelijkheden:


### Beoordeling lichaamscontrole ▼

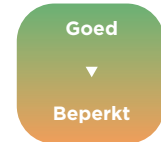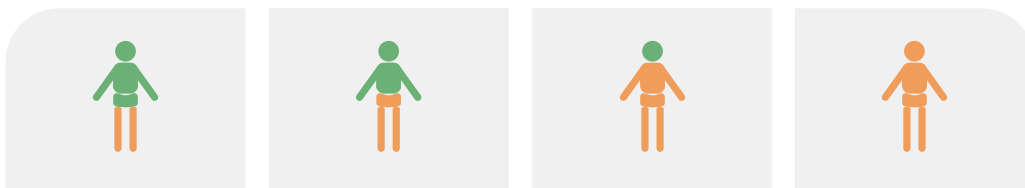

### Lichaamsondersteuning per *Invacare Slings* model ▼

Zeer weinig ▼	Weinig ▼	Enigszins ▼	Volledig ▼
	Universal Low	Universal Standard	Universal High
		Amputee	Universal High Plus
		Easy-Fit	
		Comfort Standard	
		Comfort In Situ	
			Comfort High
Dress Toileting Low			
Dress Toileting High			
Light Transfer Support			
Standing Transfer Vest			
Standing Transfer Vest with Groin band			
Stand Assist			
Transfer Stand Assist			

### Beoogd gebruik

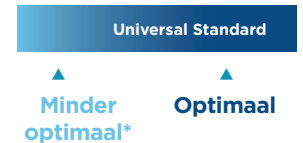

#### \*Minder optimaal

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de cliënt niet meer mogelijkheden heeft dan de liftmat laat gebruiken. Oftewel, dat hij/zij enige tijd geïmmobiliseerd wordt. Verder wordt er meer materiaal gebruikt dan nodig is wat het aanleggen lastiger maakt.

### Transfer type ▼

Zitten ↔ Sta Zitten ↔ Zitten	Zitten ↔ Zitten	Zitten ↔ Zitten Liggen ↔ Zitten Liggen ↔ Liggen	Liggen ↔ Zitten Liggen ↔ Liggen
---------------------------------	-----------------	---	------------------------------------

## Sling vormen

### ► Slings met gescheiden benen

Deze sling is eenvoudiger aan te leggen en weer weg te halen door de gescheiden beenondersteuning. De cliënt kan deelnemen aan deze handelingen. Afhankelijk van de transfertaak en het risico op glijden, biedt deze reeks drie verschillende openingbreedtes.

#### Reguliere opening

Voor universele transfers.

Invacare Universal Sling familie:

- Universal Low
- Universal Standard
- Universal High
- Universal High Plus

#### Kleine opening

Voor cliënten met atrofie in hun bilspieren. De beenondersteuning kunnen veilig in hangmatpositie worden geplaatst.

Invacare slings:






- Easy-Fit
- Amputee

#### Grote opening

Met name voor hygiëne doeleinden met een goede toegang tot de cliënt. Met minder stof dan andere modellen is deze liftmat eenvoudig aan te leggen en te verwijderen - vooral wanneer iemand in een rolstoel zit.

Invacare slings:

- Dress Toileting Low
- Dress Toileting High

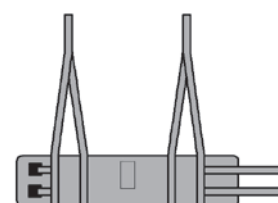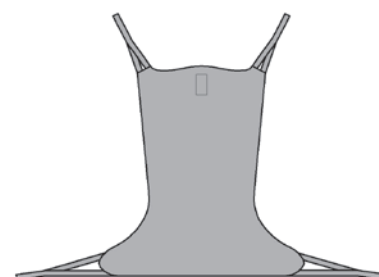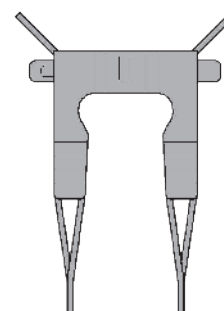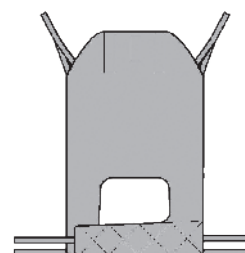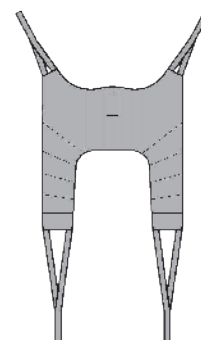

### ► Niet-gescheiden benen

Een sling voor cliënten die meer ondersteuning nodig hebben. Het lagere gedeelte van de sling moet 10 cm achter de knieholte geplaatst worden.

Invacare Comfort Slings:

- Comfort Standard
- Comfort High
- Comfort In Situ

### ► Vest voor sta- en looptraining

Een liftmat die cliënten een actievere en onafhankelijker transfer met veilige ondersteuning biedt. Kan worden gebruikt als trainingsmiddel voor bijvoorbeeld sta- of balanstreining.

- Standing Transfer Vest

### ► Lichte transfer ondersteuning

Sling voor ondersteuning, herpositionering en/of tillen van een lichaam.

- Light Transfer Support