

Formidabel Eco



Zorgbed \

Formidabel Eco is een budgetvriendelijk hoog laag bed, maar boet zeker niet in aan opties en kwaliteit. Dit elektrisch verstelbaar bed is namelijk perfect af te stemmen op de noden van de zorgvrager.

Wat maakt het zorgbed Formidabel Eco zo uniek? \

- \ Budgetvriendelijk
- \ Keuze uit Basic, Solid of Unique onrusthekkens

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-01, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

OVERZICHT FORMIDABEL ECO



01 Onrusthekken 'Basic, Solid & Unique'

De zijpanelen vormen de basis van de zijdelingse bescherming. Deze kunnen eenvoudig en zonder gereedschap vervangen worden door onrusthekkens. Keuze uit doorlopende onrusthekkens Basic, gedeeltelijke onrusthekkens Solid of zijdelingse bescherming Unique.

Meer info op pagina 4-6

02 Rempedaal/remsysteem

Het vastzetten van het bed gebeurt via individuele wielvergrendeling. Optioneel met een centraal remsysteem voor 4 wielen.

Meer info op pagina 7

03 Hoogte-instellingen

De stabiele draagarmen van de Formidabel Eco bieden een hoog verstelbereik van ± 27 cm in de laagste stand voor valbescherming tot ± 80 cm in de hoogste stand voor de verzorging. Het uitstappen uit het bed wordt bovendien vergemakkelijkt door een regelbare hoogte.

Meer info op pagina 9

04 Matrashouders

De rug- en onderbeensteun zijn elk voorzien van 2 matrashouders voor optimale fixatie van de matras in elke positie.

05 Wielen/afdekkap

De dubbele $\text{\O}50$ mm loopwielen met esthetische afdekkap zorgen voor een extra huiselijke indruk en een vlotte verplaatsbaarheid binnen de kamer. De dubbele loopwielen van $\text{\O}100$ mm zorgen voor een goede verrijdbaarheid en wendbaarheid van het bed.

Meer info op pagina 9

06 Hoofd- en voeteinde

De hoofd- en voeteindes zijn in verschillende types verkrijgbaar, in houtimitatie, bekleed of met hoes.

Meer info op pagina 8

07 Accessoires

Op het hoofdeinde bevinden zich twee voorzieningen voor de bedgalg of de leeslamp. Het bed kan uitgerust worden volgens de zorgbehoeftes.


08 Ligvlak

Het ligvlak is standaard uitgerust met eenvoudig te reinigen en luchtcirculerend metalen lamellen. Optioneel kunststof ligvlak met uitneembare elementen beschikbaar.

Meer info op pagina 7

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-01, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

BEDIENING & WERKING

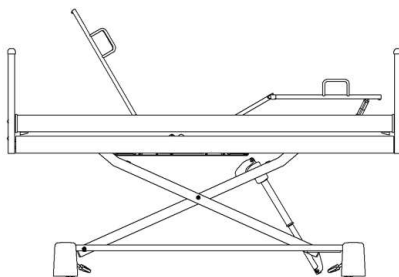


COMFORT ZITSTAND

De rug- en dijbeensteun worden simultaan geïnclineerd. De gebruiker kan op een aangename manier tv kijken of lezen in een actieve zithouding.



SLAAPSTAND

De lage slaapstand van 27 cm hoogte zorgt voor een extra veilige slaappositie en preventie tegen pijnlijke vallen.

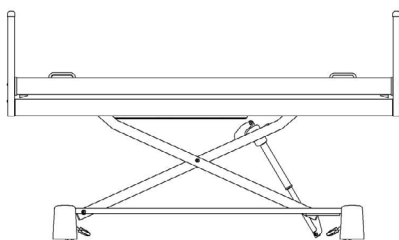


VERZORGINGSSTAND


Beweeg het bed naar de hoogste stand van 80 cm. Het ligvlak van het bed wordt horizontaal ingesteld.



Blokkeer- en deblokkeerfuncties

Blokkeren en deblokkeren van functies met behulp van een blokkeersleutel op de achterkant van de handbediening.

 = Gebruikersstand, de scenario-functies kunnen worden bediend.




 = Blokkeerstand, alle functies zijn geblokkeerd, alleen de bedverlichting kan worden in- en uitgeschakeld.

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-01, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

ZIJDELINGSE BESCHERMING BASIC

Onrusthekkens Basic - de standaard zijdelingse bescherming

De eendelige onrusthekkens Basic zijn doorlopend en bieden bescherming tegen pijnlijke vallen. Eenvoudig te verhogen in een paar stappen.

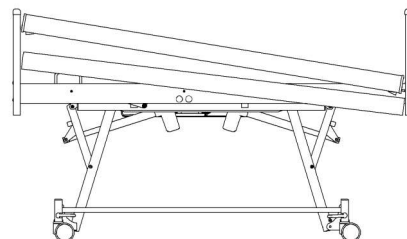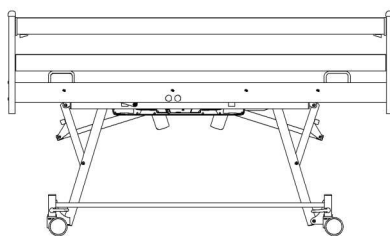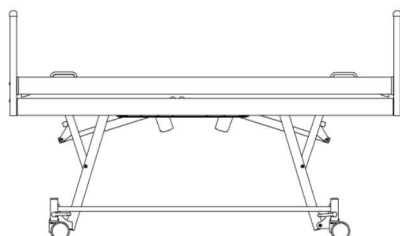





Onrusthekkensverhoger Basic

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-01, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

ZIJDELINGSE BESCHERMING SOLID

Onrusthekkens Solid - stabiliteit en functionaliteit wanneer deze nodig zijn

De verhouding van de onrusthekkens Solid werd assymetrisch uitgevoerd in een 40:60 verhouding. Dit vereenvoudigt het in- en uitstappen aanzienlijk, en biedt bovendien een goede bescherming tegen pijnlijke vallen.

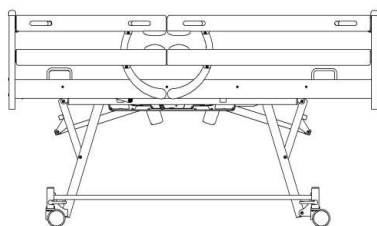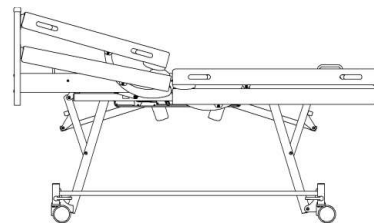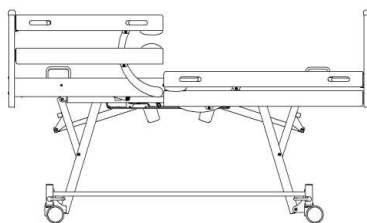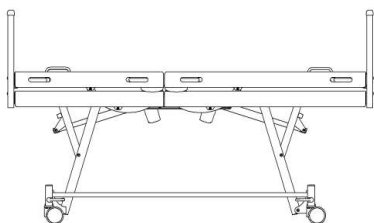

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-01, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

ZIJDELINGSE BESCHERMING UNIQUE

Onrusthekkens Unique - bescherming en mobiliteit zonder vrijheidsbeperkende maatregelen

Zoveel vrijheid als nodig, zo veel bescherming als nodig. De unieke onrusthekkens Unique bieden anders dan conventionele zijbeschermingen variabele oplossingen in een paar stappen zonder dat er gereedschap nodig is. De zijpanelen kunnen eenvoudig en zonder gereedschap worden vervangen door onrusthekkens.


Afhankelijk van de verzorgsituatie kunnen de elementen in verschillende combinaties op het bed worden aangebracht: zijpanelen wanneer er geen zijdelingse bescherming nodig is, onrusthekkens bij gebruikers die de bescherming wel nodig hebben. Eenvoudig, traploos en telescopisch in de hoogte verstelbaar. De onrusthekkens bieden niet alleen bescherming maar kunnen ook dienen als opstaphulp.



Vrijheid en comfort zonder onrusthekkens



Bescherming en mobilisatie zonder vrijheidsbeperkende maatregelen

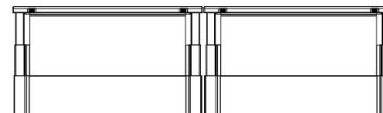


Volledige bescherming met inachtneming van vrijheidsbeperkende maatregelen

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-01, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie


WIELEN

Keuze uit 3 groottes van wielen en verschillende remsystemen:

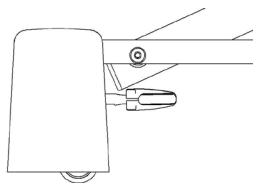


E50

Dubbele loopwielen Ø50 mm met 2+2 remstysteem en wielafdekking in kunststof

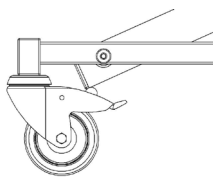

E100

Dubbele loopwielen Ø100 mm met enkele wielvergrendeling

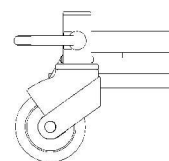

E100

Dubbele loopwielen Ø100 mm met centraal remstysteem

LIGVLAK

Het zorgbed wordt standaard geleverd met een 4-delig ligvlak met metalen lamellen. Voor zorgbedden met ligvlakbreedte van 90 cm kan optioneel gekozen worden voor een ligvlak met uitneembare kunstfoelementen voor eenvoudig onderhoud.



4-delig metalen ligvlak met breedte van 90 cm



4-delig kunststof ligvlak met breedte van 90 cm


GEÏNTEGREERDE BEDVERLENGING

Het ligvlak is verlengbaar tot 220 cm. Afhankelijk van de gekozen onrusthekkens zijn er bedverlengingssets beschikbaar voor zowel Solid als Basic. Op aanvraag is een ligvlaklengte van 210 cm mogelijk.

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-01, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

HOOFD- EN VOETEINDE


Keuze uit 9 verschillende opties voor het hoofd- en voeteinde in hout of bekleding. Optioneel kunnen ook de zijpanden van het zorgbed gestoffeerd worden in dezelfde bekleding als het hoofd- en voeteinde voor een uitermate huiselijk gevoel. Houten hoofd- en voeteindes type BN kunnen bovendien uitgerust worden met een afneembare textielhoes in stof of kunstleer.

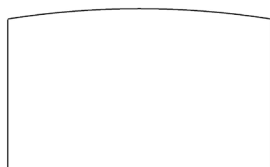

BN



BG

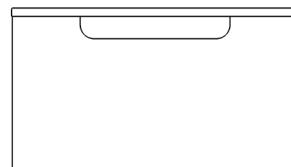


BO



RG



RO

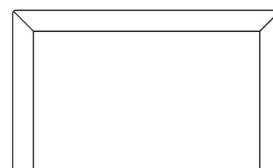

RD



RN



PF



PN








STANDAARDCOLLECTIE

Keuze uit diverse standaard houtkleuren voor hoofd-, voeteinde en onrusthekkens. Op vlak van bekledingsstoffen biedt FMB een uitgebreid standaardassortiment aan bekleding in stof en kunstleer aan. We staan u graag bij in de keuze van de juiste bekleding.

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-01, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

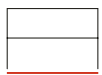TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN

TYPE							
Formidabel Eco - E50	27-80	209-225	103	200-220x90	>125	ja	★ ★ ★
Formidabel Eco - E100	27-80	209-225	103	200-220x90	>125	ja	★ ★ ★

★ = huishoudelijk gebruik / ★ ★ = projectmatig gebruik / ★ ★ ★ = intensief projectmatig gebruik

VEILIGHEIDSVEREISTEN

Maximale werkbelasting: 175 kg

Maximale matrasdikte: 15 cm (met onrusthekkens Basic) en 16 cm (met onrusthekkens Solid of Unique)

BATTERIJ EN MOTOR

Stand-by vermogen	0,5 Watt
Stand-by energieverbruik	15,8 kWh/Jaar
Elektrische aansluiting	100 - 240 V 1,5 - 0.8 A 50/60 Hz
Beschermingsklasse	II

TECHNISCHE INFORMATIE VERSTELLINGEN

Hoogteverstelling: 27 - 80 cm

Duur van de hoogteverstelling: ± 34 seconden (afhankelijk van de belasting)

Rugleunverstelling: 70 ± 5°

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-01, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie