

Formidabel First



Zorgbed \

De nieuwe generatie zorgbedden voor de gezondheidszorg. Het Formidabel First zorgbed bevat verschillende fixatievriendelijke opties voor zijdelingse bescherming. Bovendien is Formidabel First ook het bed met het meest huiselijke design dankzij de innovatieve vormgeving en optionele stoffering. Een tilliftoegankelijk en toekomstgericht bed, standaard uitgerust met trendelen/anti-trendelen functie.

Wat maakt het zorgbed Formidabel First zo uniek? \

- \ Uiterst fixatievriendelijk
- \ Innovatief en modulair
- \ Trendelenburg- en antitrendelenburg functie
- \ Huiselijk gevoel dankzij optionele stoffering
- \ Tilliftoegankelijk

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-01, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

OVERZICHT FORMIDABEL FIRST



01 Onrusthekken 'Unique'

Anders dan de conventionele onrusthekken biedt het onrusthekken 'Unique' de mogelijkheid om snel en flexibel op de betreffende zorgsituatie te reageren. Het kan in een paar eenvoudige stappen compleet zonder gereedschap worden aangebracht op het zorgbed en is traploos telescopisch verstelbaar. Het afwasbare, lichte mesh-weefsel is stabiel met een aangename transparantie. Het onrusthekken beschermt de bewoner bij het hoofdgedeelte en/of voetgedeelte en kan daarnaast ter ondersteuning worden gebruikt als hulp bij het opstaan.

Meer info op pagina 4

02 Zijpaneel Unique

Het vast zijpaneel 'Unique' dient als decoratieve afscheiding wanneer er geen zijdelingse bescherming nodig is. Het kan zonder gereedschap worden verwijderd en vervangen door een onrusthekken.

Meer info op pagina 4

03 Rempedaal/remsysteem

Het vastzetten van het bed gebeurt door een 2+2 remsysteem. De modellen F75 en F100 zijn optioneel verkrijgbaar met een 4-wiel centraal remsysteem. De rempedalen zijn aan elke kant van het bed goed bereikbaar.

Meer info op pagina 5

04 Wielen/afdekkap

De dubbele Ø50 mm loopwielen met esthetische afdekkap zorgen voor een extra huiselijke indruk en een vlotte verplaatsbaarheid binnen de kamer. De dubbele loopwielen van Ø75 mm en Ø100 mm zorgen voor een goede verrijdbaarheid en wendbaarheid van het bed.

Meer info op pagina 5

05 Hoofd- en voeteinde

De hoofd- en voeteindes zijn in verschillende types verkrijgbaar, in houtimitatie, bekleed of met hoes.

Meer info op pagina 7

06 Ligvlak

Het ligvlak is standaard uitgerust met eenvoudig te reinigen en luchtcirculerende metalen lamellen. Optioneel kunststof ligvlak met uitneembare elementen beschikbaar. Telescopisch geïntegreerde bed- en bodemverlenging aan het voeteneinde.

Meer info op pagina 6

07 Matrashouders

De rug- en onderbeensteun zijn elk voorzien van 2 matrashouders voor optimale fixatie in elke positie.

08 Accessoires

Op het hoofdeinde bevinden zich twee voorzieningen voor de bedgalg, serumhouder of de leeslamp. Het bed kan uitgerust worden volgens de zorgbehoeftes.

09 Hoog/laag functie

De stabiele draagarmen van de Formidabel First bieden een hoog verstelbereik van ± 23 cm in de laagste stand voor valbescherming tot ± 83 cm in de hoogste stand voor de verzorging. Het uitstappen uit het bed wordt bovendien vergemakkelijkt door een regelbare hoogte.

Meer info op pagina 3


Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-01, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

BEDIENING & WERKING



Scenario-handbediening

De verlichte en overzichtelijke handbediening van het zorgbed Formidabel First onderscheidt zich door zijn eenvoud en ergonomische vormgeving. De symbolen zorgen voor een intuïtieve en eenvoudige bediening.

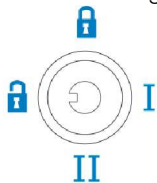

Blokkeer- en deblokkeerfuncties
op de achterkant van de handbediening

I = Verzorgingsstand 1, alle functies, met uitzondering van Trendelenburg, kunnen bediend worden.

II = Verzorgingsstand 2, alle functies kunnen bediend worden.


🔒 = Gebruikersstand, de scenario-functies kunnen worden bediend.

🔒 = Blokkeerstand, alle functies zijn geblokkeerd, alleen de bedverlichting kan worden in- en uitgeschakeld.




SLAAPSTAND

De extra lage slaapstand van 23/26 cm hoogte zorgt voor een extra veilige slaappositie en preventie tegen pijnlijke vallen.

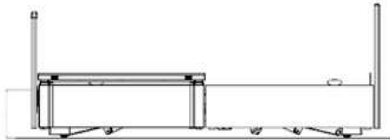


VERZORGINGSSTAND

Beweegt het bed naar de hoogste stand van 80/83 cm. Het ligvlak van het bed wordt horizontaal ingesteld.

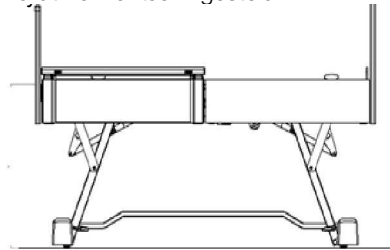


TRENDELENBURG VERSTELLING

Deze functie is enkel beschikbaar bij het inschakelen van de verzorgingsmodus. Trendelenburg verstelling van maximaal 12°.

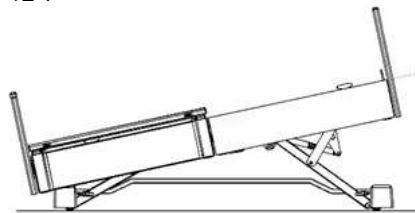


OPSTAP STAND

Voor de ideale sta-op-positie van het bed zorgt de opstap stand ervoor dat het bed stopt op de ideale hoogte van 35/38 cm, en dit in combinatie van verstellen van de rugleuning. De combinatie van beide functies vergemakkelijkt het uitstappen van de gebruiker.

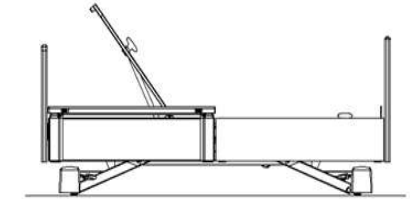

COMFORT ZITSTAND

De rug- en dijbeensteun worden simultaan geïnclineerd, gecombineerd met een anti-trendelenburg beweging. De gebruiker kan op een aangename manier tv kijken of lezen in een actieve zithouding.

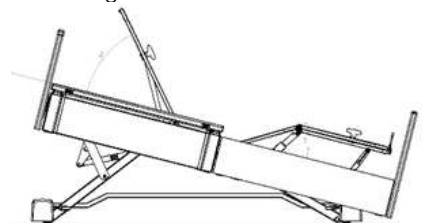

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-01, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

ZIJDELINGSE BESCHERMING UNIQUE

Onrusthekkens Unique - bescherming en mobiliteit zonder vrijheidsbepalende maatregelen

Zoveel vrijheid als nodig, zo veel bescherming als nodig. De unieke onrusthekkens Unique bieden anders dan conventionele zijbeschermingen variabele oplossingen in een paar stappen zonder dat er gereedschap nodig is. De zijpanelen kunnen eenvoudig en zonder gereedschap worden vervangen door onrusthekkens.

Afhankelijk van de verzorgingsituatie kunnen de elementen in verschillende combinaties op het bed worden aangebracht: zijpanelen wanneer er geen zijdelingse bescherming nodig is, onrusthekkens bij gebruikers die de bescherming wel nodig hebben. Eenvoudig, traploos en telescopisch in de hoogte verstelbaar. De onrusthekkens bieden niet alleen bescherming maar kunnen ook dienen als opstaphulp.



Vrijheid en comfort zonder onrusthekkens



Bescherming en mobilisatie zonder vrijheidsbepalende maatregelen




Volledige bescherming met inachtneming van vrijheidsbepalende maatregelen

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-01, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie


WIELEN

Keuze uit 3 groottes van wielen en twee verschillende remsystemen:

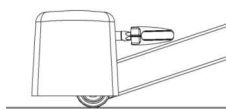


F50

Dubbele zwenkwielen Ø50 mm met 2+2 remsysteem en wielafdekking van kunststof of (optioneel) metaal

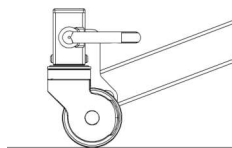


F75

Dubbele zwenkwielen Ø75 mm met 2+2 remsysteem

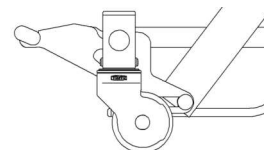


F75

Dubbele zwenkwielen Ø75 mm met centraal remsysteem

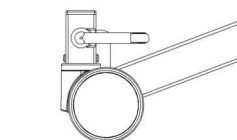

F100

Dubbele zwenkwielen Ø100 mm met 2+2 remsysteem

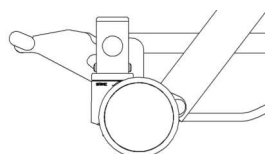

F100


Dubbele zwenkwielen Ø100 mm met centraal remsysteem

WIELAFDEKKAP

Voor een nog meer huiselijke uitstraling zijn de dubbele Ø50 loopwielen voorzien van een esthetische afdekking. De wielafdekking wordt standaard geleverd in kunststof bij zorgbedden met ligvlakbreedte van 90 en 100 cm en dubbele loopwielen Ø50 mm. Optioneel beschikbaar in metaal voor zorgbedden met ligvlakbreedte van 90, 100 en 120 cm en dubbele loopwielen Ø50 mm.



Wielafdekking Ø50 mm in kunststof

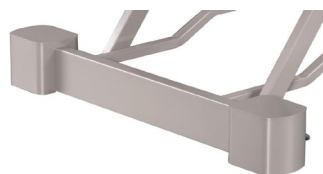

Wielafdekking Ø50 mm in metaal

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-01, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

LIGVLAK

Het zorgbed wordt standaard geleverd met een 4-delig ligvlak met metalen lamellen. Voor zorgbedden met ligvlakbreedte van 90 cm kan optioneel gekozen worden voor een ligvlak met uitneembare kunststofelementen voor eenvoudig onderhoud.




4-delig metalen ligvlak met breedte van 90, 100 of 120 cm



4-delig kunststof ligvlak met breedte van 90 cm

GEÏNTEGREERDE BEDVERLENGING


Het ligvlak kan eenvoudig, snel en zonder gereedschap verlengd worden tot 210 of 220 cm. Bij het verlengen tot 220 cm dient het bed voorzien te worden van de safe-guard om de optimale veiligheid te garanderen, indien er zijdelingse bescherming aan het voeteinde voorzien is.

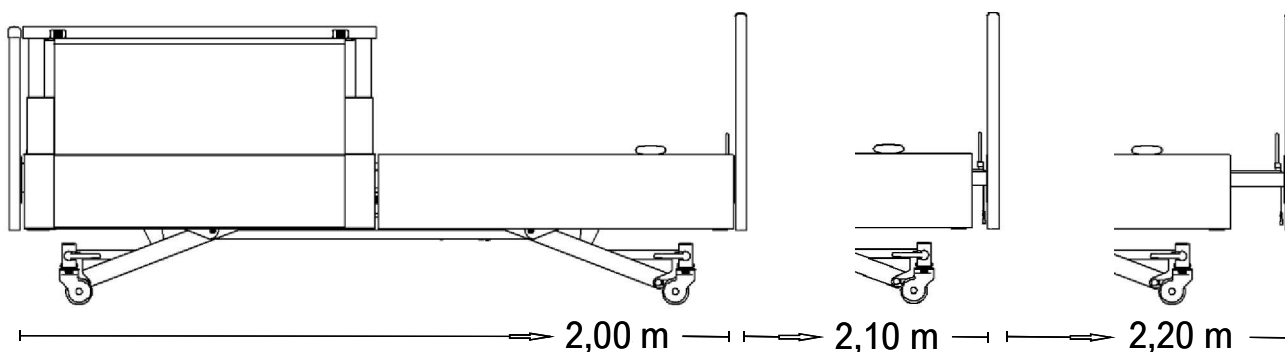

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-01, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

HOOFD- EN VOETEINDE


Keuze uit 9 verschillende opties voor het hoofd- en voeteinde in hout of bekleding. Optioneel kunnen ook de zijpanden van het zorgbed gestoffeerd worden in dezelfde bekleding als het hoofd- en voeteinde voor een uitermate huiselijk gevoel. Houten hoofd- en voeteindes type BN kunnen bovendien uitgerust worden met een afneembare textielhoes in stof of kunstleer.

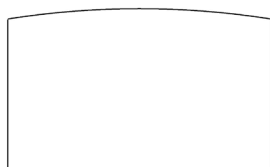

BN



BG

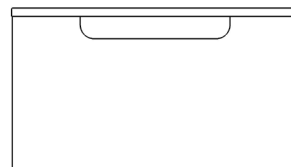


BO



RG



RO

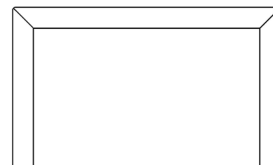

RD



RN



PF



PN

STANDAARDCOLLECTIE

Keuze uit diverse standaard houtkleuren voor hoofd-, voeteinde en onrusthekkens. Op vlak van bekledingsstoffen biedt FMB een uitgebreid standaardassortiment aan bekleding in stof en kunstleer aan. We staan u graag bij in de keuze van de juiste bekleding.

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-01, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN

TYPE							
Formidabel First - F50	23-80	210-225	103-133	200-220x90-120	>125	ja	★ ★ ★
Formidabel First - F75	26-83	210-225	103-133	200-220x90-120	>125	ja	★ ★ ★
Formidabel First - F100	26-83	210-225	103-133	200-220x90-120	>125	ja	★ ★ ★

★ = huishoudelijk gebruik / ★ ★ = projectmatig gebruik / ★ ★ ★ = intensief projectmatig gebruik

VEILIGHEIDSVEREISTEN

Maximale werkbelasting: 225 kg

Maximale matrasdikte: 20 cm

BATTERIJ EN MOTOR

Stand-by vermogen	1,8 Watt
Stand-by energieverbruik	15,8 kWh/Jaar
Elektrische aansluiting	100 - 240 V 1,5 - 0.8 A 50/60 Hz
Beschermingsklasse	II
Batterij in regelunit	3 x 9V-blokbatterij met poolbescherming

TECHNISCHE INFORMATIE VERSTELLINGEN

Hoogteverstelling: 23 - 80 cm bij wielen Ø50 mm en 26-83 cm bij wielen Ø75 of Ø100 mm.

Duur van de hoogteverstelling: ± 36 seconden (afhankelijk van de belasting)

Trendelenburgverstelling: tot 12°

Rugleunverstelling: 70 ± 5°

Dijbeenverstelling: 9°

CERTIFICATEN



Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-01, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie