

Formidabel Pro



Zorgbed \


Het Formidabel Pro bed staat synoniem voor traditionele zorg: een stevig en robuust bed dat zijn functionaliteit overstijgt. Dit zorgbed is bovendien uiterst onderhoudsvriendelijk en beschikt over twee verschillende soorten onrusthekkens (Basic en Solid). Bed aanpasbaar aan de noden van de zorg dankzij de grote hoeveelheid aan opties en accessoires.

Wat maakt de Formidabel Pro zo uniek? \

- \ Robuust en stevig zorgbed
- \ Trendelenburg- en antitrendelenburg functie
- \ Tilliftoegankelijk

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-01, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

OVERZICHT FORMIDABEL PRO

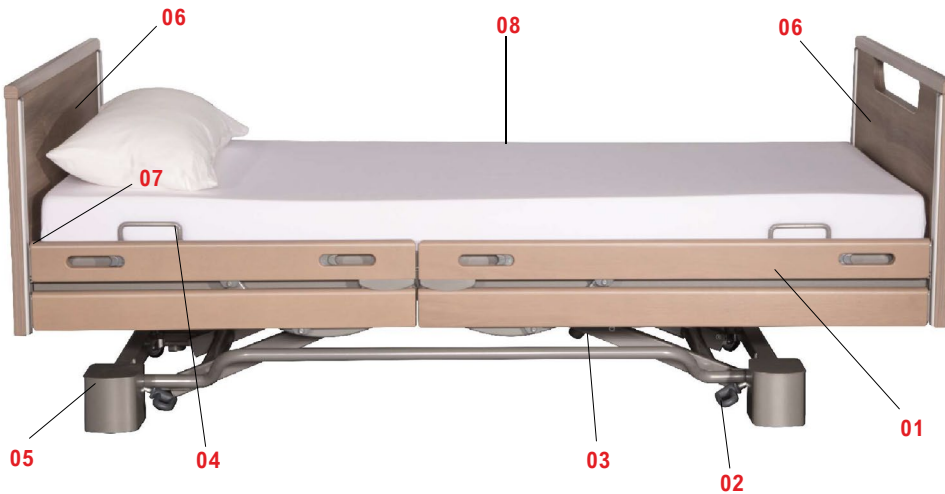

01 Onrusthekken 'Basic' en 'Solid'

Stabiliteit en functionaliteit wanneer die nodig zijn. De verhouding van twee delen van het onrusthekken Solid zijn asymmetrisch uitgevoerd in een 40:60 verhouding. Dit vergemakkelijkt het instapgemaak voor de gebruiker en biedt toch een goede bescherming. Ook verkrijgbaar zijn de eendelige onrusthekkens Basic.

Meer info op pagina 4-5

02 Rempedaal/remsysteem

Het vastzetten gebeurt per as met behulp van een 2+2 remsysteem. De modellen M75 en M100 zijn optioneel verkrijgbaar met een 4-wiel centraal remsysteem. De rempedalen zijn eenvoudig van elke kant bereikbaar.

Meer info op pagina 6

03 Hoogte-instelling

De Formidabel Pro biedt een verstelbereik van ± 25 cm in de lage slaapstand en ± 81 cm in de verzorgingsstand.

04 Matrasrand

De rug- en onderbeensteun zijn elk voorzien van 2 matrashouders die de matras mooi op hun plaats houden.

05 Wielen/afdekkap

De dubbele $\varnothing 50$ mm loopwielen met esthetische afdekkap zorgen voor een extra huiselijke indruk en een vlotte verplaatsbaarheid binnen de kamer. De dubbele loopwielen $\varnothing 75$ mm en $\varnothing 100$ mm zorgen voor een goede verrijdbaarheid en wendbaarheid van het bed.

Meer info op pagina 6

06 Hoofd- en voeteinde

De hoofd- en voeteindes zijn in verschillende types houtimitatie verkrijgbaar.

Meer info op pagina 8

07 Accessoires

Op het hoofdeinde bevinden zich twee voorzieningen voor de serumhouder of leeslamp. Het bed kan uitgerust worden volgens de zorgbehoeftes.


08 Ligvlak

Het ligvlak is standaard uitgerust met eenvoudig te reinigen en luchtcirculerend metalen lamellen. Optioneel kunststof ligvlak met uitneembare elementen.

Meer info op pagina 7


Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-01, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

BEDIENING & WERKING

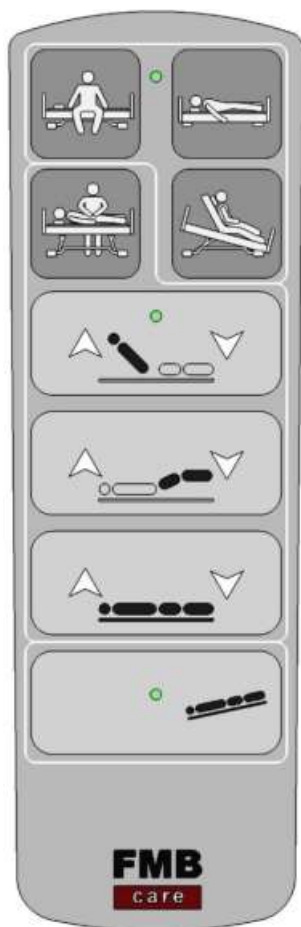

Scenario-handschakelaar

De handschakelaar van het zorgbed Formidabel Pro onderscheidt zich door zijn eenvoud en ergonomische vormgeving. De symbolen zorgen voor een intuïtieve en eenvoudige bediening.

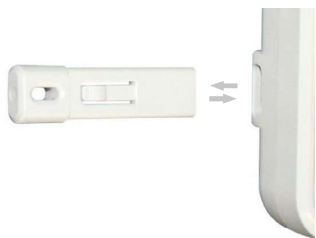

Blokkeer- en deblokkeerfuncties


via zijdelings inschuiven van de magneetsleutel.

Magneetsleutel geplaatst = de gebruiksstand, verzorgingsstand en Trendelenburgverstelling kunnen geblokkeerd of gedeblokkeerd worden.
Magneetsleutel niet geplaatst = alle gedeblokkeerde functies kunnen worden gebruikt.




SLAAPSTAND

De extra lage slaapstand van 25 cm hoogte zorgt voor een extra veilige slaappositie en preventie tegen pijnlijke vallen.

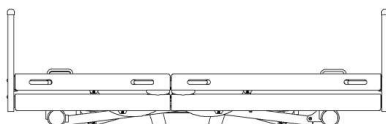


OPSTAPSTAND

Voor de ideale sta-op-positie van het bed zorgt de opstapstand ervoor dat het bed beweegt tot de ideale uitstaphoogte van 35 cm.

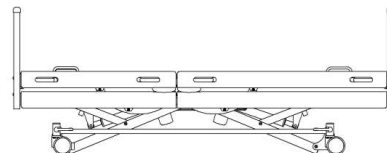


VERZORGINGSSTAND

Beweeg het bed naar de hoogste stand van 81 cm. Het ligvlak van het bed wordt horizontaal ingesteld.

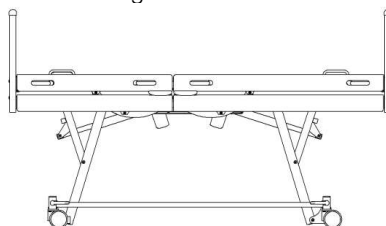


COMFORT ZITSTAND

De rug- en dijbeensteun worden simultaan geïnclineerd, gecombineerd met een anti-trendelenburg beweging. De gebruiker kan op een aangename manier tv kijken of lezen in een actieve zithouding.

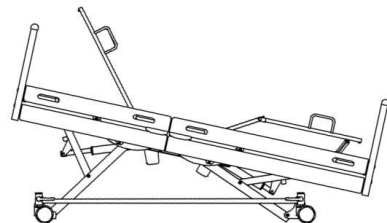

TRENDELENBURG VERSTELLING

Deze functie is enkel beschikbaar bij het inschakelen van de verzorgingsmodus. Trendelenburg verstelling van maximaal 12°.



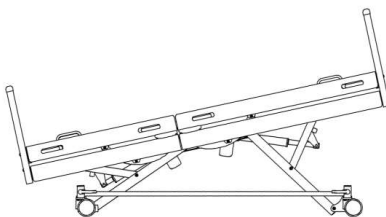


Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-01, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

ZIJDELINGSE BESCHERMING BASIC

Onrusthekkens Basic - de standaard zijdelingse bescherming

De eendelige onrusthekkens Basic zijn doorlopend en bieden bescherming tegen pijnlijke vallen. Eenvoudig te verhogen in een paar stappen.

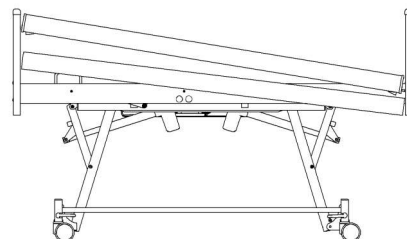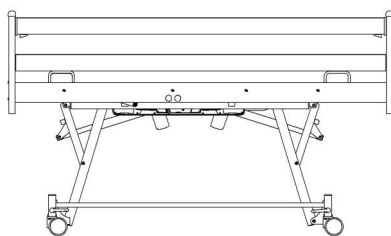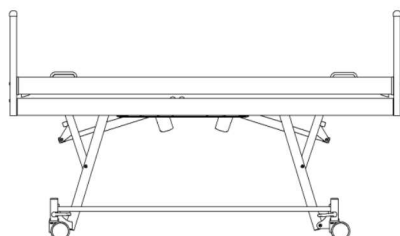





Onrusthekkensverhoger Basic

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-01, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

ZIJDELINGSE BESCHERMING SOLID

Onrusthekkens Solid - stabiliteit en functionaliteit wanneer deze nodig zijn


De verhouding van de onrusthekkens Solid werd assymetrisch uitgevoerd in een 40:60 verhouding. Dit vereenvoudigt het in- en uitstappen aanzienlijk, en biedt bovendien een goede bescherming tegen pijnlijke vallen.

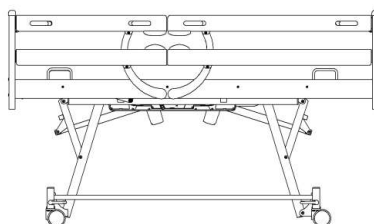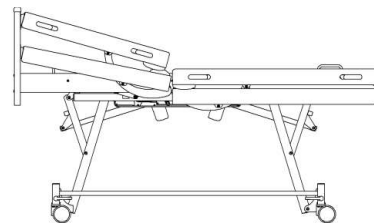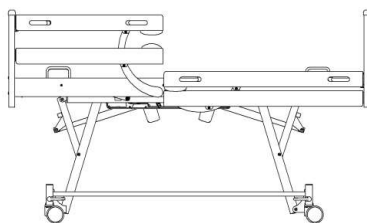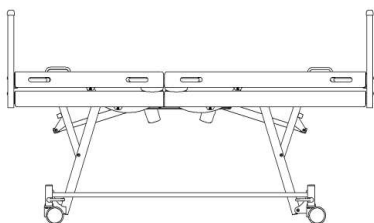

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-01, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie


WIELEN

Keuze uit 3 groottes van wielen en twee verschillende remsystemen:

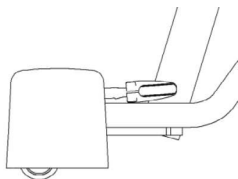


B50

Dubbele loopwielen Ø50 mm met 2+2 remsysteem en wielafdekking van kunststof of (optioneel) metaal

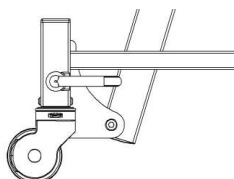


M75

Dubbele loopwielen Ø75 mm met 2+2 remsysteem

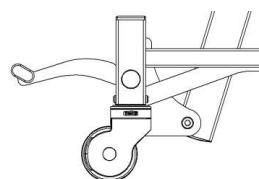


M75

Dubbele loopwielen Ø75 mm met centraal remsysteem

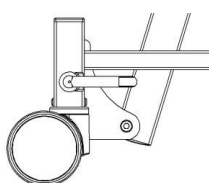

M100

Dubbele loopwielen Ø100 mm met 2+2 remsysteem

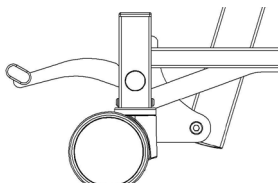

M100


Dubbele loopwielen Ø100 mm met centraal remsysteem

WIELAFDEKKAP

De esthetische afdekkap voor de dubbele loopwielen Ø50 mm zorgen voor een extra huiselijke uitstraling. De wielafdekkap wordt standaard geleverd in kunststof bij zorgbedden met ligvlakbreedte van 90 en 110 cm en dubbele loopwielen Ø50 mm. Optioneel beschikbaar in metaal voor zorgbedden met ligvlakbreedte van 90 en 110 cm en dubbele loopwielen Ø50 mm.



Wielafdekkap Ø50 mm in kunststof

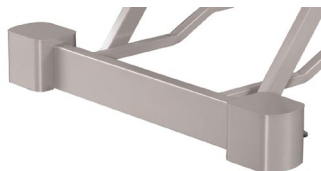

Wielafdekkap Ø50 mm in metaal

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-01, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

LIGVLAK

Het zorgbed wordt standaard geleverd met een 4-delig ligvlak met metalen lamellen. Voor zorgbedden met ligvlakbreedte van 90 cm kan optioneel gekozen worden voor een ligvlak met uitneembare kunststofelementen voor eenvoudig onderhoud.



4-delig metalen ligvlak met breedte van 90 of 110 cm



4-delig kunststof ligvlak met breedte van 90 cm


GEÏNTEGREERDE BEDVERLENGING

Het ligvlak is verlengbaar tot 220 cm. Afhankelijk van de gekozen onrusthekkens zijn er bedverlengingssets beschikbaar voor zowel Solid als Basic. Op aanvraag is een ligvlaklengte van 210 cm mogelijk.

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-01, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

HOOFD- EN VOETEINDE


Keuze uit 6 verschillende opties voor het hoofd- en voeteinde in hout.

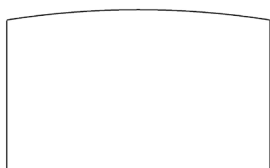

BN



BG

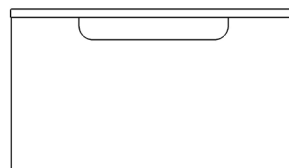

BO



RG



RO



RD








STANDAARDCOLLECTIE

Keuze uit diverse standaard houtkleuren voor hoofd-, voeteinde en onrusthekkens. We staan u graag bij in de keuze van de juiste houtkleur.

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-01, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN

| TYPE |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Formidabel Pro - B50 | 25-80 | 209-215/225 | 103-123 | 90-110x200-220 | >125 | ja | ★ ★ ★ |
| Formidabel Pro - M75 | 26-81 | 209-215/225 | 103-123 | 90-110x200-220 | >125 | ja | ★ ★ ★ |
| Formidabel Pro - M100 | 26-81 | 209-215/225 | 103-123 | 90-110x200-220 | >125 | ja | ★ ★ ★ |

★ = huishoudelijk gebruik / ★ ★ = projectmatig gebruik / ★ ★ ★ = intensief projectmatig gebruik

VEILIGHEIDSVEREISTEN

Maximale werkbelasting: 225 kg

Maximale matrasdikte: ≤15 cm

BATTERIJ EN MOTOR

| | |
|--------------------------|--|
| Stand-by vermogen | 0,5 Watt |
| Stand-by energieverbruik | 4,38 kWh/Jaar |
| Elektrische aansluiting | 100 - 240 V 1,5 - 0.8 A 50/60 Hz |
| Beschermingsklasse | II |

TECHNISCHE INFORMATIE VERSTELLINGEN

Hoogteverstelling: 25 - 80 cm bij wielen Ø50 mm en 26-81 cm bij wielen Ø75 of Ø100 mm.

Duur van de hoogteverstelling: ± 31 seconden (afhankelijk van de belasting)

Trendelenburgverstelling: tot 12°

Rugleunverstelling: 70 ± 5°

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-01, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie