



REAL 9000 PLUS VOLWASSENEN

Wanneer de functie het ontwerp bepaalt!



Geldig vanaf 070601

Laatst gewijzigd 120927

Artikelnummer 803316



REAL 9000 PLUS



REAL 9100 PLUS EL

ÉÉN MODULESISTEEM, VIER BASIS-MODELLEN

Een moderne werkstoel/speciale stoel moet zeer functioneel en kwalitatief zijn, ergonomisch zijn en er modern uitzien. De nieuwe REAL 9000 PLUS heeft het allemaal. De stoel is ontwikkeld en gemaakt in Zweden en alle onderdelen worden gemaakt met moderne machines. De hoge kwaliteitseisen zorgen voor jarenlang veilig gebruik.

MET ZWAKKE BENEN IS EEN STOEL NODIG OM IN TE ZITTEN EN OM ZICH MEE TE VERPLAATSEN

Daarmee worden hoge eisen gesteld aan de functie en de kwaliteit. De stoel moet comfortabel zijn en een ergonomisch verantwoorde zithouding geven. De wielen moeten licht rollen en de rem moet betrouwbaar zijn, zodat de stoel stevig staat wanneer er wordt opgestaan. Tegelijkertijd moeten de functies eenvoudig in te stellen zijn. Kortom, de stoel moet in alle situaties kunnen functioneren.

REAL 9000 PLUS IS EEN BELANGRIJK VERPLAATSINGSHULPMIDDEL VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS

Het REAL 9000 PLUS-systeem bestaat uit vier basismodellen (zie boven). Met behulp van de stoel wordt de gebruiker zelfstandiger en kan de gebruiker thuis en op het werk meer zelf doen. De stoelen kunnen worden verplaatst met behulp van een of twee benen, of met de armen. Dankzij met gasveer bediende of elektrische hoogteverstelling is de zithoogte eenvoudig in te stellen. Dit betekent een ergonomisch verantwoorde zithouding ten opzichte van het werkoppervlak. Met het grote aanbod

zittingen, rugsteunen, wielen, liftstangen en accessoires is het eenvoudig een functionele en comfortabele stoel samen te stellen.

STABIEL, MAAR SOEPEL PLUS-FRAME MET VEILIGE EN GEMAKKELIJK TE BEDIENEN REM

De REAL 9000 PLUS heeft een stabiel en volledig gelast frame met soepele wielen en gemakkelijk te bedienen en veilige rem. Het frame is klein, maar biedt toch veel ruimte voor de voeten. Om het risico van omvallen te minimaliseren is het achter standaard langer dan voor.

Het remsysteem met afzonderlijke rempoten en krachtig remrubber biedt maximale remwrijving op alle soorten ondergrond. De rem heeft een met de computer berekende hefboog en kan met zeer weinig kracht worden vastgezet. Tapijt en drempels zijn geen probleem dankzij de hoge vrijgang. De bevestiging van de rem is getrapt verstelbaar, waardoor de armleuningen in de breedte kunnen worden versteld, maar de stoel toch makkelijk geremd kan worden. Als de gebruiker de rem desondanks niet vast kan zetten, is een elektrische rem beschikbaar als uitstekende optie.



REAL 9700 PLUS COXIT



REAL 9800 PLUS COXIT EL



DE NIEUWE REAL 9000 PLUS WORDT IN ZWEDEN GEMAAKT EN HEEFT ALLE NOODZAKELIJKE EIGENSCHAPPEN. ALLE ONDERDELEN WORDEN GEMAAKT MET MODERNE MACHINES.

REAL 9000 PLUS BIEDT GOEDE ERGONOMIE IN ALLE DETAILS

Omdat het eenvoudig moet zijn om de functies van de stoel in te stellen, heeft de REAL 9000 PLUS ergonomisch gevormde hendels. De hendels zijn gemakkelijk bereikbaar en goed vast te pakken en hebben duidelijke symbolen voor de bedoelde functie.

Dankzij de vorm van de zitting, rugsteun en armleuning, in combinatie met verstelbare zitting en rugsteun, kan de gebruiker een ergonomisch verantwoorde zithouding krijgen die naar behoefte kan worden gevarieerd. Daarmee wordt drukbelasting op het lichaam voorkomen en worden blessures aan spieren en het skelet vermeden.

WISSELEN TUSSEN ACTIEVE EN PASSIEVE ZITHOUDING

De zitting van de REAL 9000 PLUS kan worden versteld met gasveer, zwengel of elektrische bediening. Een verstelbare zitting biedt betere mogelijkheden voor optimale ergonomie en optimaal comfort. Voorover voor een actieve, of achterover voor een ontspannen zithouding. Het is belangrijk om gedurende

de dag van zithouding te kunnen veranderen om de rug en zitbeenknobbels te ontlasten. Ons nieuwe gepatenteerde mechanisme voor zittingkanteling met grotere interval is beschikbaar als optie. U kunt zelf kiezen of de armleuningen mee bewegen of niet.

JARENLANG VEILIG GEBRUIK DOOR HOGE KWALITEITSEISEN

De vele doordachte alternatieven en opties van de REAL-stoel zorgen ervoor dat deze kan worden gevormd naar behoefte van de gebruiker. Een individueel aangepaste stoel maakt het makkelijker een actief leven te leiden. De hoge kwaliteitseisen zorgen voor jarenlang veilig gebruik.

De REAL 9000 PLUS is getest door het SP (Technical Research Institute of Sweden) en goedgekeurd volgens SS-EN 1335, 1-3. Bovendien is de stoel voorzien van het CE-keurmerk en voldoet deze aan de Zweedse wet voor medische hulpmiddelen en de voorschriften van de Zweedse inspectie voor de gezondheidszorg (Läkemedelsverket).



DE MODULESTOEL DIE WERKT IN ALLE SITUATIES ... VERPLAATSING





VERPLAATSING (HORIZONTAAL)

Het is eenvoudig om zich zittend te verplaatsen in de REAL 9000 PLUS. De wielen rollen gemakkelijk in alle richtingen en het soepele PLUS-frame biedt veel ruimte voor de benen. Door de zitting en rugsteun naar voren te kantelen hebben de voeten veel grip. De wielen zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en maten om over drempels te kunnen komen en voor alle verschillende soorten ondergrond.

VERPLAATSING (VERTICAAL)

Het hoogteverschil tussen een eettafel en een aanrecht is 20 cm. Voor een goede werkhouding bij beide is het belangrijk dat de hoogte voldoende kan worden ingesteld. De REAL 9000 PLUS heeft een gasveer met een interval van 20 cm (of 14 cm). Dat zorgt voor een goede zithouding bij zowel het aanrecht als aan tafel.

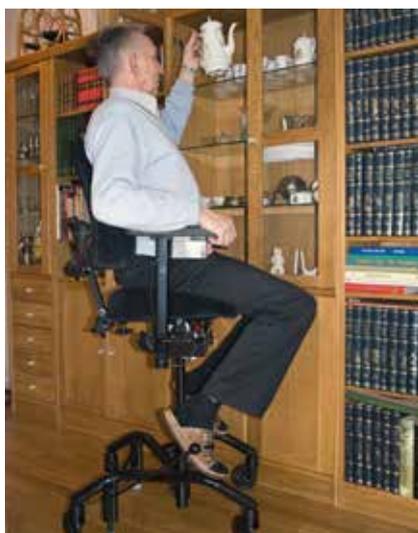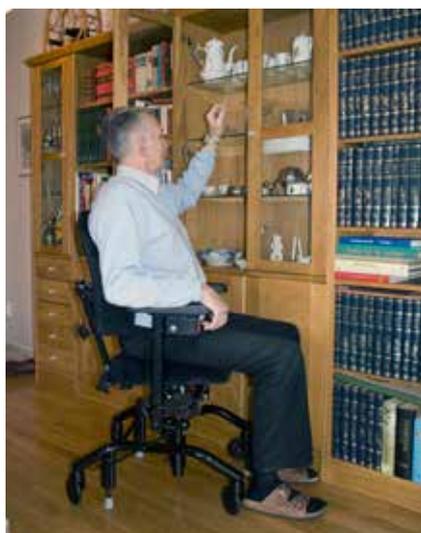

VERPLAATSING (VERTICAAL) ELEKTRISCH

De REAL 9100 PLUS EL heeft een elektrische hoogteregeling van wel 28 cm (of 20 cm). Daarmee kunnen hooggeplaatste voorwerpen makkelijk worden bereikt.

Het is belangrijk om de stoel op de rem te zetten voordat het zitgedeelte wordt verhoogd!

ZIJWAARTS AFSTAPPEN

Met de REAL 9000 PLUS is het makkelijk om zijwaarts af te stappen in een bed, rolstoel of op een toilet. Zet de stoel dichtbij en zet deze op de rem. Zet de zitting vervolgens op de juiste hoogte, klap de armsteun naar beneden en stap af. Inklapbare armsteunen zijn verkrijgbaar als optie.



REAL[®] 9000 PLUS

Wanneer de functie het ontwerp bepaalt!





[De stoel in de afbeelding is uitgerust met opties.]*

EEN SYSTEEM WAARBIJ UW BEHOEFTE DE UITVOERING **BEPALEN!**





DE MODULESTOEL DIE WERKT IN ALLE SITUATIES... ZITHOUDING

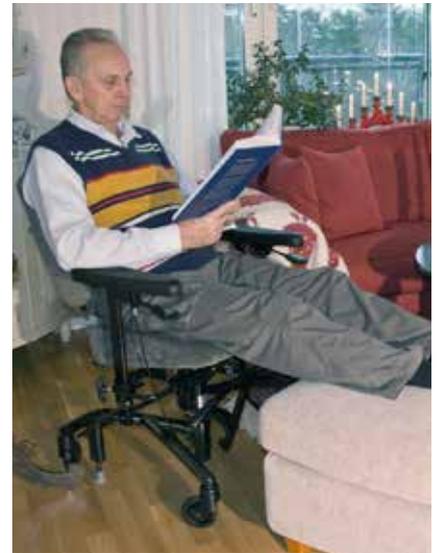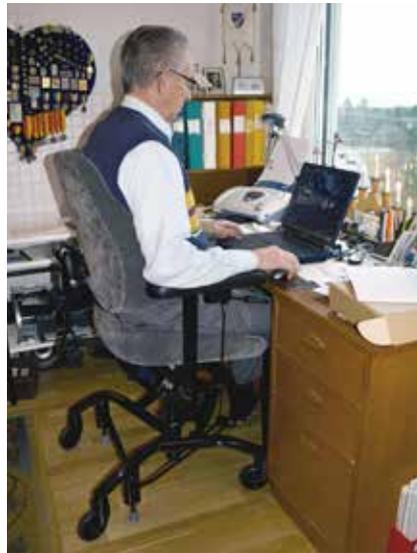

ACTIEVE EN PASSIEVE ZITHOUDING

De zitting van de REAL 9000 PLUS kan worden versteld met gasveer, zwengel of elektrische bediening. Wanneer de zitting wordt gekanteld gaat de rugplaat mee voor extra steun. Kies een vooroverhellende zitting voor een actieve zithouding of een comfortabel achteroverleunende zitting voor een ontspannen zithouding. Door gedurende de dag van zithouding te kunnen veranderen houdt u meer energie over. Bovendien wordt drukbelasting op het lichaam voorkomen en worden blessures aan spieren en het skelet vermeden. De interval is standaard +15 tot -8°. Een extra versterkt verstelbaar zitkruis met de interval +15 tot -23° is verkrijgbaar als optie. Zie de volgende pagina voor meer informatie over het verstelbare zitkruis.



DE ZITHOUDING IS BELANGRIJK BIJ HET ETEN

Hoe we zitten bij het eten is van groot belang voor hoe we het eten binnenkrijgen. Een in elkaar gezakte en voorover geleunde zithouding in een rolstoel maakt het eten en drinken moeilijker. Met een rechte zithouding kan de maaltijd zonder problemen worden genuttigd.

Met de REAL 9000 PLUS kunnen de rugsteun, armsteunen, hoogte en zitting afzonderlijk worden aangepast. Zet tijdens het eten de stoel op de rem voor stabiliteit en veiligheid.



OPTIMAAL ZITCOMFORT

De ergonomie van de stoel is bepalend voor het comfort. Daarom hebben we samen met de gediplomeerde fysiotherapeut Bengt Engström de zitsystemen ERGOMEDIC en ERGOMEDIC PLUS ontwikkeld. U vindt altijd de perfecte oplossing in ons grote aanbod modellen, materialen en maten. Voor alle gevulde onderdelen zijn praktische overtrekken beschikbaar die in de machine gewassen kunnen worden. Zie onze folder Zitstelsel voor meer informatie.

...MET DETAILS DIE HET GEMAKKELIJKER EN EENVOUDIGER MAKEN



HULP BIJ HET OPSTAAN (ELEKTRISCH)

De REAL 9100 PLUS EL is een uitstekende hulp bij het opstaan voor gebruikers met zwakke spieren. Met de elektrische hoogteregeling in combinatie met kanteling van de zitting met gasveer onder de armleuning kan de gebruiker eenvoudig omhoog komen in een staande houding.



SOEPEL PLUS-FRAME MET VEEL RUIMTE VOOR DE VOETEN

Het PLUS-frame is klein (48 x 53 cm), maar biedt toch veel ruimte voor de voeten. Het frame is aan de achterkant verlengd voor verhoogde stabiliteit. Frameverlengers zijn verkrijgbaar als extra optie.



COXIT-ZITTING MET VERSTELBARE DELEN

De REAL 9700 COXIT PLUS (handmatig) en de REAL 9800 COXIT PLUS EL (elektrisch) hebben een Coxit-zitting. De Coxit-zitting bestaat uit afzonderlijk verstelbare delen. Daardoor is het mogelijk om te zitten met de heup in een open hoek.



VERSTELBARE REM

Bij het PLUS-frame hoort standaard een verstelbare bevestiging voor de remhendel. De bevestiging is getrappt verstelbaar, waardoor het mogelijk is een bredere zitting te monteren en de armsteun in de breedte te verstellen, maar waarmee de stoel nog steeds makkelijk op de rem te zetten is.



ELEKTRISCHE REM

Als de gebruiker de rem niet vast kan zetten, is een elektrische rem een geschikte optie. Hiermee wordt de stoel op de rem gezet met een knop op de armsteun. De elektrische rem is beschikbaar als optie voor zowel de handmatige als elektrische REAL 9000 PLUS.



VERSTELBAAR ZITKRUIS

Ons nieuwe mechanisme voor kanteling van de zitting heeft een grotere interval (+15 tot -23°) en drie verschillende instellingen. Het past op al onze zittingen en kantelingen. U kunt zelf kiezen of de armleuningen mee bewegen of niet.

ANDERE REAL-STOELN IN ONS MODULESISTEEM...



REAL 9200 TWIN EL PLUS

Een extra versterkte modulestoel die zeer geschikt is als verplaatsingshulpmiddel voor wat zwaardere gebruikers. De REAL 9200 TWIN EL PLUS is geschikt voor een gewicht van 275 kg.

Zie onze folder over TWIN-stoelen voor meer informatie.



REAL 9000 PLUS KINDEREN

Wordt gebouwd naar behoefte van het kind. De stoel is uitgerust met een klein en soepel PLUS-frame. Het zitsysteem ERGOMEDIC PLUS en een groot aantal functionele accessoires zijn als extra optie beschikbaar.

Zie onze folder over kinderstoelen voor meer informatie.



REAL MOBIL 6100

Elektrisch aangestuurde rolstoel voor gebruik binnenshuis. De stoel is zeer geschikt voor kleine oppervlakten en drempels in huis, op het werk of op school. Elektrische hoogteregeling met een interval van 28 cm.

Zie onze folder over de REAL MOBIL 6100 voor meer informatie.



INDIVIDUELE TOEPASSINGEN

REAL-stoelen en accessoires kunnen door Mercado Medic AB speciaal worden gemaakt. Dit geldt voor zowel zachte onderdelen als gelaste details.

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie.



KEUZEVRIJHEID MET VELE ACCESSOIRES

Een individueel aangepaste stoel maakt het makkelijker een actief leven te leiden. Daarvoor is een breed en goed doordacht aanbod van extra opties en accessoires nodig. Met de vele opties voor de REAL 9000 PLUS-stoel wordt de uitvoering bepaald door de behoeften van de gebruiker. Kies uit een vele verschillende kantelingen en maten voor de zitting en de rugsteun, verschillende wielen, zithoogtes, en een groot aantal verschillende accessoires. Zie onze brochure Keuzevrijheid voor meer informatie over alle opties en accessoires.

REAL[®] 9000 PLUS

systemoverzicht

AB	MODEL	PLUS-frame Volwassenen 48 x 53 cm (b x d)
90	REAL 9000 PLUS-standaardstoel	Met PLUS-frame 48. Handmatige Fix-lift.
91	REAL 9100 PLUS EL-stoel	Met PLUS-frame 48. Elektrische Fix-lift.
97	REAL 9700 PLUS Coxit-stoel	Met PLUS-frame 48. Handmatige Fix-lift.
98	REAL 9800 PLUS Coxit EL-stoel	Met PLUS-frame 48. Elektrische Fix-lift.

C	ZITHOEK	
0	Zonder zittingkanteling	
2	Zittingkanteling met zwengel*	Met zwengel +15°/-8°.
3	Gasveer, hendel bij zitting*	Met gasveer +15°/-8°.
4	Gasveer, hendel op armleuning*	Met gasveer +15°/-8°, hendel op armleuning.
5	Elektrische zittingkanteling (EL)*	Elektrisch aangestuurd +15°/-8°. Voor elektrische stoel.
6	Voorbereid voor zittingkanteling*	Vast.

* **Verstevigd en verstelbaar zitkruis kan worden gemonteerd.**

D	LAGE RUGSTEUN	
0	Standaard rugmechanisme	Instelling van hoogte, hoek en diepte.
1	Medic-rugmechanisme	Uitgebreide diepte-instelling.
2	Comfort-rugmechanisme	Instelling met gasveer.*
3	Elektrisch rugmechanisme (EL)*	Elektrische instelling. Voor elektrische stoel.*

D	HOGE RUGSTEUN	
5	Standaard rugmechanisme	Instelling van hoogte, hoek en diepte.
6	Medic-rugmechanisme**	Uitgebreide diepte-instelling.
7	Comfort-rugmechanisme	Instelling met gasveer.*
8	Elektrisch rugmechanisme (EL)	Elektrische instelling. Voor elektrische stoel.*

Minimale diepte van zitting 43 cm.

****Dubbel hoge Medic kan worden gemonteerd.**

E	WIELEN	
0	Standaardwielen, XL 100 mm	Voor alle soorten ondergrond.
2	Extra licht lopend wiel, SL 100 mm	Voor harde ondergronden.
3	Extra breed licht lopend wiel, BXL 100 mm XL-wielen met brede wielbaan.	

F	ZITHOOGTE EN ROTATIE	Alle intervallen kunnen worden aangepast met +6 cm/-2 cm.
0	Standaardzithoogte	Handmatig 45-65 cm. Elektrisch 47-75 cm.
1	Lage zithoogte	Handmatig 40-54 cm. Elektrisch 40-60 cm.
5	Standaardzithoogte met rotatie	Rotatievrijgeving. Maakt rotatie mogelijk van 360°.
6	Lage zithoogte met rotatie	Rotatievrijgeving. Maakt rotatie mogelijk van 360°.

G	ZITTING	(breedte x diepte) Bijbehorende rugsteunen (b x h):	ArMLEUNING:
0	Volwassenen en Coxit	44 x 48 cm	Laag 38 x 26 cm, hoog 40 x 34 cm. 35 cm.
1	Volwassenen en Coxit	48 x 48 cm	Laag 38 x 26 cm, hoog 40 x 34 cm. 35 cm.
2	Volwassenen en Coxit	44 x 43 cm	Laag 38 x 26 cm, hoog 40 x 34 cm. 35 cm.
3	Volwassenen	40 x 43 cm	Laag 33 x 26 cm, hoog 33 x 36 cm. 35 cm.
4	Volwassenen	40 x 39 cm	Laag 33 x 26 cm, hoog 33 x 36 cm. 30 cm.
9	Volwassenen	40 x 48 cm	Laag 33 x 26 cm, hoog 33 x 36 cm. 35 cm.

H	GEWICHT VAN DE GEBRUIKER	
0	55-90 kg	Wordt opgegeven bij bestelling van
1	<55 kg	Handmatig/EL-lift aanpassing van gasveer voor
2	90-130 kg	Handmatige Fix-lift Fix-lift en zittingkanteling.

Neem contact op met Mercado bij een gebruikersgewicht >130 kg



Mercado Medic Nederland BV
Nobelweg 22
3899 BN Zeewolde
Nederland

Phone & Fax
Tel +31 (0) 36 521 99 95
Fax +31 (0) 36 521 99 90

Email & Internet
Email info@mercado-medica.nl
Internet www.mercado-medica.nl