



Simpelweg mobiel.


e-fix[®]

Elektrische hulpaandrijving



Klein. Licht. Wendbaar.

www.invacare.be

A man with grey hair, wearing a blue button-down shirt and khaki pants, is walking on a paved path. He is smiling and looking towards a woman. The woman has blonde hair, wears glasses, a light-colored patterned shirt, and blue jeans. She is sitting in a black wheelchair with a large rear wheel and a motor. They are outdoors, with a body of water and greenery in the background. A speech bubble is overlaid on the image, containing a quote in Dutch.

“Weer meer dingen samen doen, daar hebben we naar uitgekeken.”


Geniet van meer mobiliteit

Van handbewogen naar elektrisch rijden

Met de e-fix, de elektrische hulpaandrijving voor je handbewogen rolstoel, kun je gemakkelijk zelfstandig langere afstanden afleggen. e-fix zorgt ervoor dat je makkelijk op je plek van bestemming komt: zowel binnenshuis, als buitenshuis en met de auto.

Het is eenvoudig om van jouw handbewogen rolstoel een elektrisch aangedreven rolstoel te maken: je dealer vervangt simpelweg de wielen, installeert de accu en de joystick bediening - en het is klaar. De motoren zitten verwerkt in de wielnaven. Op bijna alle handbewogen rolstoelen kan de e-fix gemonteerd worden. Dit betekent dat je gebruik kunt blijven maken van je huidige rolstoel.

e-fix componenten:

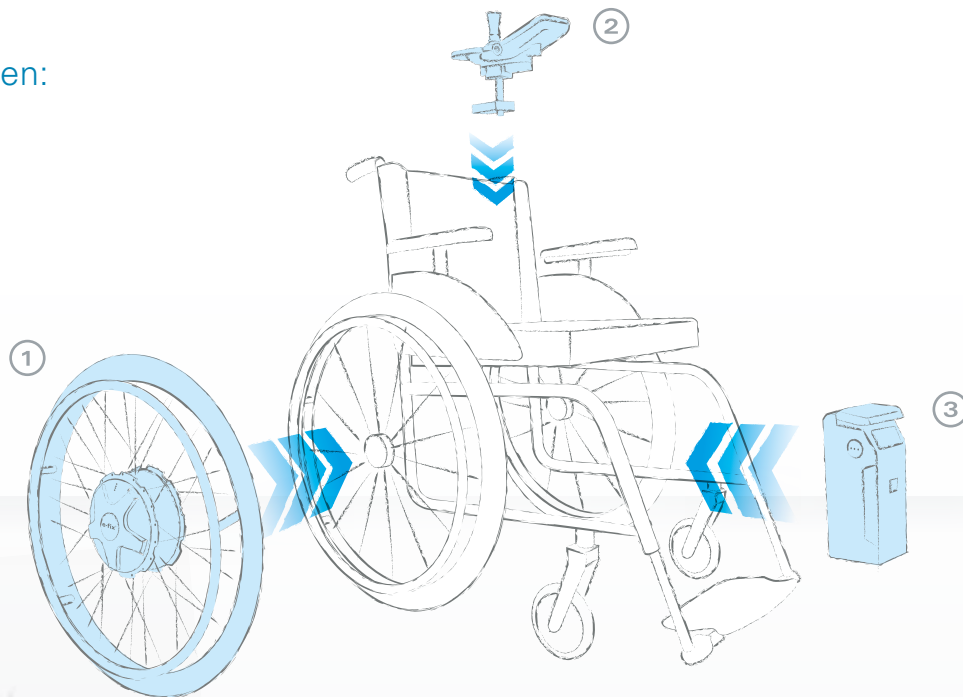

①

KRACHTIG - rijwielen

Gemakkelijk te bevestigen aan de rolstoel door middel van de quick release bevestigingen en net zo gemakkelijk weer eraf te halen om ruimte te besparen tijdens transport.

②

ERGONOMISCH - joystick bediening

Met groot en betrouwbaar accu status display, individueel instelbare rij parameters en makkelijke bedieningen.

③

KLEIN EN LICHT - de accu

Goed onder de zitting geplaatst om ruimte te besparen, met een bereik van max. 16 km*.

* Afhankelijk van de ondergrond, het gewicht van de gebruiker, de temperatuur, rolstoelinstellingen en route. Met optionele grotere capaciteit accu, een bereik van max. 22 km.

“De e-fix maakt mijn dagelijks leven stukken makkelijker”



Meer mobiliteit. Hoe werkt dat?

Gemakkelijk te gebruiken

Het is zeer gemakkelijk om de e-fix te gebruiken op je rolstoel, eigenlijk ben je er meteen aan gewend. De snelheid kan continu gevarieerd worden tussen 0,5 en 6 km/u door een knop die gemakkelijk te bedienen is. Des te lager de snelheid, des te eenvoudiger bedienbaar. Jij stuurt en de e-fix doet het werk!

Daarnaast zorgt de joystick bediening voor duidelijke terugkoppeling. Het kleurendisplay laat alle belangrijke informatie zien, zoals accu status en snelheid, in 1 overzicht. Mocht je het willen, dan kun je de display instellingen personaliseren. Ook zijn er diverse slimme opties in opgenomen, zoals de geïntegreerde verlichting die je route verlicht in het donker.

Meer vrijheid in het dagelijks leven

Twee stille, maar zeer krachtige motoren maken de e-fix ideaal voor gebruik, zowel binnen als buiten. Draaien om je as, rijden in kleine ruimtes of buiten rijden op hellingen*, het is geen probleem voor de e-fix.

* hellingen van max. 20% zijn mogelijk, afhankelijk van het type e-fix en de rolstoel

Licht en eenvoudig

De accu van je e-fix weegt slechts 2 kg, en heeft een breedte van 8 cm, dus ook nog erg compact. Dankzij de slim ontworpen accu houder, is de accu met 1 hand te plaatsen of uit te nemen. De meeste vouwbare rolstoelen zijn zelfs op te vouwen terwijl de accu nog in de houder zit.



Informatief kleuren display met gebruiksvriendelijke bedieningen



Compact, stil en krachtig: de e-fix rijwielen

Persoonlijk, net als je rolstoel



Begeleidersbediening: met één druk op de knop wordt de e-fix een duw-, rem- en draaihulp voor je begeleider

Pas de e-fix aan aan je eigen wensen

De e-fix kan aangepast worden aan jouw wensen - of je nu rustig of juist sportief wilt rijden. Er zijn 3 standaard rijprogramma's: Tour, Sport en Eco. Ook kun je de rijparameters persoonlijk laten instellen. De joystick bediening kan of aan de linkerkant of aan de rechterkant op de rolstoel geplaatst worden.

Er zijn twee soorten rijwielen voor de e-fix. De krachtigere e-fix E36, kan gebruikt worden door mensen met een gewicht tot 160 kg.

De optioneel verkrijgbare begeleidersbediening zorgt ervoor dat de e-fix een perfecte duw-, rem- en draaihulp is voor je begeleider. Doordat er een sensor in de bediening zit is het mogelijk om zonder kracht ook bochten te maken en om vanuit stilstand te gaan rijden zonder extra krachtsinspanning.



Doordachte details

Met een gewicht van slechts 2 kg, is de kleine lithium-ion accu licht en gemakkelijk te hanteren.

Aansluiten gaat gemakkelijk dankzij de magnetische kracht van de EasyConnex stekkers. De stekker van de joystick bediening, begeleidersbediening en accu lader "vinden" de juiste positie voor het contact automatisch.

Uitgebreide range accessoires



1. Vergroting van de snelheidsknop: Speciaal voor gebruikers met beperkte draai hand/vinger functie.



2. Wegzwenkbare arm: joystick bediening wordt parallel weggezwenkt, dit maakt het eenvoudig om dichtbij/onder tafels te rijden.



3. Anti-tippers met wegzwenk- en opklapfunctie: maakt het nog eenvoudiger om de wielen te (de)monteren

4. En nog veel meer, neem contact op met Invacare, of kijk op www.alber.nl



"Fantastisch! De e-fix is eenvoudig te demonteren en in de auto in enkele seconden."

Handig onderweg

Zo klein. Zo goed.



Licht gewicht, geen gereedschap nodig. Om de e-fix van de rolstoel te nemen hoeven alleen de quick release wielen eraf gehaald te worden (en eventueel de accu uit de houder). Geen onderdeel weegt meer dan 7,8 kg en alles kan achter in de auto. En bij aankomst is de e-fix weer snel te monteren.

Je kunt vertrouwen op e-fix.

e-fix is een product van Alber, de specialist in meeneembare, gebruiksvriendelijke hulpaandrijvingen. Onafhankelijke instituten hebben de kwaliteit, duurzaamheid en robuustheid van de e-fix positief getest.

Veiligheidstesten zijn onze hoogste prioriteit. Zoals bijvoorbeeld gedaan door de TÜV, een Duits testinstituut dat producten certificeert volgens de richtlijnen voor medische producten. Alber zorgt ervoor dat haar producten altijd voldoen aan de meest recente richtlijnen voor medische producten.



MADE IN GERMANY

In Duitsland gemaakt door de wereldwijde marktleider van hulpaandrijvingen.

Veelgestelde vragen over de e-fix

“Kan ik de e-fix op mijn rolstoel gebruiken?”

De e-fix kan op de meeste handbewogen rolstoelen gemonteerd worden. Hiervoor worden speciale bevestigingsbrackets aan je rolstoel bevestigd. De gewone wielen kunnen ook nog steeds gebruikt worden.

“Hoe hard kan de e-fix rijden?”

Je kunt continu de snelheid variëren, tussen de 0,5 en 6 km/u. Zodat je het kunt instellen al naargelang je het veilig acht in je situatie. Er zijn 3 standaard rijprogramma's: Tour, Sport en Eco. Daarnaast is het mogelijk om persoonlijke rijeigenschappen te laten instellen door je dealer.

“Hoeveel uitvoeringen zijn er van de e-fix?”

De e-fix E35 is ontwikkeld voor mensen met een maximum gewicht van 120 kg. Er is ook een versie, de E36 die gebruikt kan worden door mensen met een maximum gewicht van 160 kg.

“Is de e-fix ook handig voor mijn begeleider?”

Ja! De optionele begeleidersbediening zorgt ervoor dat de e-fix bediend kan worden als een duw-, rem- en draaihulp.

“Hoe ver kan ik rijden met 1 opgeladen accu?”

Afhankelijk van type ondergrond, gebruikersgewicht, temperatuur, rolstoelinstellingen en route kan er met 1 accu tot 16 km gereden worden. Dit kun je vergroten door te kiezen voor de krachtigere accu die optioneel beschikbaar is, deze gaat tot 22 km. Ook is het natuurlijk mogelijk om een reserve accu te gebruiken om het bereik te vergroten.

“Welke hellingen kan ik nemen met de e-fix?”

De e-fix kan hellingen aan tot 20%, afhankelijk van de rolstoelinstellingen, het gewicht van de rolstoelgebruiker en het type ondergrond.

“Kan de e-fix in de auto meegenomen worden?”

Ja! Door de modulaire opbouw is dit goed mogelijk. Alle e-fix componenten kunnen zonder gereedschap van de rolstoel gehaald worden, zodat deze compact in de auto opgeborgen kan worden. Je rolstoel blijft vouwbaar.

“Hoeveel weegt de e-fix?”

Rijwielen	7,8 kg
Accu	2,0 kg
Joystick bediening	0,6 kg
Bekabeling	0,7 kg
Totaal gewicht	18,9 kg

e-fix voldoet aan de EC Directive 93/42/EC en de aangepaste Directive 2007/47/EC voor medische hulpmiddelen.

Onze claim voor kwaliteit is uw garantie tot veiligheid! De e-fix is gecertificeerd volgens ISO 9001:2000 en ISO 13485:2003 (incl. de meest recente aanpassingen). Met het oog op het milieu zijn onze producten geproduceerd en gecertificeerd volgens het keurmerk ISO 14001:2004.

Gewicht informatie	e-fix E35	e-fix E36
Max. gebruikersgewicht	120 kg	160 kg
Max. totaal gewicht (incl. e-fix, rolstoel en rolstoelgebruiker)	170 kg	210 kg

