



Hulpmotor voor
manuele rolstoelen



Skyline
mobility

by **acekare**

ACC-006-A

Yomper



Ons geheim: de centrale positie

Het geheim van de Yomper is de unieke centrale plaatsing van het vaste wiel. De beste plek voor uw rolstoel om - met of zonder hulpaandrijving - moeiteloos en zonder extra wrijving te kunnen manoeuvreren. Met de Yomper ontdekt u weer nieuwe mogelijkheden.

Upgrade uw rolstoel



Intuïtief en veilig rijden

Met dit extra duwtje in de rug zult u langere afstanden afleggen en komt u op plekken die voorheen onbereikbaar waren.

De onopvallende Yomper is snel en eenvoudig te monteren op vrijwel alle vouw- en vastframe rolstoelen.



Aanpasbare settings

Uw behoefte verandert, de Yomper past zich aan. De indoor en outdoor modus kent ieder 5 snelheden van 0 t/m 10 km/h.



Praktische EasyGo bediening

De EasyGo control unit - te plaatsen op uw rolstoel of been - is uw beste vriend voor een dynamische rijstijl zonder teveel inspanning.



Makkelijk te bevestigen

Middels de voorwielletjes rolt de Yomper eenvoudig en stabiel onder de rolstoel. Met het handvat is de lichtgewicht hulpaandrijving snel te bevestigen.

Yomper hulpmotor

Handvat

Het handvat bevindt zich hoog zodat de Yomper makkelijk onder de rolstoel geplaatst kan worden

Aan/uit knop

Lithium accu
- 2 jaar garantie

Accu-indicator en connector duimbediening begeleider

Hulpmotor met luchtband
Comfortabel en eenvoudig te vervangen

Voorwielletjes

De 2 kleine wielletjes maken de Yomper stabiel zodat deze moeiteloos geplaatst kan worden.

Bluetooth EasyGo control box

OLED scherm

- Accu level
- Weergave van settings

USB oplaadbare accu

 Draadloze Bluetooth verbinding

2 klikken om te starten
1 klik om te stoppen

Snelheidsknop +/-

- 5 instelbare snelheden in indoor modus
- 5 instelbare snelheden in outdoor modus

5 LED lampjes

Toont de geselecteerde snelheid
Weergave van indoor (groen) of outdoor (rood) modus



Hoe de Yomper te gebruiken

De Yomper kan zich dankzij de EasyGo bediening goed aanpassen aan de verschillende situaties.

Zelfs tijdens het rijden kunt u de snelheid en indoor/outdoor modus wijzigen.

Met een simpele "dubbelklik" wordt de Yomper geactiveerd.

Om de modus te wijzigen houdt u de control unit wat langer ingedrukt.

Indoor en outdoor modus

Start	Snelheid wijzigen	Stop
2 klikken om te starten	Met de snelheidsknoppen	1 klik om te stoppen Alleen bij de indoor modus kunt u ook stoppen middels de hoepels

Algemeen

Max. gewicht gebruiker	150 kg
Maximale helling	16%
Garantie	2 jaar
Compatibiliteit	Vastframe rolstoel Vouwframe rolstoel

Yomper hulpmotor

Motor	250 W (max. 450 W)
5 acceleratie levels	Aanpasbaar via EasyGo
5 hoepel weerstanden	Aanpasbaar via EasyGo
5 indoor / 5 outdoor snelheden	Instelbaar van 0 tot 10 km/h (Aanpasbaar via EasyGo)


Accu

Batterijen	24 V / 160 Wh / Lithium-ion
Actieradius	23 km



Waterdicht, onderhoudsvrij, laadtijd 4 uur, 2 jaar garantie, voldoet aan voorschriften luchttransport (cabine)

Gewicht

Yomper hulpmotor	5,8 kg
EasyGo control unit 	87 g
Gewicht zonder 160 Wh batterij	4,65 kg

Opties

YPA0013	Duimbediening begeleider	
YPA0018	Extra krachtige batterij	24 V / 240 Wh / Lithium-ion / + 350 g / actieradius 35 km / laadtijd 6 uur

