



Gebruiksaanwijzing

Posey pols-, en enkelbanden 2750, 2755, 2792, 2793, 2798, 2799, 2800, 2801




Fabrikant:
J.T. Posey Company
5635 Peck Road
91006-0020 Arcadia
California, USA

- **Indicatie:** Patiënten/bewoners die slangen of infuus uittrekken, automutieren of agressie vertonen.
- **Contra-indicatie:** Niet gebruiken bij fracturen of wonden. Let op bij personen met zeer smalle handen; de patiënt/bewoner zou er uit kunnen schuiven.

De pols- en enkelbanden van Posey zijn met een kleur gecodeerd. Blauwe binnenvoering betekent polsband, terwijl de enkelband een rode binnenvoering heeft. De pols- en enkelbanden hebben diverse soorten sluitingen met verschillende veiligheidsaspecten.

Fig. 1

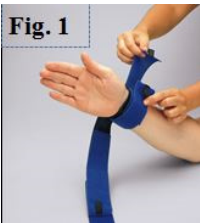

Basissluiting van klittenband (2750 en 2755)

Bevestig de band rond pols of enkel waarbij erop gelet moet worden dat het zachte neopreen als eerste rond de huid wordt aangebracht. Sluit vervolgens de klittenband delen over elkaar (fig. 1). De bevestiging aan de bedrand geschiedt ook door middel van klittenband. Leg de flapjes over elkaar zodat de band stevig vastzit (fig. 2)



Fig. 1



Fig. 2

Extra veiligheid door middel van slot (2792, 2793, 2798, 2799, 2800)

Sluit de band rond pols of enkel zoals bij figuur 1. De 2792 en 2793 hebben een slot aan de bevestigingsband voor het bed (zie fig. 3). Haal de band om een bedstang heen en voer deze door het geopende slot. Bepaal de juiste lengte en klik het slot dicht. De 2798 en 2799 hebben nog een extra slot om de pols of enkel. Hier wordt de extra band rond de pols of enkel aangebracht en vervolgens door het geopende slot geschoven waarna het slot dicht geklikt wordt.



fig. 3

De 2800 wordt rond de taille bevestigd met een slot. De 2801 wordt tussen de enkels bevestigd.

- **i** De banden mogen in de wasserij niet onder persplaten gelegd worden. Dit vernielt de sloten. De sloten dienen regelmatig gesmeerd te worden!!! (met bijv. siliconen-, teflon- of andere spray). Door het wassen spoelt het smeermiddel weg en werkt het slot stroef of weigert!!!

i Monitor de patiënt regelmatig en let op comfort en veiligheid. Doe de beddekken omhoog met beddekbeschermers en zet het bed in de laagste stand. Zorg er voor dat geen lichaamsdelen bekneld kunnen raken bij verstellen van het bed. Volg het fixatieprotocol van uw instelling. Zie verder de veiligheidsinstructies: z.o.z. Zorg ervoor dat er altijd een veiligheidsmes in de buurt is om de banden door te snijden in panieksituaties!



Algemene veiligheids- en wasinstructies



Veiligheidsinstructies

- De toepassing van vrijheidsbeperkende interventies moet zoveel mogelijk worden voorkomen.
- Pas vrijheidsbeperking enkel als laatste redmiddel toe en doe dit weloverwogen en multidisciplinair.
- Kies voor het minst beperkende en meest geschikte hulpmiddel in relatie tot het doel. Bovendien moet de duur en omvang van de toepassing in redelijke verhouding tot de aanleiding staan.
- Het toepassen van vrijheidsbeperking is nooit 100% veilig. Continue monitoring is een vereiste. Het gedrag van patiënten kan per seconde veranderen.
- Volg de richtlijnen en protocollen over vrijheidsbeperkende interventies binnen uw instelling.
- Breng zelf geen wijzigingen aan het product aan.
- Controleer het materiaal altijd op gebreken voordat u het gaat gebruiken. Verwijder afgekeurd materiaal direct.

Wasinstructies

- Was het materiaal bij voorkeur in een waszak en indien van toepassing met gesloten klittenband.
- Stop het materiaal bij voorkeur **NIET** in de droger! Veel materiaal is hier niet of slecht tegen bestand. Onderdelen kunnen smelten. Wanneer de droger toch gebruikt wordt, droog dan alleen op lage temperatuur.
- Materialen die onderdelen bevatten zoals ritsen, zeilringen of metalen sloten, mogen beslist **NIET** onder persplaten gelegd worden.
- In geval van een disposable product verdient het de voorkeur het product direct na gebruik te verwijderen en vernietigen. Om kostentechnische redenen kan de instelling ervoor kiezen het disposable product na reiniging opnieuw te gebruiken. De Wet op de medische hulpmiddelen verbiedt het hergebruik van disposables niet expliciet. **Let wel:** indien de instelling besluit een disposable product te hergebruiken is de fabrikant niet langer productverantwoordelijk! *

*Bron: www.rivm.nl

 Voor de exacte wasinstructies per product kijkt u op de labels van de producten.