

# Maxi Sky® 1000



Ons complete assortiment Maxi Sky-plafondliften is zo ontworpen dat ze in uw zorgomgeving kunnen worden geïntegreerd om een comfortabele en waardige ervaring voor alle betrokkenen mogelijk te maken. Met de plafondliften van Arjo kunnen zorgverleners zorgvragers verplaatsen zonder hen handmatig te moeten tillen. Dit helpt het risico op letsels voor de zorgvrager en de zorgverlener zelf te beperken.

## MOBILITEITSWIJZER VAN ARJO



D

E

© Arjo 2019

**D.** Niet in staat het eigen gewicht op de voeten te dragen.  
Kan zitten met goede ondersteuning.

**E.** Heeft het moeilijk om te blijven zitten en blijft dus soms in bed liggen (volledig of half liggend), kan soms alleen zitten in een speciale ondersteunende stoel.

Neem contact op met Arjo voor meer informatie.

- **Speciaal ontworpen voor obese zorgvragers**  
Zwaardere zorgvragers hebben het recht om comfortabel en waardig te worden behandeld. De Maxi Sky 1000 maakt dit mogelijk voor niet-ambulante obese zorgvragers.
- **Gebruiksgemak voor de zorgverleners**  
De enkele cassette met speciaal ontworpen tiljuk voor obese zorgvragers zorgt ervoor dat de zorgverlener het systeem gemakkelijk kan bedienen en biedt een oplossing voor diverse passieve til- en herpositioneringssituaties.
- **Flexibel af te stemmen op de behoeften van uw zorgomgeving**  
Voor de verschillende lichaamsvormen van obese zorgvragers zijn speciale tilbanden nodig. Arjo heeft een assortiment tilbanden in vier maten ontwikkeld om aan deze diverse behoeften te voldoen. De Maxi Sky 1000 is compatibel met onze standaardaccessoires voor plafondliften en kan worden gebruikt voor alle soorten zorgvragers.

## PRODUCTINFORMATIE

Max. veilige tilbelasting (SWL)	454 kg
Gewicht, compleet	22 kg
Tilsnelheid	6,0 cm/s zonder belasting 3,5 cm/s bij 230 kg 2,7 cm/s bij 454 kg
Instelbare horizontale transfersnelheden	10, 13, 15 en 20 cm/s. Standaardsnelheid 15 cm/s
Elektronische microprocessor	Soft start- en stopfuncties van de motor
Onderhoudsindicator	Visuele led
Plafondlift - beschermingsklasse - schokpreventie	Intern gevoede apparatuur
Lengte van de riem	2300 mm
Optionele weegunit	Externe weegunit verkrijgbaar met een capaciteit tot 454 kg
Geluidsniveau bij omhoog-/omlaagbrengen, met of zonder belasting	Max. 61 dBA

## Batterijen

Batterij	(2 x) 12 V, 7 Ah
Batterijcapaciteit	Tot 80 transfers bij een belasting van 230 kg en tot 25 transfers bij een belasting van 454 kg
Batterij-indicator	Het gele oplaadlampje knippert tijdens het opladen en brandt constant als het opladen is voltooid
Oplaadindicators	Het groene aan/uit-lampje brandt als de lift is ingeschakeld en klaar is voor gebruik; het groene lampje knippert als de batterijen bijna leeg zijn

## Afstandsbediening

Activeringsknoppen die weinig kracht vereisen, polyester membraan	IPX7
ABS brandwerend	V0

## Batterijlader

Oplader met aan/uit-indicator	
100-240 VAC/50-60 Hz/24 VA	
Beveiliging batterijlader	Klasse 2, geïsoleerd
Opladopties beschikbaar (ECS en CSAT)	Overal opladen zodra de handset wordt losgelaten, of Speciale opladopties, met RTC-optie
Opladstation met klemkoppeling overal op het railsysteem te plaatsen	

## Veiligheidsfuncties

Elektrische knoppen voor omhoog- en omlaagbrengen in noodgevallen	Op de motorbehuizing
Noodstopfunctie (trekkoord) bereikbaar vanaf de vloer	Stopt alle elektrische functies
Functie voor handmatige nooddaling	Bereikbaar vanaf de motorbehuizing
Indicatielampjes	Klaar voor gebruik (groen) Opladen (oranje) Onderhoudsmodus (rood)
Noodrem	Driedubbel centrifugaal noodremsysteem
Functie 'Terug naar laadstation' (optioneel)	Uitschakeling met gewichtssensor

## BENODIGDE RUIMTE

- Het blauwe gebied markeert de minimale werkruimte die de zorgverlener nodig heeft om op een ergonomisch verantwoorde manier vanaf één kant met het hulpmiddel te werken.
- Het lichtblauwe gebied markeert de extra werkruimte die de zorgverlener nodig heeft om aan beide zijden te kunnen werken met het hulpmiddel om de zorgvrager goed te kunnen bereiken.

De tilbanden en tiljucken van Arjo zijn een essentieel onderdeel van onze tilsystemen voor zorgvragers. Door de diverse tilbanden en tiljucken is er veel keuze wanneer zorgvragers moeten worden getild en verplaatst.

Neem voor meer informatie over onze accessoires contact op met uw lokale Arjo-vertegenwoordiger of ga naar [www.arjo.com](http://www.arjo.com).

