

PRODUCTINFORMATIE
OTICON CONNECTLINE
STREAMER PRO 1.3A

Oticon | ConnectLine

Streamer is de draadloze verbindingssinterface voor het ConnectLine systeem. Met ConnectLine kunnen mensen met een Oticon hooroplossing actief deelnemen aan dagelijkse situaties die met een hoortoestel alleen moeilijk of zelfs onmogelijk zouden zijn. Het systeem bestaat uit unieke oplossingen voor de tv, de vaste thuistelefoon en uit een microfoon voor de gesprekspartner. Via een Bluetooth verbinding kan Streamer eveneens met andere Bluetooth apparatuur, zoals bijvoorbeeld een mobiele telefoon, worden gebruikt. Streamer maakt uw hooroplossing compleet.

Een volledig geïntegreerd systeem

Met ConnectLine heeft uw cliënt de controle over het systeem. Geavanceerde eigenschappen als AutoPriority en AutoConnect geven automatisch een waarschuwing in het toestel, zodat de telefoon bijvoorbeeld tijdens het televisiekijken wordt gehoord en kan worden beantwoord.

Getest op bruikbaarheid

Streamer is ontwikkeld en grondig getest voor slechthorenden met een hoortoestel¹.

Hoofdtelefoon voor muziek

Geluid van bijvoorbeeld een mp3 speler kan rechtstreeks (via Bluetooth) of via een kabel (meegeleverd) naar de beide toestellen worden gezonden.

Headset voor mobiele telefoons

Streamer kan met vrijwel alle mobiele telefoons² (met Bluetooth) worden gebruikt en verandert de hoortoestellen, dankzij de ingebouwde microfoon, in een kwalitatief hoogwaardige headset.

Luisterspoel

De ingebouwde luisterspoel kan worden gebruikt door mensen met een hooroplossing zonder luisterspoel, of door cliënten die het handiger vinden om de luisterspoel van Streamer te gebruiken.

ConnectLine Phone

Een unieke oplossing voor de vaste thuistelefoon. Hiermee wordt Streamer in feite een draadloze headset.

ConnectLine TV

Een unieke oplossing voor tv-kijken met een hoogwaardige geluidskwaliteit, waarbij het geluid van de tv rechtstreeks naar de hoortoestellen wordt gezonden.

ConnectLine Mic

De kleine en discrete clip-on microfoon wordt op de kleding van de gesprekspartner bevestigd, zodat uw cliënt de spreker met ConnectLine Mic ook in een rumoerige omgeving of op afstand beter kan verstaan.

PC/VoIP - inpluggen en gebruiken

Met de meegeleverde kabel kan Streamer rechtstreeks op een computer worden aangesloten om de hoortoestellen als headset te laten functioneren.

FM input

Streamer heeft een aansluiting die het gebruik van FM-ontvangers ondersteunt. Ga voor meer informatie naar www.oticon.global/amigo.

ConnectLine App voor iPhone®, iPad®, iPod touch® en Android™-apparaten

Met deze app kunt u op een intuïtieve en discrete manier de hoortoestellen en het ConnectLine Systeem bedienen en kunt u de functies van het ConnectLine Systeem aanpassen aan uw voorkeuren.

Gratis verkrijgbaar in de App Store en op Google Play™.



Verwijzingen:

1. "Usability test of Oticon ConnectLine Streamer v3 Prototype" door DialogDesign (<http://www.DialogDesign.dk>) 15 juni 2011, 14 oktober 2011 en 7 december 2011.
2. Ga naar www.oticon.global/support voor een actuele lijst van compatibele telefoons



Manufactured by:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.global



People First

People First is our promise to empower people to communicate freely, interact naturally and participate actively



PRODUCTOVERZICHT

Oticon | ConnectLine

Meegeleverde accessoires

- Neklus (lang en medium)³
- Oplader
- Rubberen beschermhoes
- PC/Audio interface kabels

3. Opmerking: De neklus is onderdeel van het systeem en moet altijd gebruikt worden voor het best mogelijke resultaat bij geluidsverzendings.

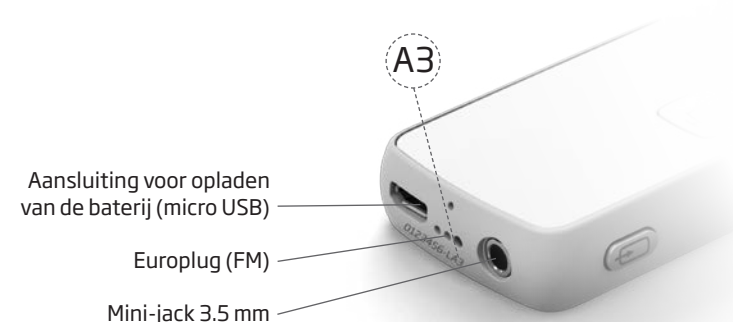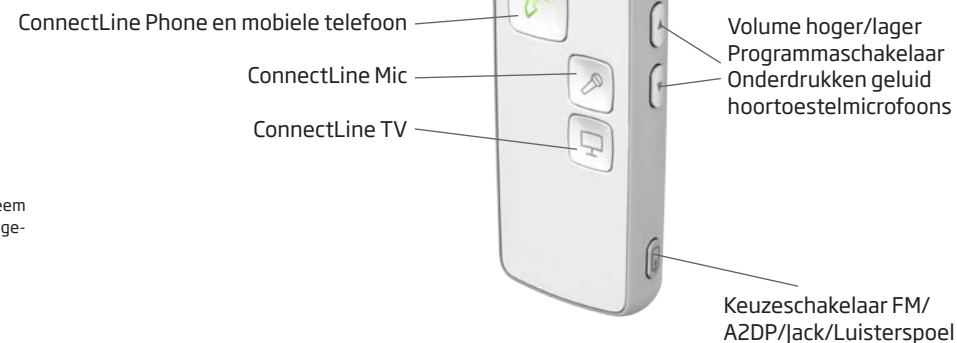

Technische gegevens (firmware 1.3 build 3.3.X)	
Compatibiliteit	Alle draadloze (nearlink geactiveerde) Oticon hoortoestellen (vanaf Epop, 2007) Genie 2013.1 of nieuwer voor configuratie van Streamer
Afmetingen	13 x 40 x 85 mm; gewicht 44 g (zonder neklus)
ConnectLine eigenschappen	AutoConnect (Streamer maakt automatisch verbinding als het apparaat binnen bereik is) AutoPriority (Streamer geeft prioriteit aan telefoongesprekken)
Unieke ConnectLine oplossingen	ConnectLine Mic (aanvullende apparatuur vereist) ConnectLine Phone 1.0 en 2.0 (aanvullende apparatuur vereist) ConnectLine TV 1.0 en 2.0 (aanvullende apparatuur vereist)
Andere connectiviteitsoplossingen	Analoge input (3.5 mm mini-jack) Analoge output (3.5 mm mini-jack), voor PC headset interface (VoIP/Skype). Headset mobiele telefoon (Bluetooth handsfree of headsetprofiel) Geluidsverzendings/draadloze muziek (Bluetooth A2DP) FM input (Europplug) Luisterspoel (ingebouwd)
Afstandsbediening hoortoestellen	Volume, programmaverandering en onderdrukking geluid ⁴ hoortoestelmicrofoons.
Batterij ⁵	Gemiddeld dagelijks gebruik 10 uur: 6 uur TV + 2 uur telefoon/anders + 2 uur standby (van 100% tot 80% capaciteit) 60 uur standby (op aan, geen geluidsverzendings) Opladetijs 2 uur (van 80% tot 100% capaciteit) 6 maanden bij alleen als afstandsbediening (van 100% tot 80% capaciteit) Gebruiksdur batterij 80% capaciteit na 720 opladen/heroplads cycli Dit komt neer op een minimum van twee jaar bij gemiddeld gebruik
Mini-jack inputgevoeligheid	Max 2Vrms (analoog), impedantie: 10 KΩ
Audiokwaliteit ⁶	Mono / 20 kHz sample frq
Audio bandbreedte ⁶	80 Hz - 10 kHz (A2DP/line-in)
Koppelingdetails	Tegelijkertijd tot maximaal 8 gekoppelde apparaten Tegelijkertijd kunnen maximaal vijf actieve draadloze apparaten worden ondersteund (2 telefoons, 1 ConnectlineTV, 1 Connectline Mic en 1 A2DP). Er kan slechts één bron per keer worden beluisterd.
Bluetooth compliantie	Ver. 2.0 + EDR
Bluetooth profielondersteuning	Geavanceerd audiodistributieprofiel (A2DP) 1.2 Headset profiel (HSP) 1.2 Handsfree profiel (HFP) 1.6 inclusief support voor Wide Band Speech
Draadloos bereik ⁷	10 meter met Bluetooth Klasse 2 tot 30 meter met ConnectLine Phone 2.0 en ConnectLine TV 2.0 tot 15 meter met ConnectLine Mic

EarStream bereik	0.5 meter nominaal. Voor het best mogelijke resultaat moet de neklus worden gebruikt.
Signaalbereik	Waarschuwingen inkomende gesprekken en gebruik afstandsbediening tot 1.0 meter.
Zendfrequentie	3.84 MHz
Statusindicaties	LED's op Streamer. Akoestische signalen in hoortoestellen.
Emissies	Max. -15dBμA / 10 meter overeenkomstig alle relevante normeringen
Gebruiksvochtigheid	< 85% relatieve vochtigheid
Gebruikstemperatuur	10-45 °C
Opslagtemperatuur	-20-70 °C
Specifieke instelling van Streamer	Met de Genie aanpassoftware (2013.1 of nieuwer) kan een aantal eigenschappen worden ingesteld. Algemeen Unieke Streamer - alleen TV, alleen Phone of alleen Mic Streamer. Volumeregelaar, programmaschakelaar en Mute van de hoortoestellen als er niet wordt gestreamd. Mobiele telefoons Gesprek weigeren, laatste nummer opnieuw bellen, spraakgestuurd bellen, verschillende beltonen voor mobiele telefoon, met elke knop kunnen opnemen Andere eigenschappen Automatische start van audioapparaat, binnenkomende A2DP waarschuwingen doorgeven (e-mail/sms notificaties ontvangen)
Genie 2013.1 (of nieuwer)	Twee Streamers kunnen met één set hoortoestellen worden gekoppeld. Opmerking: functies en fijnafstelling van ConnectLine programma's verschillen bij de verschillende Oticon toestellen.
Reserveonderdelen/accessoires	Zakclip Rubberen beschermhoezen Neklussen in zwart of wit (lang, medium & kort)
Compatibiliteit van de ConnectLine App	ConnectLine App is compatibel met iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, 9,7-inch iPad Pro, 12,9-inch iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4e generatie), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, en iPod touch (5e en 6e generatie) en vereist Streamer Pro 1.2 App of hoger. Wanneer u de ConnectLine App wilt downloaden op een iPad, zoek dan naar iPhone apps in de App Store. De ConnectLine App voor Android-smartphones en -tablets vereist Streamer Pro met firmware 1.3 of hoger. Ga naar www.oticon.nl/support voor meer informatie over compatibiliteit.

"Made for iPod", "Made for iPhone" en "Made for iPad" betekent dat een elektronisch accessoire speciaal is bedoeld voor gebruik met respectievelijk een iPod, een iPhone of een iPad en dat de ontwikkelaar garandeert dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het beantwoorden ervan aan de veiligheidsnormen en voorschriften. Houd er rekening mee dat door gebruik van dit accessoire in combinatie met een iPod, iPhone of iPad de draadloze prestaties kunnen afnemen.

Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een dienst van Apple Inc. Android, Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google Inc. De Android-robot wordt gereproduceerd of aangepast op basis van materiaal dat door Google is gemaakt en gedeeld, en wordt gebruikt volgens de voorwaarden van de Creative Commons-licentie 3.0 (Naamsvermelding).

Verwijzingen:

4. Oticon Alta of nieuwer
5. Bij gebruik neklus en de meegeleverde oplader
6. Afhankelijk van de hooroplossing
7. Vrij zicht tussen Streamer en ander apparaat