



Ruby XL HD

**Draagbare beeldscherloep
(5" scherm)**

- Lichtgewicht en gebruiksvriendelijk
- Vergroting : 2x tot 14x
- Intern geheugen voor 80 foto's
- Inklapbaar handvat
- Freeze-functie
- Merk : Freedom Scientific / VFO



Ruby XL HD - Lichtgewicht & draagbaar

De Ruby XL HD heeft een geheugen voor een 80-tal beelden. Je kunt ze via USB verbinding overzetten naar je computer om de afbeelding te bewaren en op een ander moment vergroot te bekijken.

Teksten zijn gemakkelijk te lezen wanneer je het toestel in de leesstand plaatst, in een hoek ten opzichte van je blad. De leeslijnen, het beeldmasker en het grote beeld in HD-kwaliteit maken het lezen nog eenvoudiger.

Met zijn kleine omvang en licht gewicht (nauwelijks 300 gram) kun je de Ruby XL HD gemakkelijk overal meenemen. Hij is de perfecte gezelschap om boodschappen te doen, naar de apotheek, de bank of de bibliotheek te gaan of om een restaurant te bezoeken.

De Ruby XL HD is makkelijk in gebruik voor mensen die minder goed overweg kunnen met technologische hulpmiddelen.

Zet hem aan met een druk op de knop, plaats hem op een voorwerp en pas de vergroting aan naar je wens met de gemakkelijke zoomknop.

Met een enkele knop kun je het scherm aanpassen van full color om foto's te bekijken naar elke andere hoogcontrast kleureninstelling. Met de Freeze Frameknop kun je het beeld vastzetten en het dichterbij brengen om comfortabel te lezen.

Wanneer je het handvat uittrekt kun je de Ruby gebruiken als een gewone handloop, terwijl je alles in hoog contrast en zonder vervormingen bekijkt.

Technische kenmerken

Afmeting Gewicht Scherm	13,8 x 8,8 x 2 cm 300 gr. Type : LCD
Vergroting	<ul style="list-style-type: none"> • Formaat : 5" • 2x tot 14x
Batterij	<ul style="list-style-type: none"> • Lithium-polymeer • Gebruikstijd : 3 u
Beeldscherm- functies	<ul style="list-style-type: none"> • Weergave in full color of in contrastkleuren (20 instellingen) • Freeze frame met aanpasbare vergroting

In de doos	<ul style="list-style-type: none"> • Draagtas • Voeding • USB-uitgang voor PC-verbinding • Gebruiksaanwijzing
-------------------	---

Contact

Sensotec HQ
Vlamingveld 8
B-8490 Jabbeke

Sensotec Hoevenen
Antwerpse Steenweg 96
B-2940 Hoevenen

Consulenten
+32 50 39 49 49 | sales@sensotec.be

Service & Support
+32 50 40 47 47 | support@sensotec.be | www.sensotec.be