

Go Talk

De GO TALK communicatietoestellen zijn draagbaar, eenvoudig in gebruik, sterk, betrouwbaar en licht. Ze zijn ideaal te gebruiken als communicatiemiddel, of als leermiddel in schoolse of speelse situaties. Elk model beschikt over een bepaald aantal toetsen waaraan men een symbool en verschillende opgenomen boodschappen toewijst: elke toets bestaat uit meerdere niveaus. Het indrukken van de toetsen vergt weinig kracht. De boodschappen kunnen eenvoudig opgenomen worden via de geïntegreerde micro en het volume is regelbaar. De Go Talk toestellen zijn ideaal voor training of beginnend gebruik van Ondersteunde Communicatie.



De **GO TALK 4+** bestaat uit 4 toetsen van 9 cm x 7 cm met elk 5 niveaus, waardoor hij een totale opname capaciteit heeft van 20 boodschappen. Er zijn 20 seconden opname beschikbaar per boodschap op niveau 1 en 10 sec op niveau 2 tot 5.

Voor veel gebruikte en/of dringende boodschappen zijn er 2 extra toetsen bovenaan. Deze blijven ongewijzigd, ongeacht het niveau.

- Afmetingen van het toestel = 23 cm x 30 cm x 3 cm.
- Gewicht: 680 g



De **GO TALK 9+** bestaat uit 9 toetsen van 5,7 cm x 4,5 cm met elk 5 niveaus, waardoor hij een totale opname capaciteit heeft van 45 boodschappen. Er zijn 20 seconden opname beschikbaar per boodschap op niveau 1 en 10 sec op niveau 2 tot 5.

Voor veel gebruikte en/of dringende boodschappen zijn er 3 extra toetsen bovenaan. Deze blijven ongewijzigd, ongeacht het niveau.

- Afmetingen van het toestel = 23 cm x 30 cm x 3 cm.
- Gewicht: 680 g



De **GO TALK 20+** bestaat uit 20 toetsen van 2.5 cm x 2.5 cm met elk 5 opname niveaus, waardoor hij een totale opname capaciteit heeft van 100 boodschappen.

Voor veel gebruikte en/of dringende boodschappen zijn er 5 extra toetsen beschikbaar. Deze blijven ongewijzigd, ongeacht het niveau.

- Afmetingen van het toestel = 23 cm x 30 cm x 3 cm.
- Gewicht: 660 g
- Totale opnametijd = 15 min

De **GO TALK 32 EXPRESS** is de meest geavanceerde GoTalk tot nu toe. Ruime communicatiemogelijkheden, aangezien er 32 toetsen zijn op 5 verschillende niveaus met telkens 9 seconden opnametijd per toets.



Het is ook mogelijk om toetsen te combineren zodat ze na elkaar (als zin) kunnen worden afgespeeld. Rechtstreekse bediening met 1 of 2 schakelaars in scanning is eveneens mogelijk.

Het scanningritme en aantal vakken tijdens scanning kan aangepast worden. Het is eveneens gemakkelijk meeneembaar, robuust en eenvoudig te programmeren. De visuele en auditieve feedback zorgen voor extra controles.

- Afmetingen van het toestel = 36,2 cm x 25,4 cm x 4,4 cm –
- Gewicht = 1 kg
- Totale opnametijd = 24 min.

De **POCKET GO TALK** is een compact draagbaar communicatietoestel. Hij bestaat uit 6 toetsen van 4 cm x 2 cm met elk 5 niveaus, waardoor hij een totale opname capaciteit heeft van 30 boodschappen.



Er zijn 12 seconden opname mogelijk voor elke boodschap. De Pocket Go Talk kan worden aangesloten op een contact voor bediening via automatische scanning met regelbare snelheid.

- Afmetingen van het toestel = 14.5 cm x 8 cm x 3.5 cm.
- Gewicht: 220 g
- Totale opnametijd = 5 min

De **PERSONAL TALKER** is een heel klein, licht en compact spraakschakelaartje. Het is ong. 5 cm groot en bestaan uit 1 toets om één enkele boodschap van max. 10 seconden op te nemen.



Door het kleine formaat kan je het toestelletje gemakkelijk in je zak meenemen. De Personal Talker kan je makkelijk een foto of symbool links in het kadertje plaatsen.

- Afmetingen = 6.3 cm x 6.3 cm voor de Personal Talker
- Totale opnametijd = 10 seconden

Er bestaat nu ook de **GO TALK SOFTWARE** om communicatiekaarten eenvoudig aan te maken. Hiermee kan je meteen het juiste rooster selecteren en de geschikte symbolen erin plakken. Er zitten standaard een 1000-tal symbolen en foto's in. Daarnaast is er ook de Imagine Symbol Library die meer dan 3000 symbolen bevat, de layout van elke picto kan volledig aangepast worden en eigen foto's en prentmateriaal kunnen vrij toegevoegd worden. Boven of onder het symbool kan ook tekst worden geschreven.



Geen kopieer en plakwerk meer, maar rechtstreeks uitprinten en toevoegen aan je GoTalk 4+, 9+, 20+ of 32!