

Betere
zorg,
betere
ergonomie!

 **metra**
helps helping

Tilliften en tilbanden



- + Actieve tilliften
- + Passieve tilliften
- + Plafondliften
- + Tilbanden
- + Installatie, onderhoud
en herstelling
- + Opleidingen

UNITED
care

Ontdek al onze oplossingen op [metra.be](https://www.metra.be)

+ Metra zorgt samen met u voor betere zorg en ergonomie

Werken in de zorgsector is een roeping, iedereen streeft naar optimale zorg, maximale autonomie en comfort voor de patiënt of bewoner. Maar werken in de zorg is ook fysisch erg belastend en hier zouden zowel werkgevers als de zorgverleners zelf, meer aandacht aan moeten besteden.

Door de vergrijzing is er zowel in woonzorgcentra als ziekenhuizen een sterke evolutie naar een groter aandeel bewoners en patiënten met een grotere zorgafhankelijkheid. Het gebruik van tilliften en tilbanden krijgt in die context steeds meer aandacht en terecht. Tilliften verhogen immers aanzienlijk het comfort en de veiligheid van de zorgontvanger en het gebruik ervan voorkomt (rug)klachten bij de zorgverleners.

In functie van de fysische en psychische mogelijkheden van de patiënt kunnen er verschillende soorten tilliften worden ingeschakeld: actieve, passieve of plafondtilliften. In de mate van het mogelijke wordt een patiënt of bewoner zoveel mogelijk ondersteund bij wat hij of zij zelf nog kan. Zo ervaart een zorgontvanger een groter gevoel van zelfstandigheid en waardigheid.

Voor elke zorg (verplaatsen, baden, toiletbezoek, hygiëne, ...) bestaan er aangepaste tilbanden en technieken die de zorg vergemakkelijken en het comfort verhogen.

In deze catalogus vindt u een overzicht van de oplossingen die wij aanbieden om te komen tot een aanzienlijk betere zorg, met minder fysieke inspanningen! Samen met u screenen wij de zorgnood van uw bewoners of patiënten en inventariseren we de hulpmiddelen die daar kunnen toe bijdragen.

Onze service eindigt niet bij de levering. Wij maken er een punt van dat uw medewerkers de ingezette hulpmiddelen optimaal en in alle veiligheid kunnen gebruiken. Daarom bieden wij enkel oplossingen aan die steunen op de **4 METRA-pijlers**:

- | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Juist en integer advies | Correcte introductie of installatie | Doorgedreven opleiding | Perfekte dienst-na-verkoop |

metra.be



© Metra bv – juli 2023

Alle rechten voorbehouden. In het kader van de voortdurende verbetering van zijn producten behoudt Metra zich het recht voor om de specificaties van de producten aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle afbeeldingen zijn indicatief. Onder voorbehoud van drukfouten. Metra is niet verantwoordelijk voor een verkeerd gebruik van zijn producten. Vorm: depoezelfabriek.com

inhoudstafel

Tilliften en tilbanden

| | |
|--|-----------|
| + Actieve tilliften | 4 |
| RAISA Basic, voor zorginstelling en thuiszorg | 5 |
| JAMY 3, voor intensief professioneel gebruik | 5 |
| ECLIPSE Stand Up, Orthos budgetline | 6 |
| + Passieve tilliften | 6 |
| TILLY Basic, voor zorginstelling en thuiszorg | 8 |
| WENDY 230 kg, voor intensief professioneel gebruik | 9 |
| TRACEY, voor intensief professioneel gebruik | 10 |
| Weegunit Charder | 10 |
| ECLIPSE 135/150/180, Orthos budgetline | 12 |
| ECLIPSE 180 PLUS / 220 | 13 |
| + Plafondliften | 14 |
| SHERPA Monarch, draagbare plafondlift | 14 |
| SHERPA 2 Compact, vaste plafondlift | 15 |
| + Tilbanden | 16 |
| Tilbanden gebruik op actieve tilliften | 17 |
| Lowzone tilband met clips | 17 |
| Tilvest deluxe met clips | 18 |
| Tilvest met lussen | 18 |
| Tilbanden gebruik op passieve tilliften | 19 |
| Standaard tilband met clips | 19 |
| Toilettilband deluxe met clips | 20 |
| Verblijfstilband met clips | 21 |
| Amputatietilband met clips | 23 |
| Anti-spasme tilband met clips | 24 |
| HighBackSling met lussen | 25 |
| BasicSling met lussen | 26 |
| Banana Sling SPU (dispo) tilband | 26 |
| Eclipse ECO tilband met lussen | 27 |
| Eclipse COMFORT tilband met lussen | 27 |
| Eclipse BATH tilband met lussen | 28 |
| Eclipse FULL amputatietilband met lussen | 28 |
| + Installatie, onderhoud & herstelling | 29 |
| + Opleidingen | 30 |



+

Actieve tilliften

Als de patiënt of bewoner nog in zekere mate mobiel is en op eigen benen kan staan, bieden onze actieve tilliften de juiste ondersteuning aangepast aan zijn of haar zorgafhankelijkheid. Ze zijn ideaal voor het uitvoeren van snelle en comfortabele transfers, bij het aan- en uitkleden, bij toiletbezoek, ... Alle transfers kunnen worden uitgevoerd door één zorgverlener dankzij de maximale wendbaarheid, de compacte vormgeving en de gebruiksvriendelijke bediening.



De troeven van United Care

- + Ontworpen met oog op ergonomisch werken voor de zorgverlener
- + Ontwikkeld om patiënt of bewoner maximaal comfort te bieden
- + Meerdere handgrepen voor het comfort en veiligheid van patiënt/bewoner
- + Uiterst wendbaar dankzij korte poten
- + Gebruiksvriendelijke bediening
- + Zacht lopende wielen met schoprem
- + Uitgerust met noodstop
- + Elektrisch openen en sluiten van onderstel
- + Beproefde technologie en bewezen betrouwbaarheid van de Linak motor en controle-unit
- + Zeer sterk en duurzaam o.a. door zelfsmurende kogellagers aan scharnierende onderdelen
- + Voetplank met antislip
- + Flexibele individuele scheensteunen
- + Lage exploitatiekost
- + Tilbanden voor verschillende toepassingen, met verschillende bevestigingssystemen en maten

“Bij elk hulpmiddel, staat de mobiliteit van de zorgvrager centraal. Zo natuurlijk mogelijk kunnen bewegen, is daarbij het uitgangspunt. Daarom bieden we hulpmiddelen aan die zowel ondersteunen bij wat mensen zelf nog kunnen als overnemen wat zelf niet meer mogelijk is.”

RAISA Basic, voor zorginstelling en thuiszorg

Eigenschappen & specificaties

- + Max. draagvermogen: 160 kg
- + Gewicht: 49 kg
- + Digitale controlebox JumboCare: dataopslag, uitlezen data, cycliteller, service indicator, ...
- + Hoogte poten: 11,5 cm
- + Incl. batterij, oplaadbaar in stopcontact
- + Elektrische potenspreider

Opties

- + Beenfixatieband
- + Voetenplankverhoger
- + Aangepaste tilbanden: de tilbanden met iQ-Clips zijn standaard verkrijgbaar uit stock, de S-Clips op bestelling

Voor meer info over de tilbanden zie pagina 17



| referentie | omschrijving | H x L x B verstelbaar / draagvermogen / inbegrepen |
|------------|---|---|
| L-RAISB160 | Actieve sta-op-lift RAISA Basic - clips | 110 x 111 x (68 tot 113) cm / 160 kg / kniesteun, 1 batterij en interne lader |
| L-RBKF | Kuitfixatie, veiligheidsgordel voor RAISA Basic | |
| L-VHRB | Voetenverhoger voor RAISA Basic en BEA deluxe | 10 cm |

JAMY, voor intensief professioneel gebruik

Eigenschappen & specificaties

- + Max. draagvermogen: 200 kg
- + Gewicht: 62 kg
- + Digitale controlebox JumboCare: dataopslag, uitlezen data, cycliteller, service indicator, ...
- + Hoogte poten: 11,5 cm
- + Incl. batterij, reservebatterij en muurlader

Opties

- + Beenfixatieband
- + Voetenplankverhoger
- + Aangepaste tilbanden, zie pagina 17



[Ontdek hier hoe het werkt](#)
of scan de QR-code!


| referentie | omschrijving | H x L x B verstelbaar / draagvermogen / inbegrepen |
|------------|----------------------------------|---|
| L-JMY200 | Actieve sta-op-lift JAMY - clips | 110 x 108 x (67 tot 115) cm / 200 kg / kniesteun, 2 batterijen en muurlader |
| L-JKF | Kuitfixatie, veiligheidsgordel | |
| L-VHJMY05 | Voetenverhoger voor JAMY | 5 cm |
| L-VHJMY10 | Voetenverhoger voor JAMY | 10 cm |

De troeven van ORTHOS

- + Voor tilvesten met lussen zie pagina 18
- + Demonteerbaar in 2 delen
- + Ontworpen voor patiënt of bewoner die nog kracht heeft in de onderste ledematen
- + Ontwikkeld om patiënt of bewoner te verplaatsen vanaf elk type stoel of rolstoel
- + Laat de patiënt of bewoner rechtstaan en verplaatsen
- + Vergemakkelijkt verschonen van luiers, intieme hygiëne en naar de badkamer verplaatsen
- + Grote stabiliteit en makkelijk in gebruik
- + Compact, maakt gebruik in krappe ruimtes mogelijk, zowel in een ziekenhuisomgeving, geriatrische instelling of als in huis
- + Uitgerust met noodknop
- + Mechanisch (met voethendel) openen en sluiten van onderstel
- + Individuele en instelbare kniesteunen
- + Lage aankoopkosten



ORTHOS
XXI
e u r o p e a n
i n c l u s i v e s o l u t i o n s

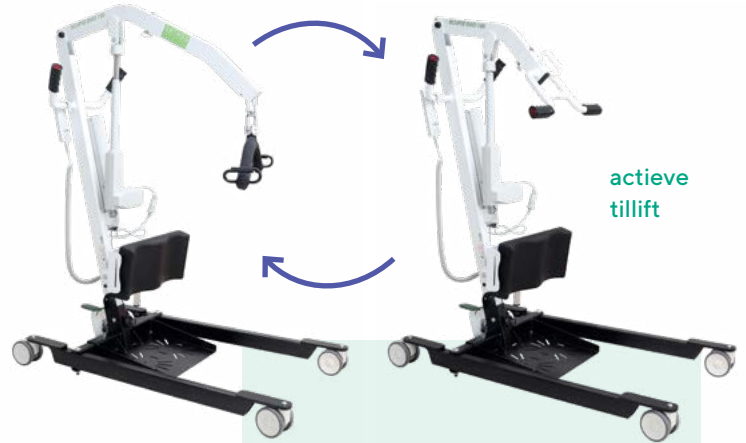

passieve
tillift

actieve
tillift

Ook beschikbaar
ECLIPSE DUO 150
Een actieve tillift makkelijk
om te bouwen naar een
passieve tillift.



ECLIPSE Stand Up, Orthos budgetline

Eigenschappen & specificaties

- + Max. draagvermogen: 150 kg
- + Gewicht: 49 kg
- + Dubbele Ø100 mm wielen (2 met rem)
- + Snelheid 13mm/s

- + Hoogte poten 11,3 cm
- + Incl. 2x24V batterij, oplaadbaar in stopcontact
- + Incl. Tilvest Stand Up Standard
- + 1 batterij en interne lader

| referentie | omschrijving | L x B verstelbaar / draagvermogen / inbegrepen |
|------------|---|---|
| L-ECSU150 | Actieve sta-op-lift ECLIPSE Stand Up - lussen | 95 x (55 tot 98,5) cm / 150 kg / kniesteun, 1 batterij en interne lader / Tilvest Stand Up Standard |
| L-ECD150 | Actieve sta-op-lift / Passieve tillift ECLIPSE DUO 150, 2 in 1. | 95 x (55 tot 98,5) cm / 150 kg / kniesteun, 1 batterij en interne lader |

+ Passieve tilliften

Als een patiënt of bewoner zich weinig of niet meer kan behelpen, dan bieden onze passieve tilliften de juiste oplossing. Ideaal bij alle verplaatsingen: van bed naar zetel, rolstoel, douchestoel, bad of toilet ... en terug naar bed. Deze liften kunnen zowel in zit- als ligpositie tillen. Zelfs tillen vanop de grond is mogelijk zonder dat de patiënt/bewoner de tillift raakt!



De troeven van United Care

- + Ontworpen met oog op ergonomisch werken voor de zorgverlener
- + Ontwikkeld om patiënt of bewoner maximaal comfort te bieden
- + Lange hefarm (groot bereik) met hoog tilvermogen
- + Grote reikwijdte (tot overkant bed) en veel beenruimte voor patiënt/bewoner
- + Tillen vanop de grond mogelijk, zonder dat patiënt/bewoner de tillift raakt
- + Gebruiksvriendelijke (hand)bediening
- + Zacht lopende wielen met schoprem
- + Uitgerust met noodstop
- + Elektrisch openen en sluiten van onderstel
- + Lage exploitatiekost
- + De uiteinden van het standaard elektrische en manueel 4puntskanteljuk zijn flexibel, je kan dus elke maat tilband eenvoudig bevestigen aan het juk.
- + Uiterst wendbaar dankzij korte poten
- + Beproefde technologie en bewezen betrouwbaarheid van de Linak motor en controle-unit
- + Zeer sterk en duurzaam o.a. door zelf smerende kogellagers aan scharnierende onderdelen
- + Tilbanden voor verschillende toepassingen, met verschillende bevestigingsystemen en maten



TILLY Basic, voor zorginstelling en thuiszorg

Eigenschappen & specificaties

- + Booglift
- + Max. draagvermogen: 160 kg
- + Gewicht: 43 kg
- + Digitale controlebox JumboCare: dataopslag, uitlezen data, cycliteller, service indicator, ...
- + Bereik: vanaf de grond tot een maximale tilhoogte van 195 cm.
- + Standaard manueel 4-punskanteljuk met flexibele ophanging
- + Hoogte poten: 11,5 cm
- + Inclusief batterij, oplaadbaar in het stopcontact
- + Elektrische potenspreider

Opties

- + Elektrisch 4-punskanteljuk (clip)
- + Aangepaste tilbanden, zie pagina 19



| referentie | omschrijving | H x L x B verstelbaar / draagvermogen / inbegrepen |
|------------|---|--|
| L-TB2P160 | Passieve tillift TILLY Basic met 2-puntsjuk - lussen | 137 x 121 x (68 tot 120) cm / 160 kg / 1 batterij en interne lader |
| L-TB4B160 | Passieve tillift TILLY Basic met 4-puntsbalansjuk - clips | 137 x 121 x (68 tot 120) cm / 160 kg / 1 batterij en interne lader |
| L-TB4E160 | Passieve tillift TILLY Basic met elektrisch 4-punskanteljuk - clips | 137 x 121 x (68 tot 120) cm / 160 kg / 1 batterij en interne lader |
| L-2PL | 2-puntsjuk - lussen | |
| L-RB4BC | 4-puntsbalansjuk - clips | |
| L-RV4EC | Elektrisch 4-punskanteljuk - clips | |

“De hulpmiddelen ondersteunen niet alleen de zorgvragers, maar verlichten of voorkomen ook het verrichten van zware fysieke handelingen, zoals het tillen en verplaatsen van de zorgvrager, door deze (deels) van de zorgverlener over te nemen.”



WENDY 230 kg, voor intensief professioneel gebruik

Eigenschappen & specificaties

- + Booglift
- + Mechanische en elektrische nooddaling
- + Digitale controlebox JumboCare: dataopslag, uitlezen data, cycliteller, service indicator, ...
- + Max. draagvermogen: 230 kg
- + Gewicht: 55 kg
- + Bereik: vanaf de grond tot een maximale tilhoogte van 203 cm
- + Standaard elektrisch 4-punskanteljuk met flexibele ophanging
- + Tilband eenvoudig vast te maken dankzij flexibele uiteinden van het juk
- + Hoogte poten: 11,5 cm
- + Incl. batterij, reservebatterij en muurlader



Opties

- + Manueel 4-puntsbalansjuk of 2-puntsjuk
- + Aangepaste tilbanden, zie pagina 19
- + Weegmodule, klasse III
- + Verhoogde versie WENDY 230 kg, verhoogd (tot 210 cm)



[Ontdek hier hoe het werkt](#)
of scan de QR-code!

| referentie | omschrijving | H x L x B verstelbaar / draagvermogen / inbegrepen |
|------------|---|--|
| L-W2P230 | Passieve tillift WENDY 230 kg met 2-puntsjuk - lussen | 130 x 124,5 x (67 tot 140) cm / 230 kg / 2 batterijen en muurlader |
| L-W4B230 | Passieve tillift WENDY 230 kg met 4-puntsbalansjuk - clips | 130 x 124,5 x (67 tot 140) cm / 230 kg / 2 batterijen en muurlader |
| L-W4E230 | Passieve tillift WENDY 230 kg met elektrisch 4-punskanteljuk - clips | 130 x 124,5 x (67 tot 140) cm / 230 kg / 2 batterijen en muurlader |
| L-WV2P230 | Passieve tillift WENDY 230 kg verhoogd met 2-puntsjuk - lussen | 150 x 132 x (75 tot 152) cm / 230 kg / 2 batterijen en muurlader |
| L-WV4B230 | Passieve tillift WENDY 230 kg verhoogd met 4-puntsbalansjuk - clips | 150 x 132 x (75 tot 152) cm / 230 kg / 2 batterijen en muurlader |
| L-WV4E230 | Passieve tillift WENDY 230 kg verhoogd met elektrisch 4-punskanteljuk - clips | 150 x 132 x (75 tot 152) cm / 230 kg / 2 batterijen en muurlader |
| L-WMW | Weegmodule, klasse III set WENDY | Ook voor WENDY 230 kg Verhoogd |
| L-2PL | 2-puntsjuk - lussen | |
| L-W4BC | 4-punstabalansjuk - clips | |
| L-W4EC | Elektrisch 4-punskanteljuk - clips | |

TRACEY, voor intensief professioneel gebruik

Eigenschappen & specificaties

- + Combinatie booglift en een vast, groot juk
- + Max. draagvermogen: 200 kg
- + Gewicht: 58 kg
- + Digitale controlebox JumboCare: dataopslag, uitlezen data, cycliteller, service indicator, ...
- + Bereik: vanaf de grond tot een maximale tilhoogte van 210 cm.
- + Standaard elektrisch 4-puntskanteljuk
- + Tilband eenvoudig vast te maken dankzij flexibele uiteinden van het juk
- + Hoogte poten: vooraan 11,5 cm, achteraan 12,5 cm
- + Inclusief batterij, reservebatterij en muurlader
- + Elektrische potenspreider



| referentie | omschrijving | H x L x B verstelbaar / draagvermogen / inbegrepen |
|------------|--|---|
| L-T2P200 | Passieve tillift TRACEY 200 kg met 2-puntsjuk - lussen | 170,5 x 140 x (68 tot 134,5 cm / 200 kg / 2 batterijen en muurlader |
| L-T4B200 | Passieve tillift TRACEY 200 kg met 4-puntsbalansjuk - clips | 170,5 x 140 x (68 tot 134,5 cm / 200 kg / 2 batterijen en muurlader |
| L-T4E200 | Passieve tillift TRACEY 200 kg met elektrisch 4-puntskanteljuk - clips | 170,5 x 140 x (68 tot 134,5 cm / 200 kg / 2 batterijen en muurlader |
| L-2PL | L-2PL 2-puntsjuk - lussen | |
| L-W4BC | 4-punstabalansjuk - clips | |
| L-W4EC | Elektrisch 4-puntskanteljuk - clips | |

Weegunit Charder

Charder MHS2500 wordt gebruikt in combinatie met vaste of mobiele tilliftsystemen voor het wegen van zorgvragers. Charder MHS2500 is verkrijgbaar voor gebruikers met een gewicht tot en met 300 kg. Voeding door 6 x AAA-batterijen van 1,5V. De weegmodule wordt geplaatst tussen het juk en hefarm/lint. Charder MHS2500 kan gebruikt worden in combinatie met de WENDY en de SHERPA.



| referentie | omschrijving | capaciteit / H x L x B |
|------------|--|----------------------------|
| L-WMW | Charder MSH 2500 weegmodule, klasse III Set voor gebruik op WENDY | 300 kg / 120 x 160 x 50 cm |
| L-WMS | Charder MSH 2500 weegmodule, klasse III Set voor gebruik op SHERPA | 300 kg / 120 x 160 x 50 cm |



+
**IN DE
KIJKER**
+

De Tracey combineert de voordelen van de boogvormige arm van de Wendy met een vast groot juk. Dit maakt de transfer zeer stabiel en ruimtelijk voor de zorgvrager. Met de Tracey tilt de zorgmedewerker de zorgvrager eenvoudig van de grond zonder dat deze in aanraking komt met het onderstel.

Met het elektrische vierpuntsjuk is de zorgvrager zowel liggend als zittend te verplaatsen. De flexibele uiteinden van het juk maken het bevestigen van de tilband gemakkelijk. De Tracey is een compacte en wendbare tillift met een elektrisch verstelbaar onderstel. De lift is geschikt voor transfers van mensen met een gewicht tot 200 kg.

Het grote tilbereik maakt de Tracey zeer geschikt voor langere en zwaardere zorgvragers.

ORTHOS
e u r o p e a n
i n c l u s i v e s o l u t i o n s

De troeven van ORTHOS

- + Voor tilvesten met lussen zie pagina 27
- + Demonteerbaar in 2 delen
- + Grote reikwijdte
- + Tillen vanop de grond mogelijk
- + Gebruiksvriendelijke (hand)bediening
- + Zacht lopende wielen met schoprem
- + Uitgerust met noodstop
- + Mechanisch (met voethendel) openen en sluiten van onderstel (optie elektrisch)
- + Standaard tweepuntsjuk - lussen
- + Uiterst wendbaar dankzij korte poten
- + Lage aankoopkosten



+
TIP
+

ECLIPSE 135
Licht, opvouwbaar en
eenvoudig te transporteren.
Geen gereedschap nodig.

ECLIPSE 135/150/180, Orthos budgetline

Eclipse: Vouwbare en compacte passieve tillift, uitermate geschikt voor thuisgebruik

Eigenschappen & specificaties

- + Booglift
- + Compact klaar voor gebruik in minder dan een minuut
- + Gemakkelijk te manoeuvreren, met Ø100mm wielen (2 met remmen)
- + Max. draagvermogen: 135 / 150 / 180 kg
- + Gewicht: 49 / 49 / 51 kg
- + Bereik: vanaf de grond tot een maximale tilhoogte van 165,8 cm
- + Incl. batterij, oplaadbaar in stopcontact
- + Standaard voorzien van een 2-puntsjuk - lussen en mechanisch (met voethendel) openen en sluiten van onderstel
- + Hoogte poten: 11,3 cm

Opties

- + Elektrische openen en sluiten van onderstel
- + Weegschaal
- + 4 puntsjuk
- + Aangepaste tilbanden met lussen, zie pagina 27



| referentie | omschrijving | H x L x B verstelbaar / draagvermogen / inbegrepen |
|------------|--|---|
| L-ECX135 | Passieve tillift ECLIPSE 135 met 2-puntsjuk - lussen | 130 x 100x (56 tot 95,5 cm / 135 kg / 1 batterij en interne lader, vouwbaar |
| L-EC150 | Passieve tillift ECLIPSE 150 met 2-puntsjuk - lussen | 130 x 110 x (61,5 tot 106) cm / 150 kg / 1 batterij en interne lader, niet vouwbaar |
| L-EC180 | Passieve tillift ECLIPSE 180 met 2-puntsjuk - lussen | 130 x 130 x (68 tot 123) cm / 180 kg / 1 batterij en interne lader, niet vouwbaar |

ECLIPSE 180 PLUS / 220

Eigenschappen & specificaties

- + Booglift
- + Compact, klaar voor gebruik in minder dan een minuut
- + Gemakkelijk te manoeuvreren, met Ø100mm wielen (2 met remmen)
- + Max. draagvermogen: 180 kg / 220 kg
- + Gewicht: 51 / 52 kg
- + Bereik: vanaf de grond tot een maximale tilhoogte van 181 cm
- + Incl. batterij, oplaadbaar in stopcontact
- + Standaard voorzien van een 2-puntsjuk – lussen en mechanisch (met voethendel) openen en sluiten van onderstel
- + Hoogte poten: 11,3 cm

Opties

- + Elektrische openen en sluiten van onderstel
- + Weegschaal
- + 4 puntsjuk
- + Aangepaste tilbanden met lussen, zie pagina 27



| referentie | omschrijving | H x L x B verstelbaar / draagvermogen / inbegrepen |
|------------|-----------------------------------|--|
| L-EC180P | Passieve tillift ECLIPSE 180 PLUS | 130 x (51 tot 115) cm / 180 kg |
| L-EC220 | Passieve tillift ECLIPSE 200 | 130 x (58 tot 122) cm / 220 kg |

+

Plafondliften

Meer en meer opteert men ervoor om bij nieuwbouw of renovatie geïntegreerde plafondliften te voorzien. Door de flexibele railopbouw kan men een volledige kamer of meerdere kamers en ruimtes aaneensluitend bedienen. Deze oplossing neemt zeer weinig plaats in en de rail kan indien gewenst mooi geïntegreerd worden in een vals plafond.

Door het hoge gebruiksgemak kan de zorgverlener alle aandacht geven aan de zorgontvanger. De zacht start-en-stop geeft de patiënt of bewoner een comfortabel gevoel. De toestellen zijn heel energiezuinig, onderhouds- en gebruiksvriendelijk en zijn uitgerust met meerdere veiligheidssystemen.



De voordelen van plafondliften

- + Mooie integratie in de zorginfrastructuur
- + Plafondlift is onmiddellijk inzetbaar tijdens de zorg
- + Uiterst veilig en conform alle wettelijke normen
- + Zeer onderhoudsvriendelijk
- + Plaatsing en onderhoud door technische dienst Metra

SHERPA Monarch, draagbare plafondlift

De Sherpa Monarch is een gebruiksvriendelijke plafondlift voor zorgvragers in de passieve mobiliteitsklasse. Zij kunnen niet zelfstandig transfers maken van bijvoorbeeld bed naar rolstoel. Dankzij de zeer lichte portable cassette van slechts 5 kilo kan de zorgmedewerker deze heel eenvoudig uit het railsysteem halen en ergens anders in een railsysteem plaatsen.

Specificaties

- + Weegt 5 kg
- + Extra veilig 2-puntsjuk
- + Max. draagvermogen 200 kg
- + Hefsnelheid 4,5 cm/s



| referentie | omschrijving | Draagvermogen juk - functies |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------|
| L-SMPL Sherpa Monarch | Plafondlift | 200 / 2-punts / 2F |

SHERPA 2 compact, vaste plafondlift



Eigenschappen

- + Heel energiezuinig en lange levensduur van batterij door aan-uit indicator met auto-power-off functie en auto-oplaad-functie bij elke daalbeweging.
- + Onderhouds- en gebruiksvriendelijk door batterij-indicator met auditief en visueel signaal, onderhoudsindicator en foutmelding display
- + Veilig door noodstopfunctie, nooddaling, dubbel centrifugaal remsysteem, ingebouwde overlast-beveiliging en brandvertragende ABS omkasting
- + Compact design en onzichtbare bevestiging van de rail aan het plafond

Specificaties

- + Zowel manueel verrijdbare als elektrisch aangedreven cassette beschikbaar
- + Verschillende railsystemen beschikbaar in functie van wat gebruik vereist: monorail, traverse systemen, draaiplateau, wissels, ...
- + Laadstation overal te bevestigen op de rail
- + Vlakke elektrische contacten bovenop de cassette
- + Max. draagvermogen 200 kg
- + Hefsnelheid 4,2 cm/s, instelbare horizontale loopsnelheid

- + Eenvoudig te installeren en te onderhouden
- + Tilbanden voor verschillende toepassingen, met verschillende bevestigingsystemen en maten (XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, ...)
- + Heel comfortabel door programmeerbare zachte start-en-stop
- + Grote autonomie tot ca. 150 cycli (belasting 75 kg)
- + Geluidsarm
- + Gebruiksrenteller, interactief loggingsfile, zelfdiagnose bij storing, ...
- + Lage exploitatiekost

Opties

- + 4F (4 functies): omhoog/omlaag, kantelen van zit naar lig (elektrisch juk)
- + 2F (2 functies): omhoog/omlaag
- + Weegmodule, klasse III
- + Doorlopende lading via rail
- + Infrarood handbediening
- + Wissels, carroussels, gates, XY systeem

| referentie | omschrijving | Draagvermogen - juk - functies |
|------------|-----------------------------------|---|
| L-S4F2PL | Plafondlift Sherpa 2 compact 4F | 200 / 2-punts / 4F |
| L-S4F4SL | Plafondlift Sherpa 2 compact 4F | 200 / 4-puntsspinjuk / 4F |
| L-S4F4EC | Plafondlift Sherpa 2 compact 4F | 200 / 4-punts elektrisch kanteljuk / 4F |
| L-S4F4BC | Plafondlift Sherpa 2 compact 4F | 200 / 4-punts balansjuk / 4F |
| L-S6F2PL | Plafondlift Sherpa 2 compact 6F | 200 / 2-punts / 6F |
| L-S6F4SL | Plafondlift Sherpa 2 compact 6F | 200 / 4-puntsspinjuk / 6F |
| L-S6F4EC | Plafondlift Sherpa 2 compact 6F | 200 / 4-punts elektrisch kanteljuk / 6F |
| L-S6F4BC | Plafondlift Sherpa 2 compact 6F | 200 / 4-punts balansjuk / 6F |
| L-2PL | 2-punts | tot 230 kg |
| L-S4PSL | 4-puntsspinjuk | tot 230 kg |
| L-S4PEC | 4-punts elektrisch kanteljuk | tot 230 kg |
| L-4PBC | 4-punts balansjuk | tot 230 kg |
| L-WMS | Weegmodule, klasse III set Sherpa | zie pagina 10 |


+ Tilbanden

Naast het correct gebruik van de tillift, draagt ook de juiste keuze van tilbanden in belangrijke mate bij tot het gevoel van comfort en veiligheid dat de patiënt/ bewoner ervaart tijdens de verplaatsing!

Metra heeft een ruim assortiment tilbanden voor elk type zorg, voor actieve en passieve tilliften, voor plafondliften en zijn bovendien compatibel met praktisch alle merken. Onze tilbanden worden gekenmerkt door een hoge kwaliteit, ergonomie voor zorgverlener en -ontvanger, eenvoud in gebruik, grote veiligheid en hygiëne.




Veiligheidsclip of lussen? Hoewel wij alle tilbanden kunnen leveren met lussen, zijn wij een groot pleitbezorger voor tilbanden met veiligheidsclips. Patiënten en bewoners zijn kwetsbare mensen die recht hebben op de grootst mogelijk veiligheid bij het verzorgen. En de zorgverlener moet met een gerust hart aan de slag kunnen. Een veiligheidsclip geeft immers extra zekerheid dat er niets mis kan lopen bij een transfer: vastgeklikt = veilig! De iQ-clips die wij aanbieden, zijn uitgebreid getest, zowel in labo als in reële omstandigheden, en worden geloofd voor de combinatie van gebruiksgemak en veiligheid. Ze zijn bovendien compatibel (met certificaat) met de meeste courante merken van actieve, passieve liften en plafondliften. Niets belet dus om ook met voor de huidige liften over te schakelen naar de zeer comfortabele tilbanden van UniQare en te kiezen voor zekerheid.

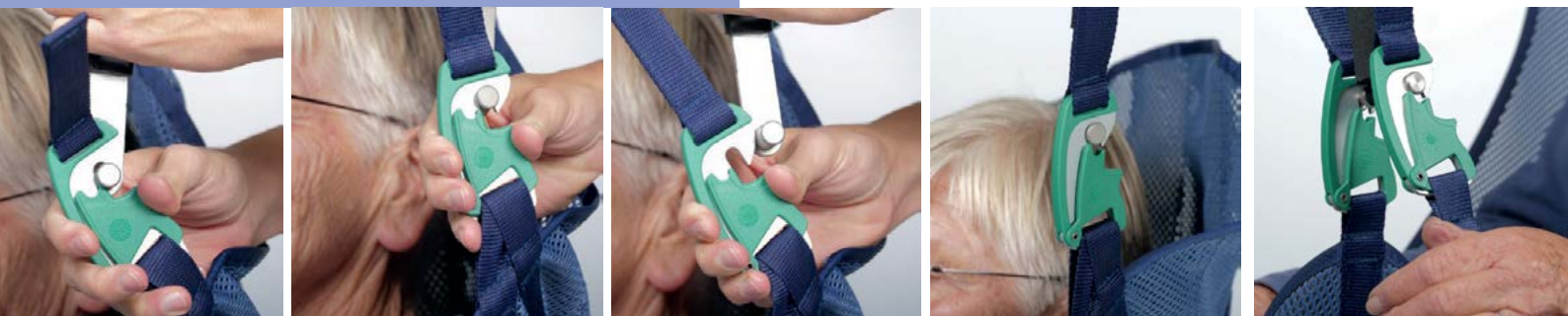

Maatvoering tabel

| Maatvoering tabel | | | Passief | Actief |
|-------------------|-----------|------------|--------------------|-----------------------------|
| maat nummer | maat code | kleur code | kruin-stuit hoogte | buikomvang (t.b.v. tilvest) |
| 0 | xxxs | teal | 40-54 cm | |
| 1 | xxs | paars | 45-60 cm | |
| 2 | xs | bruin | 60-80 cm | |
| 3 | s | rood | 80-87 cm | 58-80 cm |
| 4 | m | geel | 85-90 cm | 74-96 cm |
| 5 | l | groen | 90-97 cm | 94-125 cm |
| 6 | xl | blauw | 95-102 cm | 114-136 cm |
| 7 | xxl | oranje | 102-106 cm | 128-158 cm |
| | lowzone | wit | | |
| | special | zwart | | |

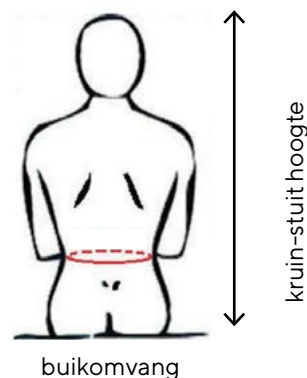

“Er is een flexibel assortiment tilbanden nodig voor het tillen, positioneren, mobiliseren of activeren van gebruikers met een beperkte mobiliteit. Verschillende zorgsituaties, zoals toiletbezoek en transfers van zitten naar staan, vereisen bovendien speciale oplossingen.”

+ Tilbanden gebruik op actieve tilliften

Lowzone tilband met clips

De Lowzone tilband is bedoeld voor gebruik door zorgvragers in actieve mobiliteitsklasse: mensen die met behulp van een sta-oplift kunnen gaan staan. Ze moeten dus kunnen staan.

De Lowzone tilband is gemaakt van polyurethaanschuim. Dit zorgt voor optimale drukverdeling bij het opstaan. Bijkomend voordeel van polyurethaanschuim is de vochtregulerende werking. De hoes is gemaakt van zachte fleec. Deze stof voelt comfortabel aan en is wasbaar.



De gebruiker plaatst de Lowzone tilband laag in de onderrug zodat de band comfortabele ondersteuning biedt bij het opstaan.

De Lowzone tilband is gemakkelijk aan te brengen door de zorgverlener.

Lowzone tilband: vochtregulerende tilband met optimale drukverdeling

- + schuimrubber voor optimale drukverdeling
- + comfortabel zachte hoes in fleec
- + verkrijgbaar in twee lengtes
- + keuze tussen reguliere iQ- Clips of S-Clips zonder meerprijs (met S-Clips = geen voorraadproduct)



| referentie | omschrijving | eigenschappen | |
|------------|---------------------|--|---|
| TQLZ | Lowzone band | Band 106 cm, polyurethaan schuim met fleec hoes met iQ-Clips |  |
| TCLZ | Lowzone band 106 cm | Band 106 cm, polyurethaan schuim met fleec hoes met S-Clips |  |
| TQLZXL | Lowzone band 126 cm | Band 126 cm, polyurethaan schuim met fleec hoes met iQ-Clips |  |
| TCLZXL | Lowzone band 126 cm | Band 126 cm, polyurethaan schuim met fleec hoes met S-Clips |  |

Tilvest deluxe met clips

Tilvest deluxe is bruikbaar voor zorgvragers in actieve mobiliteitsklasse: mensen die met behulp van een sta-op-lift op eigen kracht kunnen gaan staan. Kunnen staan is dus een vereiste! Dit tilvest is in het bijzonder ontwikkeld om zorgvragers die een arm- of been missen, stabiliteit te bieden bij het opstaan.

Het tilvest is een brede rugband. Deze wordt geplaatst tegen de onderrug van de zorgvrager. Tilvest deluxe biedt extra veel ondersteuning in de rug. Het tilvest, ook wel corsetband genoemd, wordt gefixeerd rond de cliënt. Dit zorgt voor extra stabiliteit.

Tilvest deluxe is aan de voorkant voorzien van een buikband met een strook klitband plus een fixatiegordel met klikgesp. Zo kan de zorgverlener het tilvest eenvoudig aanbrengen. Dit tilvest biedt extra veel ondersteuning in de rug bij gebruik van een sta-op-lift.

- + comfortabele okselrollen van schuimrubber voor optimale drukverdeling
- + antislip op de rugzijde
- + klitband en fixatiegordel met klikgesp
- + keuze tussen reguliere iQ- Clips of S-Clips zonder meerprijs (met S-Clip = geen voorraadproduct)



| referentie | omschrijving | eigenschappen | |
|------------|----------------|--|--|
| TQ3010035 | Tilvest deluxe | Polyester met anti-slip op de rug, buikfixatie met klittenband- en gespsluiting, comfortabele okselrollen, met iQ-Clips maat S tot XXL | |
| TC3010035 | Tilvest deluxe | Polyester met anti-slip op de rug, buikfixatie met klittenband- en gespsluiting, comfortabele okselrollen, met S-Clips maat S tot XXL | |

Tilvest met lussen

Tilvest met lussen voor gebruik op de ECLIPSE Stand Up.



| referentie | omschrijving | eigenschappen | |
|------------|---------------------------|--|--|
| TLESUST | Tilvest Stand Up Standard | Polyester, met 3 lussen, buikfixatiegordel met gespsluiting, 1 maat | |
| TLESUCM | Tilvest Stand Up Comfort | Polyester, met 3 lussen, extra stevige rugsteun en okselrollen, buikfixatiegordel met gespsluiting, 1 maat | |

+ Tilbanden gebruik op passieve tilliften

Standaard tilband met clips

Standaard tilband met clips is te gebruiken in combinatie met een passieve lift. De band is geschikt voor korte transfers tussen bijvoorbeeld bed, stoel en rolstoel of om een zorgvrager van de vloer te tillen.

Een standaard tilband is te gebruiken voor transfers van zorgvragers in de passieve mobiliteitsklasse. Deze zorgvragers zijn niet in staat om zelfstandig transfers te maken, zij hebben bij verplaatsingen altijd hulp nodig van een zorgverlener.

De standaard tilband is gemaakt van sterk polyester en daardoor gemakkelijk aan te brengen. De tilband kan bevestigd worden met iQ-clips of S-clips.

De zorgverlener brengt de standaard tilband aan voor het maken van een transfer. Na de transfer verwijderd de zorgverlener de tilband weer. De standaard tilband is leverbaar in diverse materialen, elk met hun eigen kwaliteiten en voordelen.

Verkrijgbaar in verschillende materialen:

POLYESTER

Polyester is een geweven, sterk en glad materiaal. De stof is geschikt voor korte transfers. Een polyester tilband is gemakkelijk aan te brengen. Door de juiste structuur heeft dit wel de gewenste stroefheid bij het uitvoeren van de transfer. Door de weving en het gebruikte garen is de stof erg duurzaam en ontstaan er geen ladders in de stof. Polyester droogt zeer snel. Na het centrifugeren is het vrijwel droog en bijna direct opnieuw te gebruiken.

NETSTOF

De waterdoorlatende netstof is ideaal voor een tilband die wordt gebruikt voor douchen of baden. De netstof is gemaakt van polyester, een geweven, sterk en glad materiaal. De stof is geschikt voor korte transfers. Een polyester tilband is gemakkelijk aan te brengen. Door de juiste structuur heeft dit wel de gewenste stroefheid bij het uitvoeren van de transfer. Mede door de weving en het gebruikte garen is de stof erg duurzaam en ontstaan er geen ladders in de stof. Polyester droogt zeer snel. Na het centrifugeren is het vrijwel droog en bijna direct opnieuw te gebruiken.



Alle standaardbanden zijn voorzien van gepolsterde beenflappen van foam. Dit zorgt voor een fijne drukverdeling onder de benen. Bovendien is een voordeel dat deze niet wateropnemend zijn.

EZESLYDE

Ezeslyde is een geweven, sterk, dun en zeer glad polyester. Door deze kenmerken is ezeslyde heel gemakkelijk aan te brengen. De stof is uitermate geschikt voor korte transfers. De stof glijdt gemakkelijk langs het lichaam en andere textieloppervlakken. Dit voorkomt eventuele afschuifkrachten zoveel mogelijk. Ezeslyde droogt zeer snel. Na het centrifugeren is het vrijwel droog en is het bijna direct opnieuw te gebruiken.

- + comfortabele pasvorm met goede hoofdondersteuning
- + verkrijgbaar in meerdere materialen
- + polstering in niet-wateropneembaar foam
- + keuze tussen reguliere iQ- Clips of S-Clips zonder meerprijs (met S-Clips = geen voorraad product)

| referentie | omschrijving | eigenschappen | |
|------------|--|--|---|
| PQSS | Standaard tilband POLYESTER, (XSS tot XXL) | voor 4-puntsjukken, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met iQ-Clips, max. 230 kg |  |
| PQSB | Standaard tilband NETSTOF, (XSS tot XXL) | voor 4-puntsjukken, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met iQ-Clips, max. 230 kg |  |
| PQSE | Standaard tilband EZESLYDE, (S tot XL) | voor 4-puntsjukken, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met iQ-Clips, max. 230 kg |  |
| PSSS | Standaard tilband POLYESTER, (XSS tot XXL) | voor 4-puntsjukken, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met S-Clips, max. 230 kg |  |
| PSSB | Standaard tilband NETSTOF, (XSS tot XXL) | voor 4-puntsjukken, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met S-Clips, max. 230 kg |  |
| PSSE | Standaard tilband EZESLYDE, (S tot XL) | voor 4-puntsjukken, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met S-Clips, max. 230 kg |  |

Toilettilband deluxe met clips

Toilettilband deluxe is specifiek ontworpen voor directe transfers van niet-mobiele zorgvragers naar het toilet. De band is voorzien van een hoofdsteun. U kunt de tilband bevestigen met iQ-clips of S-clips te gebruiken in combinatie met een passieve lift. De band is gemaakt van zacht en duurzaam polyester met een stevige beenpolstering. De toiletband laat de billen vrij. Zo kan de zorgverlener het ondergoed naar beneden schuiven zodat de zorgvrager kan plaatsnemen op het toilet. Een goede schouderfunctie van de zorgvrager is onontbeerlijk omdat toiletband deluxe de billen niet ondersteunt.

- + comfortabele okselrollen van schuimrubber
- + comfortabele hoofdondersteuning
- + polstering in waterdicht foam

- + keuze tussen reguliere iQ- Clips of S-Clips zonder meerprijs (met S-Clips = geen voorraadproduct)



| referentie | omschrijving | eigenschappen | |
|------------|----------------------------------|--|---|
| PQST | Toilettilband deluxe (S tot XXL) | voor 4-puntsjukken, polyester, comfortabele okselrollen, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met Q-Clips, max. 230 kg |  |
| PSST | Toilettilband deluxe (S tot XXL) | voor 4-puntsjukken, polyester, comfortabele okselrollen, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met S-Clips, max. 230 kg |  |

Verblijfstilband met clips

De verblijfsband is een comfortabele tilband waarin de zorgvrager langere tijd kan zitten. Deze tilband hoeft niet na elke transfer te worden verwijderd.

De verblijfsband hoeft niet voor elke transfer aangelegd te worden. Dit vermindert de fysieke belasting voor zowel zorgvrager als zorgverlener. De verblijfsband kan blijven zitten dankzij de speciale comfortcoupe die de zorgvrager voldoende comfort biedt om er lang in te zitten. De verblijfstilband omsluit de billen meer dan een standaard tilband. De verblijfsband vermindert het risico op decubitus bij de stuit.

Veel zorgverleners gebruiken de verblijfsband als het lastig is om in zit een tilband aan te brengen bij een zorgvrager. Denk hierbij aan de zorgvrager die niet meer kan meewerken bij het aanbrengen van een tilband of in een orthese zit. Ook als het aanbrengen en weghalen van de tilband pijnlijk is, kan gebruik van een verblijfsband een prima alternatief zijn.

Eén zorgverlener kan de verblijfsband aanbrengen. De zorgvrager moet zich wel in lighouding bevinden omdat de zorgverlener de band verder dan de stuit moet aanbrengen.

Zorgverleners gebruiken verblijfsband met iQ-Clips of S-Clips in combinatie met een passieve lift met een vierpuntsjuk. De band is leverbaar in 3D STOF of BAMBOETEXTEL.

3D STOF

Onze 3D stof is een polyester met een zeer open structuur. Vocht- en warmteafvoer zijn optimaal doordat er aan de achterkant grotere gaatjes zitten dan aan de kant waarop de zorgvrager zit. Het materiaal neemt nauwelijks vocht op en stimuleert optimale transpiratie. Dit alles zorgt voor hetzelfde vocht- en warmte-afdrijvende effect als bij moderne




sportshirts. Na het wassen en centrifugeren komt deze band praktisch droog uit de wasmachine en dus zo goed als klaar voor gebruik. Bijkomend voordeel van dit materiaal is dat het een dempende werking heeft

BAMBOETEXTEL

Bamoe is een gebreid textiel dat bestaat uit een combinatie van plantaardige, natuurlijke vezels (rayon) en een polyester garen. Bamoe kenmerkt zich door de zachte structuur die fijn aanvoelt. Dit gebreide textiel heeft een comfortabele stretch eigenschap waardoor de band zich vormt naar het lichaam tijdens het tillen. Door de breitechniek ontstaan microlusjes in het materiaal die de band een open structuur geven. Dit stimuleert het reguleren van de warmte. De natuurvezel van bamoe neemt vocht op. Daarom moet deze tilband wel even drogen voor hergebruik na het wassen.

- + comfortabele pasvorm met goede hoofdondersteuning
- + verkrijgbaar in meerdere materialen
- + polstering in waterdicht foam
- + keuze tussen reguliere iQ Clips of S-Clips, zonder meerprijs

| referentie | omschrijving | eigenschappen | |
|------------|---|--|---|
| PQVB3D | Verblijfstillband 3D STOF (XXS tot XXL) | voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met Q-Clips, max. 230 kg |  |
| PSVB3D | Verblijfstillband 3D STOF (XXS tot XXL) | voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met S-Clips, max. 230 kg |  |
| PQVBBB | Verblijfstillband BAMBOETEXTIEL (XXS tot XXL) | voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met Q-Clips, max. 230 kg |  |
| PSVBBB | Verblijfstillband BAMBOETEXTIEL (XXS tot XXL) | voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met S-Clips, max. 230 kg |  |

“Dankzij de flexibele uiteinden van het juk is de tilband gemakkelijk te bevestigen aan de passieve tillift Wendy.”



Amputatietilband met clips

De amputatietilband is een tilband die speciaal ontwikkeld is voor alle transfers van zorgvragers met een enkele of dubbele beenamputatie. Zorgverleners gebruiken de amputatietilband met iO-clips of S-clips in combinatie met een passieve lift. Deze tilband is ontwikkeld met oog voor een comfortabele pasvorm. Ook biedt de amputatietilband een goede hoofdondersteuning.

Voor gebruik van de amputatietilband is wel vereist dat de zorgvrager druk op het geamputeerde lichaamsdeel kan verdragen.

Amputatietilband: voorzien van korte beenslips voor omsluiting van het geamputeerde lichaamsdeel
De band is leverbaar in NETSTOF, BAMBOETEXTEL of 3D STOF

- + comfortabele pasvorm met goede hoofdondersteuning
- + verkrijgbaar in meerdere materialen
- + Korte beenslips om het geamputeerde lichaamsdeel te omsluiten



- + polstering in niet-wateropneembaar foam
- + keuze tussen reguliere iQ Clips of S-Clips zonder meerprijs

| referentie | omschrijving | eigenschappen | |
|------------|---|---|---|
| PQVBAB | Amputatie tilband NETSTOF (S tot XXL) | voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde verkorte beenslips, met Q-Clips, max. 230 kg |  |
| PSVBAB | Amputatie tilband NETSTOF (S tot XXL) | voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde verkorte beenslips, met S-Clips, max. 230 kg |  |
| PQVBABB | Amputatie tilband BAMBOETEXTEL (S tot XXL) | voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde verkorte beenslips, met S-Clips, max. 230 kg |  |
| PQVBABB | Verblijfstilband BAMBOETEXTEL (XXS tot XXL) | voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met Q-Clips, max. 230 kg |  |
| PSVBBB | Verblijfstilband BAMBOETEXTEL (XXS tot XXL) | voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met S-Clips, max. 230 kg |  |

Anti-spasme tilband met clips



De anti-spasme tilband is een tilband die speciaal ontwikkeld is voor gebruikers met spierproblemen, zoals strekspasmen, extreme bewegelijkheid of dystonie. De anti-spasme tilband is voorzien van extra hoofdsteunbandjes, een buikfixatie en extra lussen bij de beenslips. Dit zorgt voor complete omsluiting, wat de zorgvrager een comfortabel, veilig en rustig gevoel geeft.

De ervaring leert dat door zo'n veilig, omsloten gevoel strekspasmen sterk kunnen afnemen. De zorgvrager kan daarbij ook de kin meer naar de borst brengen. Zorgverleners gebruiken de anti-spasme band met iQ-Clips of S-clips in combinatie met een passieve lift. De band is leverbaar in BAMBOETEXTIEL of 3D STOF.

Zorgverleners kunnen de anti-spasme band alleen aanbrengen als de zorgvrager zich in lighouding bevindt. Dit omdat de band verder dan de stuit aangebracht dient te worden.

- + comfortabele pasvorm met goede hoofdondersteuning
- + verkrijgbaar in meerdere materialen
- + polstering in waterdicht foam
- + keuze tussen reguliere iQ Clips of S-Clips zonder meerprijs



| referentie | omschrijving | eigenschappen | |
|------------|---|--|---|
| PQVBASBB | Anti-spasme tilband BAMBOETEXTIEL (XXS tot XXL) | voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen en extra hoofdsteunbandjes, buikfixatie en extra lussen bij de gepolsterde beenslips, met Q-Clips, max. 230 kg |  |
| PSVBASBB | Anti-spasme tilband BAMBOETEXTIEL (XXS tot XXL) | voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen en extra hoofdsteunbandjes, buikfixatie en extra lussen bij de gepolsterde beenslips, met S-Clips, max. 230 kg |  |
| PQVBAS3D | Anti-spasme tilband 3D STOF (XXS tot XXL) | voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen en extra hoofdsteunbandjes, buikfixatie en extra lussen bij de gepolsterde beenslips, met Q-Clips, max. 230 kg |  |
| PSVBAS3D | Anti-spasme tilband 3D STOF (XXS tot XXL) | voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen en extra hoofdsteunbandjes, buikfixatie en extra lussen bij de gepolsterde beenslips, met S-Clips, max. 230 kg |  |

HighBackSling met lussen

De HighBackSling is voor de zorgverlener gemakkelijk aan te brengen en geeft de patiënt een gevoel van veiligheid. De band heeft beensecties zodat de patiënt niet op de tilband zit. In plaats daarvan biedt de tilband steun van het staartbeentje tot aan het hoofd en onder de benen. HighBackSling is bedoeld voor situaties waarin extra ondersteuning nodig is en kan worden gebruikt voor het tillen vanuit een liggende positie op de vloer.



De band is leverbaar in POLYESTER of NETSTOF

| referentie | omschrijving | eigenschappen |
|------------|---|---|
| PL4080000 | HighBackSling POLYESTER (XXS tot XXL) | voor 2-puntsjukken, polyester, versterkte hoofddeun met 2 baleinen, met lussen, max. 300 kg |
| PL4082000 | HighBackSling NETSTOF (XXS tot XXL) | voor 2-puntsjukken, polyester, versterkte hoofddeun met 2 baleinen, met lussen, max. 300 kg |



BasicSling met lussen

BasicSling is ontworpen voor gebruik in de meest voorkomende tilsituaties en wanneer de patiënt een gebrekkige rompstabiliteit heeft, maar een goede hoofdstabiliteit.

- + Gescheiden verstevigde beensteunen; eenvoudig door de zorggever aan te brengen of te verwijderen, de zorgvrager zit niet op de tilband
- + Schouderhoge rugsteun; de zorgvrager wordt ondersteund vanaf het staartbeen tot aan de schouders en onder de benen
- + Rechtop zittende houding
- + Standaardmodel, geschikt voor de meeste zorgvragers met goede hoofdstabiliteit
- + Vakje aan de onderrand voor makkelijker aanbrengen
- + 300 kg



| referentie | omschrijving | eigenschappen |
|------------|--|---|
| PLUSB | BasicSling met lussen POLYESTER (XXS tot XXL) | voor 2-puntsjukken, polyester, met lussen, max. 300 kg |
| PLUBB | BasicSling met lussen NETSTOF (XXS tot XXL) | voor 2-puntsjukken, met lussen, max. 300 kg |

85°

85°

Banana Sling SPU (dispo) tilband

De Banana Sling is een tilband die speciaal is ontwikkeld voor gebruik bij 1 zorgvrager. Zorgverleners gebruiken de Banana Sling met lussen of clips in combinatie met een passieve lift. Deze tilband is ontwikkeld met oog voor een comfortabele pasvorm.

Ze zijn gemaakt van een sterke maar zachte polyester en zijn ideaal voor een zittende, horizontale of half liggende transfer. Het unieke materiaal voert vocht af en kan onder de zorgvrager blijven zitten.

De Banana Sling vervaardigd uit een nonwoven polyester is een wegwerptilband (of disposable) voor gebruik bij één zorgvrager. Nonwoven is een kunststof vlies dat niet geweven of gebreid is. Dit sterke en waterafstotende gesponnen vlies bevat dus geen garen, maar het materiaal wordt rechtstreeks als kunststofvezel in een soort web gelegd en aan elkaar gehecht. De stof is bedoeld voor kortdurend single-patient-use. Disposable non-woven vlies is uitermate geschikt voor gebruik bij besmettingsgevaar en zorgomstandigheden die om extra hygiëne vragen. De stof kan niet in de wasmachine, dan verliest het structuur en sterkte. Het materiaal is duurzaam, want herbruikbaar bij dezelfde zorgvrager.



- + waswaarschuwingsindicator
- + 5 kleurgecodeerde maten
- + gewatteerde ondersteuning voor comfort en bescherming van de huid
- + bevordert infectiebeheersing
- + 230 kg

| referentie | omschrijving | eigenschappen |
|------------|--|---|
| B-SPPUL | Tilband Banana Loop/Lussen Sling 4p (XS tot XL) per 10st | voor 2-puntsjukken, non-woven polypropyleen, versterkte hoofdsteun, met lussen, max. 230 kg |
| B-SPPUC | Tilband Banana Clip Sling 4p (XS tot XL) per 10st | voor 4-puntsjukken, non-woven polypropyleen, versterkte hoofdsteun, met clips, max. 230 kg |



Eclipse ECO tilband met lussen

Tilband Eclipse ECO voor gebruik in passieve tilliften met 2 puntsjuk (lussen). Gemaakt van polyester, heel soepel en gemakkelijk te gebruiken. Geschikt voor gebruik bij verschillende soorten transfers.





| referentie | omschrijving | eigenschappen | |
|------------|---------------------|---------------------------------|---|
| PLEECO | Tilband Eclipse ECO | Polyester, met 3 lussen, 1 maat |  |

Eclipse COMFORT tilband met lussen

Ontworpen om aan de behoeften van de gebruiker te voldoen, afhankelijk van hun mobiliteit, hun pathologie en type transfer. De tilband COMFORT is beschikbaar met of zonder hoofdsteun.

Beschikbaar in verschillende maten allen hebben een draagvermogen van 150 kg, de XL maat draagt 200 kg.





| referentie | omschrijving | eigenschappen | |
|------------|---|-------------------------|---|
| PLECOMF | Tilband Eclipse COMFORT (S tot XL) | Polyester, met 3 lussen |  |
| PLECOMFH | Tilband Eclipse COMFORT met hoofdsteun (S tot XL) | Polyester, met 3 lussen |  |

Eclipse BATH tilband met lussen

Ontworpen om aan de behoeften van de gebruiker te voldoen, afhankelijk van hun mobiliteit, hun pathologie en type transfer. De tilband BATH is vervaardigd uit netstof en daarom specifiek voor gebruik bij het baden, is beschikbaar met of zonder hoofdsteen.

Beschikbaar in verschillende maten allen hebben een draagvermogen van 150 kg, de XL maat draagt 200 kg.





| referentie | omschrijving | eigenschappen | |
|------------|--|----------------------------------|---|
| PLEBATH | Tilband Eclipse BATH (S tot L) | Polyester, netstof, met 3 lussen |  |
| PLEBATHH | Tilband Eclipse BATH met hoofdsteen (S tot XL) | Polyester, netstof, met 3 lussen |  |

Eclipse FULL amputatietilband met lussen

Ontworpen om aan de behoeften van de gebruiker te voldoen, afhankelijk van hun mobiliteit, hun pathologie en type transfer. De amputatietilband FULL is beschikbaar in COMFORT uitvoering of BATH uitvoering.

Beschikbaar in maat M en L ze hebben een draagvermogen van 150 kg.



| referentie | omschrijving | eigenschappen | |
|------------|---|----------------------------------|---|
| PLEFULL | Amputatietilband Eclipse FULL, COMFORT uitvoering (M tot L) | Polyester, met 3 lussen |  |
| PLEFULLB | Amputatietilband Eclipse FULL, BATH uitvoering (M tot L) | Polyester, netstof, met 3 lussen |  |



+ Installatie, onderhoud en herstelling

Metra installeert, onderhoudt en herstelt! Alle installaties doen we in eigen beheer. Onze geëngageerde technici vormen het hart van een goed uitgeruste technische dienst en we beschikken over een ruime voorraad wisselstukken van alle merken die we vertegenwoordigen, herstellen en onderhouden. Onze mensen worden doorlopend grondig opgeleid door alle fabrikanten waarmee wij samenwerken.

Dankzij ons digitaal klantenportaal kan u voor alle toestellen die u bij ons heeft gekocht en/of door ons laat onderhouden en herstellen, niet alleen de status van uw herstell aanvragen controleren maar ook de volledige levensloop en gebruikskosten volgen.

Onze technische dienst is volledig gedigitaliseerd: herstell aanvragen, offerte, aankoopbestellingen, projectmanagement, planning, installatie, onderhoud, herstellingen, facturatie ... De volledige historiek van alle toestellen, installaties, onderhoud en herstellingen wordt gedetailleerd bijgehouden. Alle installaties en herstellingen worden ook met foto's gedocumenteerd, voor en na de interventie. Door ons intern kwaliteitsmanagementsysteem bent u gerust dat onze service voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

De troeven van metra technics

- + Goed opgeleide mensen met een hart voor de zorg
- + Volledig uitgerust met alle noodzakelijke werkmiddelen
- + Ruime voorraad onderdelen
- + Volledig digitaal werkplatform, u kan onderhoud en herstellingen van al uw toestellen opvolgen
- + Gedetailleerde rapportering, zowel qua werkuren als onderdelen
- + Transparante tarieven

Onderhoudscontracten

Metra biedt u op vlak van onderhoudscontracten ook verscheidene formules aan. Het is aan te bevelen om alle toestellen die u in gebruik heeft jaarlijks te laten controleren, met oog op het welzijn en de veiligheid van zorgontvanger en -verlener. Er zijn 3 onderhoudsformules, namelijk GOUD/ZILVER of BRONS.

Bij GOUD en ZILVER wordt het tijdstip van de jaarlijkse controle op initiatief van Metra, in onderlinge afspraak vastgelegd. Bij BRONS neemt u zelf initiatief om de jaarlijkse controle te laten uitvoeren. Na elke controle krijgt u voor elk individueel toestel een controlecertificaat.

- + Op afroep, BRONS: vaste prijs voor controle verplaatsingskosten worden aangerekend, per lift worden er 2 teldoeken mee gecontroleerd.
- + Jaarcontract ZILVER: verlaagde prijs voor controle en verplaatsingskosten, per lift worden er 2 teldoeken mee gecontroleerd, next-day service bij interventies, 5% korting op wisselstukken, ...
- + Jaarcontract GOUD: vaste prijs (all-in), verplaatsing, controle, onderhoud en tussentijdse interventies + alle onderdelen (m.u.z. batterijen) inbegrepen, per lift worden er 2 teldoeken mee gecontroleerd, next-day service, gratis vervangtoestel, ...

“Werkdruk in de zorg wint het té vaak van de juiste werkhouding. De juiste tiltechnieken en hulpmiddelen worden daar jammer genoeg niet steeds toegepast. Er wordt té dikwijls op de fysieke kracht (belastbaarheid) van de zorgverlener teruggevallen. Zo worden er telkens grenzen overschreden, wat nefast is voor het gestel, de vitaliteit en mettertijd ook de mentale gezondheid van de zorgverlener”

Permanent in ons aanbod: workshop ‘ergonomisch werken in de zorg’

Veilig verplaatsen van zorgbehoevenden

Doelgroep

- + Deze opleidingen richten zich naar zorgverlenend personeel (verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, ...) die hun kennis willen verruimen rond “correct gebruik van transferhulpmiddelen in de zorg”.

Doelstellingen

- + Kennis uitbreiden rond bestaande hulpmiddelen in de zorg
- + Correct gebruik van manuele en mechanische transferhulpmiddelen
- + Bewustwording van het eigen lichaam bij gebruik van hulpmiddelen
- + Onveilige situaties herkennen bij gebruik van transferhulpmiddelen
- + Comfort bieden aan de patiënt

Werkwijze

- + Participatieve en interactieve deelname van de cursisten door hen nauw te betrekken tijdens de vorming steunend op hun persoonlijke ervaringen
- + Tal van praktijksituaties worden onderling ingeoeft
- + Evaluatie en groepsgesprek
- + Maximaal 12 deelnemers per workshop voor een optimale kennisoverdracht en participatie

Werken met manuele en mechanische transferhulpmiddelen (6 uur)

Inoefenen van verplaatsingen met behulp van transferhulpmiddelen

- + Patiënt hogerop brengen in bed
- + Patiënt draaien in bed
- + Horizontale translaties in bed
- + Comfortabel positioneren in bed

Gebruik van de actieve tillift

- + Voorwaarden om de actieve tillift veilig te kunnen gebruiken
- + Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van de actieve tillift

Gebruik van de passieve tillift

- + Aanbevelingen bij gebruik van passieve tillift
- + Voordelen bij gebruik van passieve tillift met 2 zorgverleners
- + Correct aanbrengen en verwijderen van de tilband in lig en in zit
- + Correct positioneren in lig en in zit
- + Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van de passieve tillift

Deze opleiding kan zowel in uw instelling als in de seminariezaal van Metra georganiseerd worden. Vraag meer info via academy@metra.be

Tilliften en tilbanden



Ontdek al onze oplossingen op [metra.be](https://www.metro.be)



Manuele transferhulpmiddelen | Tilliften en tilbanden | Comfort, bescherming en veiligheid |
Douchen en baden | Medische fixatie | Ice Power | Toegankelijkheid in publieke en private gebouwen | ...



METRA bv
Jan Samijnstraat 25
9050 Gent | België

+32 (0)9 227 71 74
info@metra.be
[metra.be](https://www.metro.be)

BTW BE 0458.474.359
RPR Gent | AFDELING Gent



© Metra bv - september 2023 - Alle rechten voorbehouden. In het kader van de voortdurende verbetering van zijn producten behoudt Metra zich het recht voor om de specificaties van de producten aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle afbeeldingen zijn indicatief. Onder voorbehoud van drukfouten. Metra is niet verantwoordelijk voor een verkeerd gebruik van zijn producten.