



Gebruiksaanwijzing



Posey tentbed 8080



REF 8080

Posey tentbed incl. bedframe Elbur PB528 (afgebeeld) of PB526II (bedtent, bedonderstel, frame en matrassen zijn los te koop)

LET OP! in spoed situaties is het complete bed per dag te huur, levering 24/7 dus ook op zaterdag, zondag en feestdagen. Bel in dat geval het spoednummer **+31 (0)13-523 42 86**. Tijdens kantooruren belt u met **+31 (0)13-536 38 07**.

Lees deze instructies zorgvuldig zodat risico's of het ongewenst verlaten van het bed voorkomen kunnen worden.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALS NASLAGWERK.



Human Protection B.V.
Droogdokkeneiland 4
5026 SR Tilburg, Nederland
tel. +31 (0)13-536 38 07

SCAN ME



Scan de QR-code of bezoek
www.humanprotection.nl/instructievideos-human-protection
om de instructievideo van het Posey tentbed te bekijken!

INHOUDSOPGAVE GEBRUIKSAANWIJZING

Definities	5
1. Doel van het hulpmiddel	6
1.1 Beoogde gebruiker	6
1.2 Beoogd doeleind	6
1.3 Indicaties	6
1.4 Contra-indicaties	6
1.5 Beschrijving van het hulpmiddel	7
1.6 Wanneer mag het hulpmiddel niet worden gebruikt?	7
1.7 Voordelen van het Posey tentbed	7
2. Procedure bij inzet van het Posey tentbed	8
2.1 Vóór het Posey tentbed wordt gebruikt	8
2.2 Bij het eerste gebruik	8
2.3 Tijdens het gebruik van het Posey tentbed	8
2.4 Beëindiging van het gebruik	8
2.5 Beleid voor dagelijkse controle en vrijheid van de patiënt	8
2.6 Aanpassingen aan het Posey tentbed	9
2.7 Controlelijst voor eerste gebruik	9
2.8 Training van zorgverleners	9
2.9 Locatie van het bed	9
3. “11 belangrijke controlepunten” voor u de patient alleen laat	10
4. Onderdelenoverzicht van het Posey tentbed	11
5. Aandachtspunten bij gebruik van het Posey tentbed	12
5.1 Waarschuwing voor risico op BEKNELLING of verstikking	12
5.2 Overige waarschuwingen	13
6. Het gebruik van het Posey tentbed	14
6.1 Toegangspanelen	14
6.2 Handbediening van het bed	14
6.3 Vergrendelbare zwenkwielen	15
6.4 Tentriemen	16
6.5 Comfortmatras en matrascompartiment	16
6.6 Opdekmatras	16
6.7 Transporthandgrepen	17
6.8 Snelsluitingen	17
6.9 Drainage- en slang openingen	17
6.10 Rits- en treklijpjes	18
6.11 Het omlaag brengen van de rugsteun in noodsituaties	18
6.12 Reserveaccu	19
6.13 Het openen van de tent bij calamiteiten	19
6.14 Omtrekbescherming	20
7. Transfers	21
7.1 Transfer naar het Posey tentbed	21
7.2 Toegang voor de zorgverlener	22
7.3 Transfer vanuit het Posey tentbed	22
7.4 Hulp aan patiënten in noodgevallen	22
7.5 Welke typen tilliften gebruiken in combinatie met het Posey tentbed	22
8. Reinigingsinstructies voor het Posey tentbed	23
8.1 Reiniging	23
8.2 Desinfectie	23
8.3 Voorbereiding op wasbeurt tent	23
8.4 De tent uitwassen	24
8.5 De tent bevestigen na het uitwassen	24

9.	Onderhoud en reparatie	25
9.1	Service- en onderhoudscontractvormen	25
9.2	Technische service	25
9.3	Maandelijkse visuele inspectie	26
9.4	Inspectieplan	27
9.5	Opslag en gebruik	27
9.6	Verwachte levensduur van het Posey tentbed	27
9.7	Instructies voor het veilig verwijderen van het hulpmiddel	27
9.8	Verwijdering	27
9.9	Gebruik van accessoires in combinatie met het Posey tentbed	28
9.10	Veelgestelde vragen	29
9.11	Probleem oplossen met het PB526II en PB528 onderstel	31
9.12	Technische specificaties/afmetingen	32
9.13	Vervangende onderdelen	35
9.14	Garantie	36
10.	Montagehandleiding	37
	Bijlagen:	43
	Bijlage 1: Inspectieplan	43

Definities

LET OP! Een situatie waarin om uw aandacht wordt gevraagd.

WAARSCHUWING! Een situatie waarin om uw aandacht wordt gevraagd. Een waarschuwing wijst u op een gevaar dat, wanneer het niet wordt vermeden, kan leiden tot verwondingen bij uzelf of bij de patiënt of tot beschadiging van het Posey tentbed.

De volgende woorden in deze gebruiksaanwijzing hebben een speciale betekenis:

“BIOGEVAAR” verwijst naar vervuiling met menselijk bloed of weefsel, bepaalde lichaamsvloeistoffen, recombinant DNA of pathogenen. Raadpleeg de arts van de patiënt wanneer u vragen hebt over dit gevaar.

“ZORGPLAN” verwijst naar het persoonlijke zorgplan van de patiënt, opgesteld door het medisch team (zie hieronder).

“BEKNELLING” wijst op een situatie waarin de patiënt bekneld, gevangen of verward zit in een besloten ruimte. Dit kan leiden tot verstikking, compressie of het ontbreken van een goede doorbloeding, met ernstige verwondingen tot gevolg.

“MEDISCH TEAM” verwijst naar het interdisciplinaire zorgteam dat het zorgplan opstelt en dat toezicht houdt op de verzorging van de patiënt. Dit team kan, onder andere, bestaan uit artsen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers.



Waarschuwing



Medisch hulpmiddel



Catalogusnummer



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor gebruik



Eén patiënt - meervoudig gebruik



Fabrikant



Fabricagedatum



Serienummer



Houd droog



Houd weg van zonlicht



Niet steriel



Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is

1. Doel van het hulpmiddel

Het Posey tentbed is een ziekenhuisbed met een tent en een matrassysteem, ontwikkeld om een veilige, gecontroleerde omgeving te bieden voor patiënten die een groot risico lopen op verwondingen wanneer ze uit bed vallen of wanneer ze het bed zonder hulp verlaten. Het Posey tentbed is een passief alternatief voor directe fysieke fixatie. Het bed is bedoeld voor volwassen en pediatrische patiënten met een lengte van ten minste 146 centimeter en een gewicht van 40 tot 165kg.

LET OP! Bij pediatrische patiënten het bed in de vlakke stand zetten. Het bed is een vrijheidsbeperkende interventie en dient voorgeschreven te worden door een gediplomeerd arts of door de autoriteit die wettelijk is bevoegd om medische hulpmiddelen voor te schrijven. Het bed mag alleen gebruikt worden onder direct toezicht en directe autoriteit van het medisch team. Volg voor de permanente monitoring van de patiënt steeds het protocol m.b.t. vrijheidsbeperkende interventies van de instelling.

1.1 Beoogde gebruiker

Dit medisch hulpmiddel is bestemd voor gebruik door medisch professionals.

1.2 Beoogd doeleind

Het Posey tentbed geeft de patiënt een gevoel van veiligheid, comfort en geborgenheid door het aanbieden van bewegingsvrijheid binnen een afgebakende omgeving met minder externe prikkels.

1.3 Indicaties

Het Posey tentbed is geschikt als een humaner alternatief voor fysieke fixatie of sederende medicatie. Het tentbed vergroot niet alleen de veiligheid, maar zorgt tevens voor een gevoel van veiligheid en bescherming. Indicaties voor de inzet van het Posey tentbed kunnen zijn:

- Ernstige osteoporose;
- Een groot risico op fractures als gevolg van de klinische omstandigheden;
- Onvoldoende spier- en vetweefsel en subcutaan weefsel om de schok van een val op te vangen;
- Musculoskeletale problemen die een onvaste gang veroorzaken of de kracht of biomechanica van de patiënt aantasten;
- Het gebruik van antistollingsmiddelen;
- Een verleden van ernstige trauma's als gevolg van een eerdere val.
- Een verlaagd bewustzijn als gevolg van medicatie of neurale ziekten waardoor de alertheid en balans worden aangetast en/of als gevolg van dementie*
- Visuele of perifere zenuwaandoeningen die van invloed zijn op het bewustzijn of de waarneming van de huidige positie.

Elke patiënt moet over een goedgekeurd ZORGPLAN beschikken voor het Posey tentbed mag worden gebruikt. Het Posey tentbed dient gebruikt te worden overeenkomstig de normen voor patiëntzorg en het beleid van een wettelijk geregistreerde medische faciliteit. Ook moet aan alle toepasselijke lokale, regionale, nationale en Europese richtlijnen worden voldaan.

1.4 Contra-indicaties

Indien sprake is van één of meerdere van de volgende contra-indicaties, gebruik dan het Posey tentbed niet maar neem contact op met de behandelend arts.

- De aanwezigheid van meerdere lijnen, drains en/of slangen;
- De noodzaak van acute respiratoire of cardiale ondersteuning;
- Cardiale of septische shock;
- Claustrofobie;
- PICA eetstoornis;
- Agressief, gewelddadig of zelf-destructief gedrag;
- Suïciderisico;
- Patiënt is kleiner dan 146cm of lichter dan 40kg of een lagere BMI dan 17.

1.5 Beschrijving van het hulpmiddel

- **Volledig elektrisch verstelbaar ziekenhuisbed onderstel:**

Geproduceerd en geleverd door Elbur Vertriebs GmbH. (Elbur modellen PB528 en PB526II).

Het bed kan zakken tot een hoogte van 54 centimeter (bovenkant matras), zodat de patiënt eenvoudig kan worden overgebracht. Bovendien kan het bed worden verhoogd tot een hoogte van 95 centimeter om het risico op rugklachten of verwondingen van de zorgverlener tijdens het verzorgen van de patiënt te verminderen.

- **Ingesloten matras in een compartiment:**

Helpt het risico op beknelling van de patiënt onder het matras te voorkomen.

- **Tent:**

Het bed wordt omgeven door een rechthoekige groene tent met een inhoud van twee kubieke meter.

Het materiaal is licht en huidvriendelijk. De tent bevat vier toegangspanelen, zodat zorgverleners bij de patiënt kunnen.

Bovendien zijn er meerdere openingen voor bijv. intraveneuze lijnen en voor de oproepknop. Voor de veiligheid van de patiënt zijn de ritsen voorzien van snelsluitingen.

- **Omtrekbescherming:**

Aan weerszijden van het bed is een zachte zijrail bevestigd. Deze rail vermindert de kans dat patiënten vallen wanneer een zijpaneel wordt geopend op het moment dat de patiënt wordt verzorgd.

1.6 Wanneer mag het hulpmiddel niet worden gebruikt?

Het Posey tentbed is niet bedoeld voor gebruik voor:

- Patiënten die zwaarder zijn dan 165kg. Dit is de maximale laadcapaciteit van het bed;
- Patiënten die zijn gediagnosticeerd op enige conditie die tot gewelddadig of zelfdestruïctief gedrag kan leiden. Dit kan resulteren in zelfverwonding en/of in beschadiging van het Posey tentbed. Wanneer patiënten gewelddadig heen en weer rollen, kan het Posey tentbed kantelen of naar een positie bewegen waarin de patiënt gewond kan raken;
- Patiënten waarbij sprake is van één of meerdere van de in paragraaf 1.4 genoemde contra-indicaties.
- Patiënten die kleiner zijn dan 146cm of lichter zijn dan 40kg of een lagere BMI hebben dan 17.



WAARSCHUWING! Dit tentbed is niet geschikt voor klasse I ruimten zoals een IC afdeling.

LET OP! Vanwege de aard van de diagnoses, het activiteitsniveau of de ongecontroleerde bewegingen van patiënten is het Posey tentbed niet voor iedere patiënt geschikt. Wanneer een patiënt onrustig blijft en/of wordt in het bed, dient men de patiënt direct uit het bed te halen en op zoek te gaan naar een andere oplossing.

1.7 Voordelen van het Posey tentbed

Het Posey tentbed werd ontwikkeld om de volgende voordelen te bieden:

- Een gecontroleerde omgeving voor de patiënt;
 - Een kalmerend effect voor bepaalde patiënten;
 - Vermindering van het risico op het zelfstandig verlaten van het bed;
 - Vermindering van valpartijen door patiënten;
 - Vermijding van het risico op beknelling van patiënten onder het matras;
 - Geen gebruik van bedhekken indien er geen toezicht op de patiënt is.
- Hiermee wordt voorkomen dat de patiënt bekneld raakt tussen beddekken of tussen het matras en de beddekken.

2. Procedure voor inzet van het Posey tentbed

2.1 Vóór het Posey tentbed wordt gebruikt

- Het Posey tentbed moet worden voorgeschreven door een arts of door de autoriteit die wettelijk is bevoegd om medische hulpmiddelen voor te schrijven;
- Alle zorgverleners moeten voorafgaand aan het gebruik van het Posey volledig worden getraind in het gebruik van het bed;
- Zorg dat u het zorgplan van de patiënt kent en dat u weet hoe nauwkeurig en hoe vaak u de patiënt moet controleren;
- Volg alle instructies, waarschuwingen en aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing en alle labels op het Posey tentbed.

2.2 Bij het eerste gebruik

- Controleer de patiënt gedurende de eerste uren zorgvuldig om vast te stellen of het Posey tentbed aan de behoeften van de patiënt voldoet. Controleer of de patiënt comfortabel ligt en goed op het Posey tentbed reageert;
- Human Protection B.V. beveelt controle aan in de kamer gedurende de eerste twee uur en ononderbroken geluidscontrole of visuele controle gedurende de daaropvolgende twee uur.

2.3 Tijdens het gebruik van het Posey tentbed

- Doorloop steeds de lijst "11 belangrijke controlepunten" op pagina 10 voor u de patiënt alleen laat;
- Controleer de patiënt zorgvuldig om vast te stellen of het Posey tentbed aan de behoeften van de patiënt voldoet. Controleer of de patiënt comfortabel ligt en goed op het Posey tentbed reageert;
- Beoordeel de noodzaak van het gebruik van het Posey tentbed opnieuw wanneer de mentale of fysieke toestand of status van de patiënt verandert. Gebruik het Posey tentbed alleen wanneer er geen minder beperkend alternatief is. Gebruik ALTIJD het minst beperkende hulpmiddel gedurende de kortst mogelijke periode en zoek altijd naar een minder beperkend alternatief;
- Haal patiënten die claustrofobisch zijn of worden uit het Posey tentbed;
- Haal de patiënt onmiddellijk uit het Posey tentbed wanneer er een risico op zelfverwonding of verwonding van anderen bestaat, wanneer het bed kantelt of wanneer de patiënt het Posey tentbed probeert te beschadigen.

2.4 Beëindiging van het gebruik

- Voor de patiënt wordt overgeplaatst naar een gewoon bed of naar een ziekenhuisbed moet hij worden beoordeeld en gecontroleerd;
- Raadpleeg de medische verklaring, het zorgplan, het medisch team of het beleid van de instelling voor instructies over het verplaatsen van de patiënt.

WAARSCHUWING!



Gebruik het Posey tentbed **NOOIT** wanneer de tent, toegangspanelen of ritsen zijn beschadigd. Controleer **ALTIJD** de tent en ritsen voor u de patiënt onbewaakt achterlaat. Wanneer u deze waarschuwing niet naleeft, kan de patiënt het bed ongewenst verlaten wat kan resulteren in een valpartij met verwondingen.



Belang van patiëntcontrole. Laat een patiënt **NOOIT** onbewaakt achter zonder goede bewaking. Wanneer u de toestand van de patiënt niet controleert overeenkomstig het veiligheidsbeleid van uw instelling, de medische verklaring of het **ZORGPLAN**, kan dat ernstige gevolgen hebben.

Beëindig het gebruik van het bed direct wanneer de patiënt onrustig wordt of blijft bij gebruik van het bed.

2.5 Beleid voor dagelijkse controle en vrijheid van de patiënt:

Controleer de toestand van de patiënt overeenkomstig het veiligheidsbeleid van uw instelling, de medische verklaring of het ZORGPLAN. Leg aan de patiënt en aan de familie van de patiënt uit hoe de oproepknop werkt.

Volg de instructies in het ZORGPLAN met betrekking tot het bieden van dagelijkse vrije momenten voor de patiënt. Houd rekening met de patiëntbehoefte ten aanzien van: voeding, beweging, wandelen, ontspanning, toiletbezoek en verzorging.

2.6 Aanpassing van het Posey tentbed



WAARSCHUWING! Pas het Posey tentbed **NOOIT** om enige reden aan.

- Voeg **NOOIT** bedhekken of planken aan het hoofd- of voeteneinde van het Posey tentbed toe. Hiermee vergroot u het risico op **BEKNELLING** en ernstige verwonding van geagiteerde of agressieve patiënten die in aanraking komen met deze onderdelen;
- Gebruik **NOOIT** een hulpmiddel, zoals een sluitstrip of hangslot, om de ritsen van de panelen dicht te maken. Gebruik alleen de meegeleverde snelsluitingen. U dient **ALTIJD** snel bij de patiënt te kunnen in een noodgeval;
- Voeg **GEEN** andere dan de door Human Protection aanbevolen accessoires aan het Posey tentbed toe (zie pagina 32 voor een overzicht van accessoires).

2.7 Controlelijst voor eerste gebruik

Controleer **ALTIJD** of het Posey tentbed goed functioneert. Voer een volledige visuele inspectie van het bed uit voor u patiënten voor het eerst op het bed plaatst. Controleer of:

- Het bed schoon en niet bevuild is;
- Het bed goed is gemonteerd en of alle onderdelen in goede staat zijn;
- Het tentframe niet is gebogen of gebroken;
- Alle ritsen gemakkelijk kunnen worden geopend en veilig kunnen worden gesloten en of er geen ruimtes of openingen zijn wanneer er druk op de rits wordt toegepast;
- Het metalen tentframe volledig is beschermd en of alle schuimdelen op hun plaats zijn en onbeschadigd zijn;
- De tent niet is gescheurd en of de panelen geen slijtage, dunne plekken of kapotte stiksels vertonen;
- Het netsnoer (indien gebruikt) zo is opgeruimd dat er geen struikelgevaar is.

LET OP! Gebruik het Posey tentbed **NOOIT** wanneer het tentframe is gebogen of gebroken, wanneer de tent is versleten of beschadigd en wanneer de ritsen niet gemakkelijk geopend en goed gesloten kunnen worden.

2.8 Training van de zorgverlener

Zorg dat iedere zorgverlener vóór hij/zij het Posey tentbed gebruikt, volledig is opgeleid in alle toepasselijke beleidsregels van het ziekenhuis met betrekking tot vrijheidsbeperking en alle relevante Nederlandse en Europese wetgeving zoals bijvoorbeeld de wet Zorg en Dwang. Neem kennis van en volg de:

- Instructies voor de gebruikers in deze gebruiksaanwijzing;
- Waarschuwingen en aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing;
- Labels op het Posey tentbed;

Human Protection B.V. raadt u aan om de hierboven genoemde items gedurende de eerste maand wekelijks door te nemen.

2.9 Locatie van het bed

Zorg dat de kamer groot genoeg is om ruimte te bieden aan het Posey tentbed.

- U dient in noodgevallen voldoende ruimte te hebben om eenvoudig bij het bed te kunnen en om de patiënt eenvoudig uit het bed te kunnen halen;
- Plaats het Posey tentbed zo dat de patiënt zichzelf niet kan verwonden aan muren, meubels of andere voorwerpen wanneer hij/zij zich binnen de tent bevindt;
- Zorg dat het netsnoer niet in de weg ligt en geen struikelgevaar vormt.



LET OP! Roken en hoge temperaturen.

- Verbied roken in een ruimte waarin het Posey tentbed wordt gebruikt.
- Stel het Posey tentbed en het beddengoed nooit bloot aan open vuur, rookmiddelen of hittebronnen. Houd vloerkachels, verwarmingen en andere mobiele kachels altijd uit de buurt van het bed.



3. “11 Belangrijke controlepunten” voor u de patiënt alleen laat




LET OP! Zorg dat u het ZORGPLAN of de medische verklaring van de patiënt kent en dat u weet hoe en hoe vaak u de patiënt moet controleren.

- 1. Tent en gaas.** Controleer of er geen sprake is van slijtage, gaten of dunne plekken in de nylon panelen of het gaas. Controleer of de tent op de juiste wijze aan het frame van het onderstel is bevestigd en dat het metalen frame volledig is beschermd door de schuimrollen. Controleer ook of deze in goede staat zijn.
- 2. Matras.** Het matras dient zich altijd in het volledig afgesloten matrascompartiment te bevinden. Plaats, in verband met verstikkingsgevaar, NOOIT een matras in de patiëtruimte. Alleen het Human Protection 5cm opdekmatras is toegestaan.
- 3. Hygiëne.** Zorg dat het bed schoon is en geen rommel of voorwerpen bevat die het risico op verwonding of verstikking kunnen vergroten.
- 4. Hoogte van het bed en bediening van het bed.** Zorg dat het bed zich in de laagste positie bevindt. Zo verkleint u de kans dat het bed kantelt wanneer de patiënt geagiteerd of agressief wordt. Laat de bediening van het bed NOOIT achter in de patiëtruimte wanneer de patiënt onbewaakt wordt achtergelaten.
- 5. Vergrendelbare zwenkwielen.** Om het risico op ongewenste beweging van het bed te voorkomen, dienen alle vier de vergrendelbare zwenkwielen volledig te zijn geblokkeerd wanneer de patiënt zich in bed bevindt.
- 6. Ritsen en snelsluitingen.** Test of alle ritsen makkelijk geopend en veilig gesloten kunnen worden, of er geen ruimtes of openingen zijn als er druk op de rits wordt toegepast. Test alle ritsen over de gehele lengte door op het paneel of op de tent naast de rits te duwen. Zo kunt u controleren of ze goed zijn gesloten. Gebruik ALTIJD de trekklipjes van de rits en maak de snelsluitingen op alle toegangspanelen vast.
- 7. Locatie.** Plaats het Posey tentbed zo dat de patiënt zichzelf niet kan afzetten tegen of verwonden aan muren, meubels of andere voorwerpen wanneer hij/zij zich in de tent bevindt.
- 8. Drainage openingen.** Zorg dat alle ritsen helemaal zijn gesloten als de openingen niet gebruikt worden. Controleer, wanneer u de openingen gebruikt, of de doorstroming niet wordt belemmerd.
- 9. Omtrekbescherming.** Controleer of beide beschermingen los zijn. U moet in een noodgeval altijd snel bij de patiënt kunnen.
- 10. Oproepknop.** Wanneer het ZORGPLAN het gebruik van een oproepknop door een patiënt toestaat, dient u te zorgen dat de patiënt goed bij de knop kan.
- 11. Ligvlakverstelling.** Laat het ligvlak volledig horizontaal, zodat er geen ruimte ontstaat waar de patiënt in/achter kan kruipen of beklemd kan raken.

4. Onderdelenoverzicht van het Posey tentbed

1. **Besloten matrascompartiment.** Biedt ruimte aan een matras met een hoogte van 15 centimeter.
2. **Tent.** Het nylonmateriaal is licht van gewicht, huidvriendelijk en waterafstotend.
3. **Twee zijpanelen.** Aan beide zijden één paneel met één rits voor een makkelijke toegang tot de patiënt.
4. **Bevestigingsring** om de handbediening van het bed aan te bevestigen
5. **Toegangspanelen aan het hoofdeinde (5a) en het voeteneinde (5b).** Bieden eenvoudig toegang tot het hoofd- en voeteneinde van het bed. De panelen zijn voorzien van één rits.
6. **Snelsluitingen.** Vergroten de veiligheid van de patiënt doordat de snelsluitingen aan de trekklipsjes van de ritsen kunnen worden bevestigd.
7. **Omtrekbescherming.** Functioneert als zachte zijrails voor tijdelijk gebruik tijdens het verlenen van zorg aan de patiënt. Deze dienen losgemaakt te worden als de zijpanelen zijn gesloten.
8. **Beschermingsmateriaal van schuim.** Het frame waaraan de tent is bevestigd, is voorzien van tien beschermende schuimdelen om het risico op verwondingen na contact met het frame te verminderen.
9. **Klittenband.** Bevestig de zijpanelen aan het bovenste paneel van de tent wanneer de zijpanelen zijn geopend.
10. **Drainageopeningen.** De tent bevat aan beide zijden van het voeteneinde een opening waardoor infusen en lijnen naar de binnenzijde gevoerd kunnen worden.
11. **Opbergzakje voor instructies.** In het opbergzakje kunt u alle producthandleidingen etc bewaren
12. **Vergrendelbare zwenkwielen.**
13. **Drainageopeningen.** Zie boven.
14. **CPR hendels.** De ontgrendelingshendels bevinden zich aan weerszijden van het bed.
15. **Reserveaccu.** De reserveaccu biedt noodstroom, zodat het bed kan worden veresteld in noodgevallen.

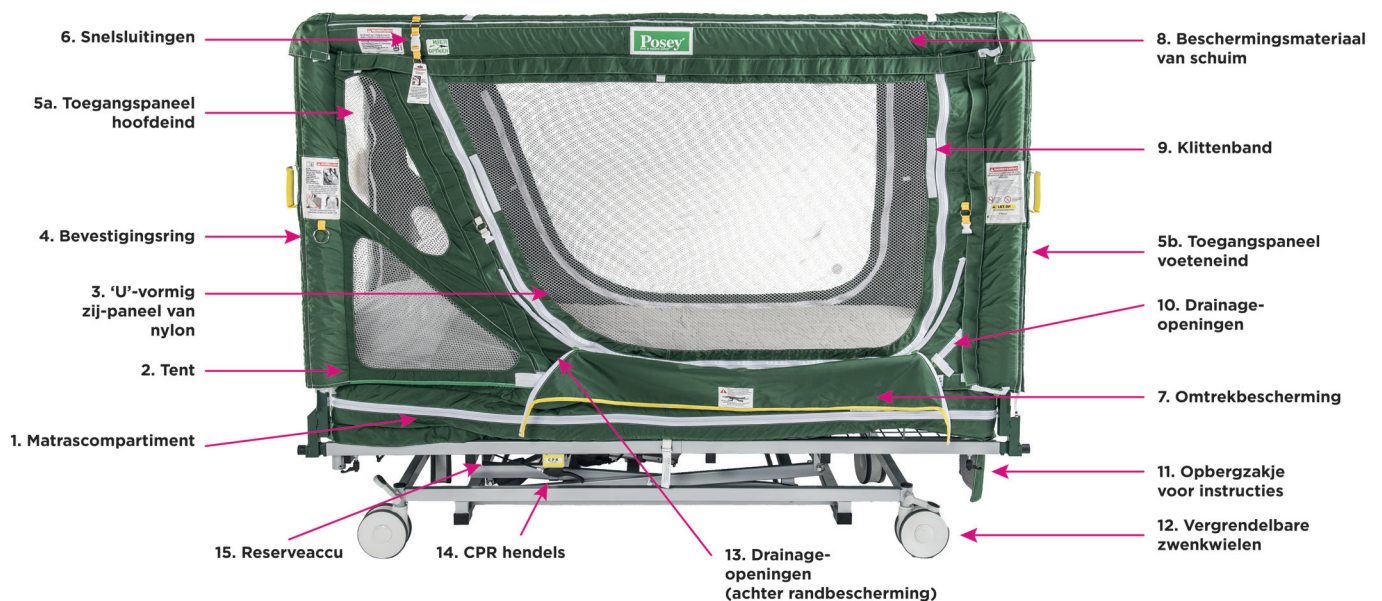

5. Aandachtspunten bij gebruik van het Posey tentbed



Het Posey tentbed is een vrijheidsbeperkende maatregel. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor andere vrijheidsbeperkende maatregelen. Zie hiervoor ook het instellingsprotocol.

Het toepassen van vrijheidsbeperking is nooit 100% veilig, continue monitoring is een vereiste. Het gedrag van patiënten kan per seconde veranderen.

Laat geen rommel of voorwerpen in het bed achter die een risico vormen voor zelfverwonding of verstikking.

Controleer bij het verlaten van de kamer **ALTIJD** of:

- Het bed in de laagste stand staat;
- Het bed op de rem staat;
- Alle ritsen en gespen gesloten zijn;
- Het bedbedieningspaneel uitgeschakeld is.

5.1 Waarschuwing voor risico op **BEKNELLING** of verstikking voor bepaalde risicopatiënten



Wanneer het hoofdeinde van het Posey tentbed omhoog wordt gezet, ontstaan er ruimtes tussen het hoofdeinde en de tent. Deze plaatsen leveren een extreem risico van ernstig of dodelijk letsel door **VERSTRIKKING** van bepaalde risicopatiënten op.

5.2 Overige waarschuwingen

**WAARSCHUWING!**

Sluit het bed direct aan op het elektriciteitsnet - gebruik geen verlengsnoeren of losse contactdozen.

Open geen elektrische componenten.

Gebruik om veiligheidsredenen en elektromagnetische compatibiliteit alleen originele elektrische componenten die voor het betreffende verpleegbed zijn vrijgegeven. Anders kan het gevaar voor patiënten en verlies van bedfunctionaliteit veroorzaken.

Zorg ervoor dat er geen kabel is beschadigd, dat er geen lus in de kabels zit en dat ze niet beklemd raken door bewegende delen of componenten van andere apparaten.

Voer geen medische ingrepen uit op het verpleegbed.


Gebruik het verpleegbed niet in de buurt van apparaten die een hoog elektromagnetisch veld genereren.

6. Het gebruik van het Posey tentbed

6.1 Toegangspanelen

Het Posey tentbed is voorzien van vier toegangspanelen met ritsen: twee zijpanelen, een paneel aan het hoofdeinde en een paneel aan het voeteneinde. Elke rits is voorzien van een trekklipje waarmee u de rits kunt openen en sluiten en kan worden gesloten met een snelsluiting.

De zijpanelen kunnen volledig worden geopend, zodat u eenvoudig bij de patiënt kunt. Aan de bovenzijde zit klittenband, dit kunt u gebruiken om de zijpanelen omhoog te houden wanneer ze zijn geopend.

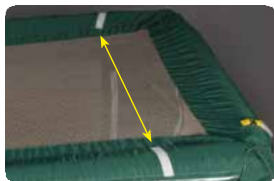


Afb. klittenband bovenzijde bed


De rits aan het toegangspaneel van het voeteneinde is voorzien van een dubbele runner om het geleidelijk afbouwen van de vrijheidsbeperking mogelijk te maken. Wanneer deze rits (gedeeltelijk) open wordt gelaten, kan de zorgvrager zelf het tentbed verlaten.




LET OP! Het open laten van een toegangspaneel kan risico's met zich mee brengen, er moet daarom weloverwogen besloten worden of dit bij de zorgvrager op een verantwoorde wijze mogelijk is.

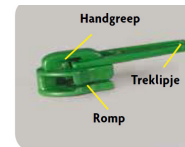

Afb. runner

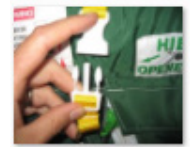


Afb. snelsluiting

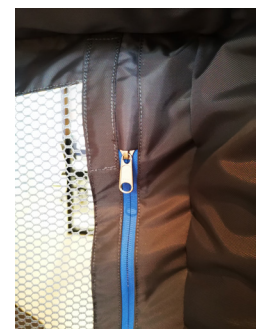

Afb. dubbele runner

6.2 Handbediening van het bed

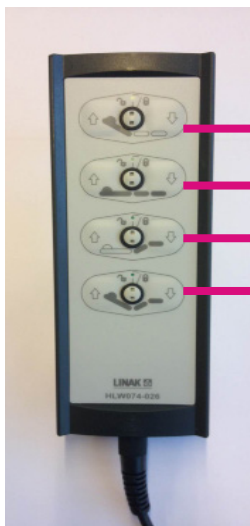


Verstelling rugsteun (omhoog of omlaag)

Hoogteverstelling van het ligvlak (omhoog of omlaag)

Verstelling beensteun (omhoog of omlaag)

Gelijktijdige verstelling van beensteun en rugsteun (omhoog of omlaag)

LET OP! Laat de handbediening **NOOIT** achter in de patiëntruimte wanneer de patiënt onbewaakt is.

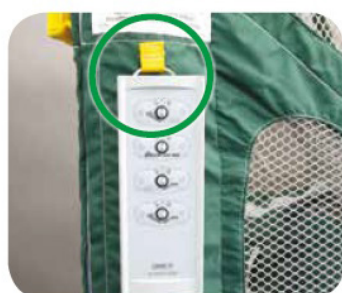

Het Posey tentbed is voorzien van een elektronische handbediening. U kunt het matras laten zakken tot een hoogte van 54 centimeter, zodat u de patiënt eenvoudig kunt verplaatsen naar het bed.

Ook moet u het bed in de laagste stand plaatsen wanneer de patiënt onbewaakt achterblijft. Bovendien kan het bed worden verhoogd tot een hoogte van 95 centimeter om het risico op rugklachten of verwondingen van de zorgverlener tijdens het verzorgen van de patiënt te verminderen.

Houd de bediening van het bed buiten het bereik van de patiënt. De beugel aan de achterzijde van de handbediening van het bed kan worden gebruikt om de handbediening aan de bevestigingsring te hangen.

Controleer vóór u de handbediening gebruikt of het bed is aangesloten op de stroom en of de handbediening onbeschadigd is.

U kunt elke verstelling afzonderlijk vergrendelen om te voorkomen dat het bed zonder toestemming versteld wordt (zie afbeelding).

Om een beweging van het bed te vergrendelen of ontgrendelen, heeft u de speciale sleutel nodig. Deze wordt bij het bed geleverd. Raadpleeg de pictogrammen op de bediening voor meer informatie. Wanneer een verstelling is ontgrendeld, ziet u een groene indicator boven het vergrendelingsmechanisme. Wanneer een verstelling is vergrendeld, ziet u een gele indicator. Neem contact op met Human Protection B.V. als u reservesleutels nodig heeft.

Wanneer de dijsteun is vastgezet, kan de onderbeensteun individueel worden versteld - er zijn twee stelratels die de onderbeensteun in positie vergrendelen. Om de onderbeensteun te verstellen, breng deze aan het voeteneinde handmatig omhoog tot de gewenste hoogte. De onderbeensteun klikt automatisch vast. Om de onderbeensteun te laten zakken, is het noodzakelijk om deze eerste helemaal omhoog te tillen tot het eindpunt, waarna u de onderste beensteun langzaam kunt laten zakken. Tevens wordt de onderbeensteun automatisch naar beneden gebracht wanneer u het de beensteun naar beneden brengt met de handbediening.



WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat de handbediening op de juiste manier is geplaatst en niet vastzit in het ligvlak of tussen het bed en andere objecten (bijv. meubilair).




Het verpleegbed heeft geen noodstop-schakelaar. Verwijder de stekker uit het stopcontact in een noodsituatie.

Het is van essentieel belang om na een maximale bedieningsperiode van 2 minuten, die niet mag worden overschreden, het verpleegbed ten minste 18 minuten niet te bedienen.

Het verpleegbed mag slechts door één persoon tegelijk worden bediend. Het is ten strengste verboden om alle knoppen op de handbediening tegelijkertijd in te drukken.



Plaats uw vingers niet tussen bewegende delen van het bedplatform - dit kan beknelling en letsel veroorzaken!

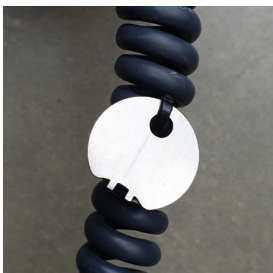

6.3 Vergrendelbare zwenkwielen

Het Posey tentbed is voorzien van vier vergrendelbare zwenkwielen. Vergrendel de zwenkwielen vóór u patiënten overplaatst, zodat het risico op ongewenste bewegingen van het bed wordt voorkomen.

Ontgrendel de zwenkwielen om het bed te verrijden (zie afbeelding links). Draai de zwenkwielen richting de matrassteun onder het bed en druk vervolgens aan het hoofdeinde van het bed met uw voet op de rem om de vier zwenkwielen te vergrendelen (zie afbeelding rechts). Druk de rem met uw voet omhoog om de zwenkwielen te ontgrendelen.




LET OP! Zorg dat u altijd alle zwenkwielen vergrendelt tijdens het verzorgen van de patiënt en tijdens het verplaatsen van patiënten van en naar het bed.

6.4 Tentriemen

LET OP! Bevestig beide riemen voor de tent aan de beweegbare BOVENdelen van het bedframe. Wanneer u de riemen aan een ander deel van het bedframe bevestigt, kan het matrascompartiment tijdens het verhogen of verlagen van het bed beschadigd raken.

Volg deze stappen:

1. Plaats de riem door een beweegbaar deel van het BOVENSTE bedframe.
2. Voer de riem door de metalen D-ring.
3. Voer de riem omlaag door de tweede metalen D-ring.
4. Trek aan de riem om deze vast te maken.
5. Herhaal deze stappen aan de andere zijde van het bed.

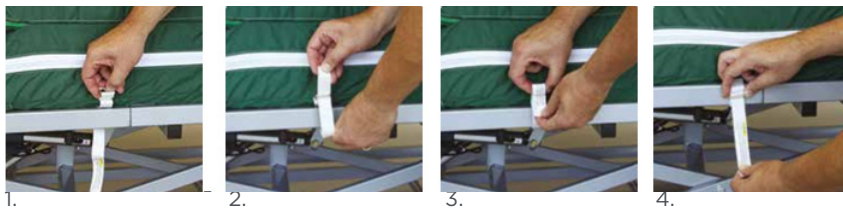

6.5 Comfortmatras en matrascompartiment

Het Posey tentbed is voorzien van een gesloten matrascompartiment. (zie afbeelding). Het compartiment biedt ruimte voor een matras met de volgende afmetingen: 90 cm x 200 cm x 12 cm.

Het matras heeft een incontinentiehoes met een rits. U dient deze hoes NIET te verwijderen. Het Posey tentbed is NIET geschikt voor luchtmatrassen.



LET OP! U kunt het risico op BEKNELLING of verstikking als volgt



minderen:



- Gebruik **NOOIT** een matras met andere afmetingen dan die waarvoor het compartiment werd ontworpen. Wanneer u een kleiner matras gebruikt, ontstaan er openingen tussen de tent en het matras. Wanneer u een groter matras gebruikt, wordt de stof uitgerekt, waardoor de rits beschadigd raakt;
- Open of sluit het matrascompartiment **NOOIT** wanneer het hoofdeinde of het kniegedeelte van het bed zich **OMHOOG** bevindt. Hierdoor kunnen de stof en de rits beschadigd raken;
- Gebruik geen matras dat lager is dan twaalf centimeter;
- Plaats **NOOIT** een ander matras dan het door Human Protection B.V. meegeleverde opdekmatras (max. 5 cm hoog, 90 x 200 cm) in de patiëntruimte.

6.6 Opdekmatras

Op het matrascompartiment en dus in de patiëntruimte ligt een dun opdekmatrasje.

Plaats **NOOIT** een andere matras, dan het Human Protection 5cm opdekmatras, in de patiëntruimte van het tentbed, dit kan leiden tot verstikking.

Dit opdekmatrasje kan gebruikt worden om het bed op te maken.



6.7 Transporthandgrepen

Wanneer u het bed van de ene locatie naar de andere verplaatst, dient u de transporthandgrepen te gebruiken. Voordat het verpleegbed wordt verplaatst, dienen de volgende veiligheidsregels in acht te worden genomen:

- Het ligvlak dient in vlakke en horizontale positie te staan;
- Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en bevestig deze aan het daarvoor bestemde klittenband van de tent;
- Controleer de technische staat van de wielen;
- Zorg ervoor dat het ligvlak zich in de laagste positie bevindt;
- Ontgrendel de centrale beremming van de wielen.

Na het verplaatsen:

- Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact;
- Het netsnoer moet uit de buurt blijven van bewegende delen van het verpleegbed, tijdens gebruik en transport.

Voorbeelden van gebruikstoepassingen zijn: het laden en lossen uit een transportvoertuig, het vervoeren van het bed vanuit de opslagruimte van het ziekenhuis naar de patiëntruimte en het verplaatsen van het bed van de ene ruimte naar de andere.

U vindt de eenvoudig herkenbare gele handgrepen op alle hoeken van het bed.

U kunt de hoogte van de handgrepen aanpassen door de hoogte van het bed aan te passen. Gebruik hiervoor de handbediening.

U kunt het bed al duwend of trekkend verplaatsen.


6.8 Snelsluitingen

Iedere rits bevat een snelsluiting. Duw de twee zijden samen en trek aan de clip om de snelsluitingen te openen. Duw de twee zijden om de snelsluitingen te sluiten. U hoort een klikje wanneer de sluitingen zijn gesloten. De snelsluitingen vormen een extra beveiliging om te voorkomen dat de patiënt het tentbed zelf open krijgt.

Trek **ALTIJD** aan de clip nadat u de snelsluiting gesloten hebt om te controleren of de snelsluiting daadwerkelijk dicht is (zie afbeelding).

Beschadigde of niet werkende snelsluitingen dienen onmiddellijk te worden vervangen!


Belt u daarvoor met Human Protection B.V. via telnr. **+31 (0)13-536 38 07**.

 **WAARSCHUWING!** Controleer vóór u het bed verlaat of de snelsluitingen op alle toegangspanelen van het Posey tentbed veilig zijn gesloten. Wanneer u dit niet doet, kan de patiënt vallen of het bed zonder begeleiding verlaten. Dat kan ernstige verwondingen tot gevolg hebben.

6.9 Drainage- en slang openingen

Maak de rits van een opening los en voer een infuus of lijn door de opening naar de patiëntruimte. Sluit de rits van de opening daarna.

- Controleer of de lijn is aangesloten en kijk of de rits zo ver mogelijk is gesloten. Zorg dat de doorvoer in de lijn niet wordt belemmerd.
- Voer **NOOIT** een infuus of lijn door het gaas heen. Gebruik **ALTIJD** de openingen voor de lijnen (zie afbeelding boven).
- Controleer tijdens het omhoog brengen en laten zakken van het bed of de lijnen niet klem zitten.

 **WAARSCHUWING!** Zorg dat alle ritsen helemaal zijn gesloten wanneer de openingen niet gebruikt worden. Hiermee voorkomt u dat patiënten een opening heeft waardoor een hand of voet past. Laat een ongebruikte opening **NOOIT** geopend achter als de patiënt onbewaakt wordt achtergelaten.




6.10 Ritsen en treklijpjes


- Inspecteer de ritsen op bobbelen of foutieve uitlijning. Test of alle ritsen makkelijk geopend en veilig gesloten kunnen worden en of er geen ruimtes of openingen zijn wanneer druk op de rits wordt toegepast.
- Wanneer een runner is beschadigd (zie afbeelding hieronder), kan de rits niet goed meer worden gesloten.



Onbeschadigde runner

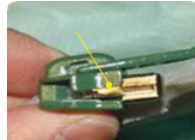

Beschadigde runner

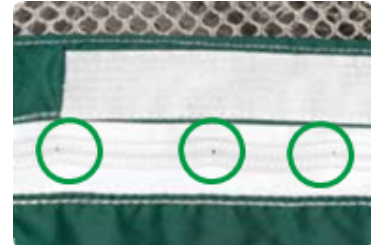

- Gebruik **ALTIJD** de treklijpjes van de ritsen om panelen te openen en te sluiten.
Trek de panelen NOOIT open: daardoor kunnen het stof en de ritsen beschadigd raken .
- Gebruik het bed **NOOIT** wanneer een runner is opengebogen of wanneer het treklijpje ontbreekt of is gebroken.
Bel voor reparaties met Human Protection B.V. via telnr. +31 (0)13-536 38 07.
- Gebruik het bed **NOOIT** wanneer een rits beschadigd of onjuist gesloten is.

 **WAARSCHUWING!** Verlaat het bed van de patiënt **NOOIT** als niet alle ritsen van de panelen goed zijn gesloten. Test **ALTIJD** alle ritsen over de gehele lengte door op het paneel naast de rits te duwen. Zo kunt u controleren of ze goed zijn gesloten en of het toegangspaneel niet onder druk wordt geopend.

6.11 Het omlaag brengen van de rugsteun in noodsituaties

In een noodsituatie, wanneer de netspanning is onderbroken of wanneer elektrische componenten zijn uitgevallen, kan de rugsteun handmatig worden verlaagd door de speciale bouten te verwijderen waarmee de rugsteunmotor onder het ligvlak is bevestigd of door één van de CPR-handgrepen te gebruiken die aan beide zijden van het bed zijn aangebracht.

 **WAARSCHUWING!** Het negeren van deze veiligheidsrichtlijnen en -instructies kan leiden tot ernstig letsel, waaronder rugletsel en letsel door beknelling van de handen.

LET OP!

Handmatige nooddaling mag enkel door ten minste twee personen worden uitgevoerd.

Wij raden aan om de handmatige nooddaling van de rugleuning te oefenen onder normale omstandigheden, zodat u in geval van nood snel en correct kunt reageren.

6.10.1 Handmatige nooddaalfunctie

Het handmatig omlaagbrengen van de rugsteun moet in deze volgorde gebeuren:

1. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact;
2. Verlicht de belasting van de rugsteun;
3. De eerste persoon moet de rugsteun van het ligvlak iets optillen en in die positie houden;
4. Op dat moment moet de tweede persoon de speciale bout verwijderen door de borgveer te openen en de bout uit het gat te trekken;
5. Vervolgens kan de eerste persoon de rugsteun voorzichtig in de vlakke positie laten zakken.

Om het bed weer in zijn normale bedrijfstoestand terug te brengen, moet de speciale bout opnieuw worden gemonteerd en met de borgveer worden vastgezet. Vervolgens is de motor van de rugsteun weer correct gemonteerd en klaar voor gebruik.

6.10.2 CPR nooddaalfunctie

Met de CPR-handgrepen kan het verplegend personeel het ruggedeelte onmiddellijk vanuit elke hoek in een volledige vlakke positie laten zakken om belangrijke tijd te besparen in kritieke situaties. CPR-handgrepen bevinden zich aan beide zijden van het verpleegbed en het is voldoende om slechts één handgreep in te drukken om het de rugsteun te laten zakken wanneer dat nodig is.

**LET OP!**

Wanneer de hendel wordt gebruikt terwijl het hoofdeinde omhoog of omlaag wordt gebracht via de handbediening, zal het aandrijfmechanisme blokkeren. Dat heeft geen gevolgen voor de handmatige ontgrendeling maar wel voor de elektronische bediening.

Druk op de knop "Hoofdeinde laten zakken" op de handbediening (zie "Werking van de bediening van het bed") tot de aandrijving weer wordt ingeschakeld. Wanneer u op de knop "Voeteneinde laten zakken" op de handbediening drukt, beweegt het aandrijfmechanisme naar binnen, waardoor u het mechanisme weer kunt inschakelen.

6.12 Reserveaccu

Er is een Linak BA18 of BA19-accu aanwezig. Deze reserveaccu biedt noodstroom, zodat het bed kan worden bediend in noodgevallen. De accu bevindt zich onder het platform, ter hoogte van het hoofdeinde.

Steek de stekker van het bed in het stopcontact om de accu op te laden. De accu wordt alleen geladen wanneer de schakelkast is aangesloten op een externe voedingsbron. Het bed **moet** dus zijn verbonden met een stopcontact. De accu kan niet worden opgeladen met een externe oplader.

LET OP!

U hoort een constante pieptoon wanneer de accu leegraakt. Er is dan nog circa 19 V +/- 5% aanwezig. Om de best mogelijke acculevensduur te handhaven, dient u de accu direct op te laden zodra hij leegraakt.

Wanneer de accu een kritiek niveau bereikt, wordt het hele bedieningssysteem uitgeschakeld. Er is dan nog circa 17,5 V +/- 5% aanwezig. Wanneer u het bed in deze kritieke toestand probeert te bedienen, kan het aandrijfmechanisme beschadigd raken.

U dient de accu, voor u hem voor het eerst gebruikt, 24 uur op te laden, zodat hij goed functioneert voor een zo lang mogelijke levensduur. De accu gaat het langst mee wanneer hij volledig opgeladen blijft.



6.13 Het openen van de tent bij calamiteiten

Probeer bij calamiteiten altijd eerst de tent te openen op de normale wijze, door middel van de rits van het zijpaneel. Mocht deze rits weigeren dan kunt u uitwijken naar één van de andere zijpanelen. Mochten de andere zijpanelen moeilijk bereikbaar zijn of mochten ook deze ritsen weigeren, dan kunt u een (verband)schaar gebruiken om het gaas van het Posey tentbed kapot te knippen.

6.14 Omtrekbescherming



Het Posey tentbed is aan weerszijden van de patiëntruimte voorzien van omtrekbescherming van nylon (zie afbeelding).

De omtrekbescherming vormt een **tijdelijke** zijbeveiliging die alleen is bedoeld om de kans op het vallen van patiënten te verminderen als het zijpaneel wordt geopend **tijdens het verzorgen** van de patiënt.

Rits de opstaande rand (omtrekbescherming, zie rode pijlen) omhoog tijdens de verzorging van de patiënt, wanneer het toegangspaneel is geopend.



LET OP!

Nalatigheid in deze kan leiden tot letsel van de patiënt!!!

Houd de patiënt goed in de gaten en laat een patiënt **NOOIT** onbewaakt achter wanneer er een toegangspaneel is geopend en wanneer de omtrekbescherming wordt gebruikt. Ook met de omtrekbescherming **KAN** een patiënt uit bed vallen.

Controleer, als de toegangspanelen zijn gesloten en de patiënt zich in bed bevindt, of beide omtrekbeschermingen om laag hangen en los zijn. U moet in een noodgeval altijd snel bij de patiënt kunnen.

Op het moment dat het toegangspaneel weer wordt gesloten dient de omtrekbescherming weer omlaag geritst te worden.

7. Transfers

7.1 Transfer naar het Posey tentbed

Help de patiënt in en uit het bed. Praat vriendelijk en vertel de patiënt dat het Posey tentbed voor zijn of haar eigen bescherming is. Zet muziek aan of schakel de tv in om verveling te voorkomen. Laat de patiënt niet alleen achter tenzij u zeker weet dat de patiënt veilig is, zich comfortabel voelt en goed op het Posey tentbed reageert.

Voor veilige transfer naar en verzorging van patiënten in het Posey tentbed dient rekening te worden gehouden met een aantal factoren, waaronder de omvang, medische toestand, beperking en mobiliteit van de patiënt.

De transfer naar het Posey tentbed is anders voor patiënten die kunnen staan dan voor patiënten die naar of van het bed moeten worden getild.

LET OP! Gebruik alleen een tillift om patiënten over te verplaatsen, als er is gecontroleerd of er genoeg ruimte onder het frame van het Posey tentbed is om de lift veilig te gebruiken.

De afmetingen van het toegangspaneel aan de openingszijde zijn 97 x 117 (H x B), zie de afbeelding hieronder.

Zorg dat u het beleid van uw instelling, het zorgplan en de medische verklaring opvolgt, zodat u aan de specifieke behoeften van iedere afzonderlijke patiënt voldoet.

1. Controleer de ruimte rondom het bed op struikelgevaaren. Zorg dat u de overdracht veilig en eenvoudig kunt uitvoeren.
2. Controleer of alle zwenkwielen zijn vergrendeld, zodat het risico op ongewenste bewegingen van het bed wordt voorkomen. Druk de rem omlaag om de zwenkwielen te vergrendelen.
3. Zorg dat het bed vlak is. Het Posey tentbed kan tot 95 cm worden verhoogd om het verplaatsen van patiënten te vergemakkelijken.
4. Maak de snelsluitingen los en rits het zijpaneel los, zodat de patiënt in bed kan. Maak het paneel met behulp van de klittenband vast aan de bovenzijde van de tent.
5. U kunt de patiënt nu naar een veilige positie op het matras verplaatsen. Afhankelijk van de omvang en het gewicht van de patiënt dient u wellicht extra personen in te schakelen.
6. Praat vriendelijk en vertel de patiënt dat het Posey tentbed voor zijn of haar eigen bescherming is.
7. Als de medische verklaring of het Zorgplan van de patiënt infuuslijnen, drainages of bewakingslijnen of een oproepknop voorschrijft, dient u deze op de juiste wijze aan te sluiten via de ingebouwde opening(en).



WAARSCHUWING!



Als lijnen of infusen worden gebruikt, bij geagiteerde of agressieve patiënten dan dient het gebruik van het Posey tentbed te worden goedgekeurd door de arts of door het MEDISCH TEAM.



Er is een risico op ernstige verwondingen wanneer de patiënt verstrengeld raakt of wanneer de patiënt een infuus of bewakingslijn kapot trekt. Raadpleeg de arts, het zorgplan, het MEDISCH TEAM of het beleid van de instelling over instructies voor extra bewaking van een dergelijke patiënt;

8. Maak, wanneer u klaar bent om de tent te sluiten, het zijpaneel aan de bovenzijde van de tent los door het klittenband los te maken. Sluit het zijpaneel met behulp van de trekklipjes aan de ritsen. Maak de runner vast met de snelsluiting. Test alle ritsen over de gehele lengte. Dit doet u door op het paneel naast de rits te duwen en te controleren of ze goed zijn gesloten. Daarnaast checkt u of het toegangspaneel niet onder druk kan worden geopend.
9. Lees en volg alle stappen in de checklist "11 belangrijke controlepunten" op pagina 10 en zorg dat het bed zich in de laagste stand bevindt vóór u de patiënt onbewaakt achterlaat.

7.2 Toegang voor de zorgverlener

LET OP! Als u aan de hoofdzijde van de patiënt de tent open wilt ritsen, controleert u eerst of het matras VLAK ligt en of de patiënt zich op een veilige afstand van het paneel bevindt.

1. Controleer de ruimte rondom het bed op struikelgevaaren.
2. Controleer of alle zwenkwielen zijn vergrendeld, zodat het risico op ongewenste bewegingen van het bed wordt voorkomen. Druk de rem omlaag om de zwenkwielen te vergrendelen.
3. Maak de snelsluitingen los en open het zijpaneel om toegang tot het bed te krijgen. Controleer of de patiënt zich in een veilige positie bevindt en of hij/zij niet kan vallen.
4. Maak het paneel met behulp van de klittenband vast aan de bovenzijde van de tent.
5. Maak de omtrekbescherming van het geopende zijpaneel ALTIJD met behulp van de ritsen en snelsluitingen aan de bovenzijde vast wanneer u zorg aan de patiënt verleent. Houd de patiënt goed in de gaten en laat een patiënt NOOIT onbewaakt achter wanneer de omtrekbescherming wordt gebruikt of wanneer de tent is geopend.
6. Controleer of de patiënt niet het risico loopt om uit bed te vallen wanneer u zorg aan de patiënt verleent en klaar bent om de tent te openen. Verplaats de patiënt voorzichtig naar een veilige positie op het matras.
7. Rits de omtrekbescherming los en laat deze zakken.
8. Sluit het toegangspaneel aan de zijkant en maak het vast met de snelsluiting. Controleer of het bed zich in de laagste positie bevindt.
9. Lees en volg vóór u de patiënt onbewaakt achterlaat alle stappen in de "11 belangrijke controlepunten" (zie pagina 10)

7.3 Transfer vanuit het Posey tentbed

1. Controleer de ruimte rondom het bed op struikelgevaaren. Zorg dat u de overdracht veilig en eenvoudig kunt uitvoeren.
2. Zorg dat het bed in de VLAKKE/HORIZONTALE positie is. Het Posey tentbed kan tot 95 cm worden verhoogd om het verplaatsen van patiënten te vereenvoudigen. Vergrendel ALTIJD de remmen van alle vier de zwenkwielen
3. Maak de snelsluitingen los en open het zijpaneel om toegang tot het bed te krijgen. Controleer of de patiënt zich in een veilige positie bevindt en of hij/zij niet kan vallen.
4. Maak het paneel met behulp van het klittenband vast aan de bovenzijde van de tent.
5. Help de patiënt in een zittende positie. Help de patiënt zo nodig om beide benen naar de rand van het bed te verplaatsen en om te gaan zitten. Let op: liggende patiënten kunnen last hebben van evenwichtsproblemen. Wees dus voorbereid en zorg dat u steun kunt bieden.
6. Pas deze stappen zo nodig aan om patiënten die uit het bed getild moeten worden veiliger te verplaatsen. Afhankelijk van de omvang en het gewicht van de patiënt dient u wellicht extra personen in te schakelen om de patiënt veilig te verplaatsen. Raadpleeg het beleid van uw instelling voor het veilig verplaatsen van patiënten.

7.4 Hulp aan patiënten in noodgevallen

Maak de snelsluitingen los en rits het zijpaneel open om de patiënt snel uit het bed te helpen. Wanneer de rits van het zijpaneel weigert, en de ritsen van de drie andere panelen moeilijk bereikbaar zijn of ook weigeren, kunt u in noodgevallen een (verband) schaar gebruiken om het gaas kapot te knippen.

Een voorbeeld reanimatieprotocol is op aanvraag verkrijgbaar bij Human Protection B.V.

Aangezien het beleid en de handelswijze bij reanimatie verschilt per instelling of ziekenhuis dient het reanimatieprotocol hierop afgestemd te worden!

7.5 Welke typen tilliften gebruiken in combinatie met het Posey tentbed?

Niet iedere tillift is geschikt voor het gebruik in combinatie met het Posey tentbed. In combinatie met het Posey tentbed kunnen de volgende tilliften worden gebruikt. Zowel het aanschaffen als het huren van een tillift is mogelijk bij Human Protection B.V., vraag informatie via **+31 (0)13-536 38 07**.

Actieve lift:

- Joerns Journey.

Passieve lift:

- Joerns Oxford Advance Pro met gebruik van een plat mechanisch vierpunts-juk.
- Arjo Huntleigh Maxi Twin Compact

8. Reinigingsinstructies voor het Posey tentbed

Het Posey tentbed kan gereinigd worden volgens de WIP richtlijnen voor infectiepreventie.



LET OP! Voor reiniging:

- Haal de stekker uit de wandcontactdoos voordat het onderstel wordt gereinigd.
- Het bedieningspaneel en de motoren mogen niet met warmte of stoom worden gesteriliseerd.
- Het bedieningspaneel en de motoren niet onderdompelen in water.

8.1 Reiniging

Voor het reinigen van onderstel, tent en matrassen, neem deze af met een schone doek met een allesreiniger opgelost in water (dosering op verpakking aanhouden) of met een met water bevochtigde microvezeldoek. Gebruik geen schurende middelen op de tent. Na reiniging droogvegen met een schone, droge doek.

8.2 Desinfectie

Desinfectie is alleen noodzakelijk bij verontreiniging van onderstel, tent en matrassen indien deze verontreinigd zijn met bloed of ander lichaamsvocht of bij een einddesinfectie bij een patiënt met een besmettelijke ziekte waarvoor desinfectie geïndiceerd is (o.a. Norovirus en bijzonder resistente micro-organismen).

- Bloed en ander lichaamsvocht moet grondig van alle oppervlakken worden verwijderd voordat er desinfecterende middelen worden aangebracht.
- Breng een CTGB goedgekeurd desinfecterend middel aan op de oppervlakken van onderstel, tent en matras. Volg de instructies van het betreffende desinfecterende middel. De contacttijd van de oplossing zorgt voor de efficiëntie van de ontsmetting.
- Veeg het onderstel, tent en matrassen af met een schone, droge doek om een teveel aan desinfecterend middel te verwijderen.

Vervang het matras en de incontinetiehoes zo nodig. Volg de instructies op pagina 28 om de matras te verwijderen wanneer het zeer vervuild is. (BIOGEVAAR).



LET OP! Verwijder het schuimmatras NIET uit de hoes om het te reinigen of te desinfecteren. Reinig de schuimrollen van het frame NIET. Hierdoor raakt het schuim beschadigd, waardoor het onbruikbaar wordt. De schuimrollen zijn los verkrijgbaar bij Human Protection B.V. Bel met +31 (0)13-536 38 07.

8.3 Voorbereiding op wasbeurt tent

1. Verwijder al het afval uit het Posey tentbed;
2. Verwijder alle documenten uit het opbergzakje aan het voeteneinde van het bed;
3. Verwijder de bediening van het bed van de tent;
4. Verwijder de comfortmatras uit het matrascompartiment;
5. Verwijder de opdekmatras uit de tent;
6. Verwijder de tent;

8.4 De tent uitwassen

LET OP! Was de tent bij een patiëntwissel **ALTIJD** uit. Reinig of desinfecteer dan meteen het onderstel en de matrassen. Zo voorkomt u infecties en de overdracht van micro-organismen.

Zorg ervoor dat al de ritsen en klittenbanden gesloten zijn om beschadiging van de tent tijdens het wasproces te voorkomen.

De tent van het Posey tentbed kan gewassen worden op een temperatuur van maximaal 30°C, om krimp en slijtage tegen te gaan. Gebruik van een bacteriedodend wasmiddel wordt hierbij sterk aangeraden.

Gebruik een wasmachine met extra grote capaciteit (minimaal 18 kg). Was één tent per keer, met maximaal 50% machinebelading en een hoog waterniveau. Centrifugeer op maximaal 500 toeren. Wanneer de wascyclus is afgelopen, verwijder de tent direct uit de machine en verzeker u ervan dat alle water uit de lading is verdwenen. Droog de tent aan de lucht. Controleer of de tent volledig droog is voor deze weer in gebruik wordt genomen.



Human Protection B.V. kan de bewassing van de tent voor u uitvoeren, volgens een speciaal voor dit doeleind ingericht wasproces. Neem contact op met Human Protection B.V. via +31 (0)13-536 38 07 voor meer informatie.

LET OP! De tent van het Posey tentbed moet gecontroleerd worden op scheuren, gaatjes en overmatige slijtage telkens nadat deze gereinigd is. Beschadigde delen moeten worden gerepareerd of vervangen. Bel hiervoor met Human Protection B.V. via tel nr +31 (0)13-5363807.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen omtrent wassen

- Gebruik **NOOIT** bleekmiddelen, agressieve reinigingsmiddelen of oplosmiddelen. Deze producten kunnen ertoe leiden dat de achterzijde van de stof loslaat, waardoor de waterafstotende eigenschap van de stof verloren gaat;
- Voorkom beschadiging van de stof en gebruik alleen wasmiddelen die bedoeld zijn voor wasmachines. Zorg ervoor dat alle ritsen en het klittenband gesloten zijn, om beschadigingen aan de tent te voorkomen;
- Teveel warmte kan ertoe leiden dat de achterzijde van de stof loslaat, waardoor de waterafstotende eigenschap van de stof verloren gaat;
- Beoordeel wekelijks alle klittenbanden op vuil. Ga met een stevige borstel over het klittenband om vuil te verwijderen;
- Schokgevaar: verwijder het snoer uit het de wandcontactdoos voor u het bedframe reinigt.



8.5 De tent bevestigen na het uitwassen

LET OP! Geadviseerd wordt om de tent altijd met 2 personen aan het frame te bevestigen.

1. Leg de tent over het bed, en zorg dat de opbergruimte voor de instructies zich aan het voeteneinde van het bed bevindt.
2. Maak alle ritsen voor de bovenste rails (aan de lange en korte zijden) los.
3. Begin aan een lange zijde en wikkel het gedeelte voor de bovenste rail om het schuim. Trek daarna de tentonderdelen naar elkaar toe en doe de rits dicht. Herhaal deze stap aan de tegenoverliggende lange zijde.



LET OP! Zorg dat de tanden van de rits goed zijn gepositioneerd. Wanneer de tanden niet goed zijn gepositioneerd, kan de rits niet goed worden gesloten. Dit kan erin resulteren dat de patiënt onbegeleid het bed kan verlaten en gewond kan raken.

Trek de stof tijdens het dichtritsen van alle panelen goed naar elkaar toe om beschadiging van de ritsen of van de stof te voorkomen.

4. Rits alle vier hoekpoten los.
5. Rits de twee korte zijdes aan bovenzijde dicht.
6. Wikkel de tent bij alle hoekpoten om het schuim. Trek daarna de tentonderdelen naar elkaar toe en doe de rits dicht. Zorg dat de tanden van de rits goed sluiten. Gebruik het klittenband om de hoeken af te dekken. Herhaal de stap aan alle vier de zijden tot alle hoekpoten om het schuim van de tent zijn bevestigd.
7. Open de rits van het matrascompartiment, plaats de comfortmatras (afm. 90x200x12cm), en sluit de rits.
8. Plaats de opdekmatras (afm. 90x200x5cm) in de tent.
9. Bevestig het netsnoer aan het daarvoor bestemde klittenband aan het hoofdeinde.
10. Bevestig de handbediening aan de daarvoor bestemde ring aan de tent.
11. Plaats de gebruiksaanwijzing in de opbergruimte voor instructies aan het voeteneinde van het bed.

Het Posey tentbed is nu klaar voor gebruik.

9. Onderhoud en reparatie

9.1 Service- en onderhoudscontractvormen

U heeft bij Human Protection B.V. diverse opties tot onderhoud en reparatie tijdens en na de garantieperiode. Hieronder volgen de mogelijkheden.

- 1) U verricht het onderhoud en de reparaties zelf. Na de garantieperiode (en alleen bij goed gebruik) is Human Protection B.V. niet aansprakelijk voor incidenten die voortvallen en waarbij letsel en/of schade is ontstaan.
- 2) U kiest voor een onderhoudscontract op het complete tentbed dat wordt verzorgd door Human Protection B.V. Indien u hierover vragen heeft of overweegt een contract af te sluiten, neem contact op via +31 (0)13-536 38 07.

LET OP! Controle tent en frame

Het Posey tentbed dient door uw onderhoudsafdeling te worden geïnspecteerd wanneer de tent is verwijderd om te worden uitgewassen. Ook dient minstens eens per maand of na iedere patiëntwissel te worden gecontroleerd of de tent en het frame intact zijn en veilig kunnen worden gebruikt.

Hebt u vragen over de staat van het Posey tentbed? Neem dan contact op met Human Protection B.V. via telnr. **+31 (0)13-536 38 07**

9.2 Technische service

Reparatie van tenten

Reinig de tent en sluit alle ritsen om beschadigingen tijdens de verzending te voorkomen.

Reparatie onder de garantie

Stuur het product schoon naar Human Protection B.V.*
Vergeet niet om het aankoopbewijs met daarop de aankoopdatum mee te sturen.

** Tenten die verontreinigd worden ontvangen, worden gereinigd en de kosten daarvan worden aan u doorberekend alvorens wij de tent inspecteren en een offerte maken voor de reparatie/herstelwerkzaamheden.*










Reparatie buiten de garantie

1. Stuur het product schoon naar Human Protection B.V.
2. Wij maken een offerte voor reparatie per product.
3. Na goedkeuring van de offerte wordt de reparatie door ons atelier uitgevoerd.

LET OP! Human Protection B.V. biedt een 24uurs reparatieservice inclusief weekend/feestdagen met de mogelijkheid tot een vervangende Posey bedtent. Indien u hier gebruik van wilt maken of hier vragen over heeft, neem contact op via +31 (0)13-536 38 07.

9.3 Maandelijks visuele inspectie

Controleert u maandelijks of na elke patientwissel de volgende punten:

		Foto	Schoon?		Goedgekeurd?	
Tent: barcode	Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is.		nvt	nvt	Ja	Nee
Tent: groen doek (nylon)	Binnen- en buitenkant en bedbodem controleren op beschadiging, vlekken en vieze geurtjes. Losse draden en rafels indien aanwezig afknippen.		Ja	Nee	Ja	Nee
Tent: gaas	Binnen- en buitenkant van alle gaasdelen goed controleren op gaatjes, vooral aan de randen.		Ja	Nee	Ja	Nee
Tent: ritsen en runners	Goed controleren op defecten, met name de runners. Alle ritsen sluiten, ook achter klittenband.		Ja	Nee	Ja	Nee
Tent: klittenband	Klittenbanden mogen geen pluisjes en draden bevatten. Klittenbanden zijn aanwezig op dak (4x), op afdekkapjes hoeken (4x) en rondom de twee zijpanelen.		Ja	Nee	Ja	Nee
Tent: snelsluitingen	Controleren op aanwezigheid (8x) en defecten. Alle kliksluitingen sluiten.		Ja	Nee	Ja	Nee
Tent: algemeen	Controleer groene tentdoek en gele onderdelen op verkleuring in vergelijking met originele kleur. Indien verkleuring duidelijk aanwezig is, contact opnemen met Human Protection.		nvt	nvt	ja	nee
Opdekmatras (blauw/zwart)	Controleren op vlekken, bobbelen en vieze geurtjes.		Ja	Nee	Ja	Nee
Comfort matras (blauw)	Controleren op vlekken en vieze geurtjes.		Ja	Nee	Ja	Nee
Controle plaatsing tent op onderstel	Controleren of de tent op de juiste wijze op het onderstel is geplaatst: hoofdeind tent aan hoofdeind onderstel. Zie label op tent en sticker op onderstel.		nvt	nvt	Ja	Nee
Gebruiks-aanwijzing	Controleren of deze aanwezig zijn: -Gebruikershandleiding -Beknopte nalooplijst -Bij Elbur, ontgrendelingsleutel		Ja	Nee	Ja	Nee

9.4 Inspectieplan PB526II onderstel

9.4.1 Inspectieplan

LET OP!

Alleen speciaal opgeleide technici mogen probleemoplossingsactiviteiten uitvoeren en afzonderlijke elektrische componenten vervangen.

Gebruik tijdens het onderhoud het inspectieprotocol (zie bijlage 1) en documenteer deze technische veiligheidscontrole. Het technische veiligheidsinspectie dient ten minste eenmaal per jaar plaats te vinden en na elk hergebruik op een nieuwe locatie.

Neem contact op met de fabrikant of distributeur wanneer reparaties of reserveonderdelen nodig zijn.

Wanneer schade of storing wordt vermoed, staak dan direct de inzet, haal de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat het bed niet opnieuw kan worden ingezet totdat reparatie heeft plaatsgevonden.

Het is verplicht om regelmatig inspecties uit te voeren om de veilige staat van het verpleegbed te waarborgen:

- Eerste inspectie - vóór het eerste gebruik;
- Herhalingsinspectie - niet minder dan eenmaal per jaar en vóór elk hergebruik;
- Service-inspectie - na elke reparatie moet een inspectie worden uitgevoerd.

Voor de inspectie van het verpleegbed kunt u het inspectieprotocol (Bijlage 1) gebruiken.

9.5 Opslag en gebruik

- Het Posey tentbed wordt compleet gemonteerd geleverd. In de technische specificaties vanaf p. 33 worden de aanbevolen gebruik- en opslagcondities aangegeven.
- Dit hulpmiddel werd ontwikkeld voor gebruik in normale binnenomgevingen.
- Dit hulpmiddel kan worden opgeslagen in magazijnen met een gewone omgevingstemperatuur en normale luchtvochtigheid. Vermijd hoge vochtgehaltenes en overmatig vocht: hierdoor kunnen de productmaterialen beschadigd worden.

9.6 Verwachte levensduur van het Posey tentbed

Bij gemiddeld gebruik bedraagt de verwachte levensduur van het Posey tentbed bij reiniging en onderhoud volgens deze gebruiksaanwijzing 5 jaar of 50 wassingen.

Volg **ALTIJD** de Reinigingsinstructies op pagina 24-25 om de **levensduur van het bed te optimaliseren**. Wanneer een onderdeel tijdens het gebruik ervan niet goed functioneert, dient u het bed **ONMIDDELLIJK** buiten gebruik te stellen. Bel daarna Human Protection op **+31 (0)13-536 38 07** voor een vervangend exemplaar, ook te huur per dag (via het noodnummer **+31 (0)13-523 42 86** kan dit 24/7 en ook op zaterdag, zon- of feestdagen) of voor reparatie.



WAARSCHUWING! Gebruik het Posey tentbed **NOOIT** wanneer het tentframe is beschadigd als de ritsen niet gemakkelijk geopend of goed gesloten kunnen worden, als het frame is gebogen of beschadigd, als het frame niet goed aan het bed is bevestigd of als onderdelen ontbreken. Verwijder de patiënt onmiddellijk uit het bed om ernstige verwondingen te voorkomen.

9.7 Instructies voor het veilig verwijderen van het hulpmiddel

Verwijdering van BIOGEVAARLIJK afval. Wanneer de stof of het beschermingsmateriaal van schuim of het matras van het Posey tentbed uiterst vervuild wordt met biogevaarlijke materialen, dient u de bewuste onderdelen te verwijderen overeenkomstig het beleid van uw instelling en overeenkomstig toepasselijke lokale, regionale, nationale of Europese regelgeving met betrekking tot BIOGEVAARLIJKE materialen.





9.8 Verwijdering

Het PB526II verpleegbed is gemaakt van metalen en kunststof onderdelen, elektrische componenten en elektrische kabels. Als het verpleegbed moet worden verwijderd, moeten kunststof en metalen onderdelen worden gerecycled volgens de wettelijke voorschriften. Elektrische componenten (handbediening, besturingseenheid, motoren etc.) van verpleegbedden worden beschouwd als elektrisch afval en moeten als zodanig worden verwijderd. Neem bij twijfel contact op met uw lokale afvalverwerkingsfaciliteit, de plaatselijke gemeenschap, uw distributeur of de fabrikant.

9.9 Gebruik van accessoires in combinatie met het Posey tentbed

De volgende accessoires zijn verkrijgbaar voor het Posey tentbed:

Artikelnummer	Omschrijving	Doel	Foto
MA-001	Comfortmatras 12cm	Basismatras voor in het compartiment van de tent (bij levering inbegrepen)	
MA-002	Opdekmatras 5cm traagschuim	Extra comfort voor de patiënt (bij levering inbegrepen)	
VI001	Reanimatieplank incl. hoes tbv bevestiging Posey tentbed	Creëren van een harde ondergrond t.b.v. de reanimatie	



LET OP! Gebruik alleen accessoires geadviseerd door Human Protection B.V. Andere producten kunnen een gevaar zijn voor de patiënt of het product.

9.10 Veelgestelde vragen/FAQ

Tent

1. **Vraag:** Waarom gaat de rits zo moeilijk open of dicht?

Antwoord: Dit kan meerdere redenen hebben:

- Er zit stof, beddengoed of ander materiaal in de rits vast. U kunt dit oplossen door de rits terug te trekken. Trek het lipje achteruit in de tegenovergestelde richting tot de rits weer vrij is. Controleer of de tent nog intact is en of er geen sprake is van slijtage of gaten in de stof.
- Controleer de tanden van de rits om te kijken of er geen tanden afgebroken zijn.
- Trek de rits open met behulp van het treklijpje. Alle ritsen van de toegangspanelen zijn voorzien van een plastic label met waarschuwingen.

U dient het label te vervangen wanneer het beschadigd raakt of onleesbaar wordt. Bel Human Protection B.V. en vraag om een vervangend exemplaar.

2. **Vraag:** Waarom gaat de rits uit elkaar na het dichtritsen?

Antwoord: De runner is beschadigd en buigt de tanden niet goed in elkaar als de rits wordt gesloten.



WAARSCHUWING! Gebruik het Posey tentbed NIET! Bel Human Protection B.V. om een reparatie af te spreken **+31 (0)13-536 38 07** en eventueel een vervangend bed te huren. U kunt een Posey tentbed per dag huren. Tijdens kantooruren belt u met **+31 (0)13-536 38 07**, na kantooruren of op zaterdag, zondag of feestdagen belt u via het spoednummer **+31 (0)13-523 42 86**.

U kunt het probleem vermijden door de rits ALTIJD te openen met behulp van het treklijpje. Ruk het toegangspaneel NOOIT open: hierdoor wordt de runner beschadigd (zie afbeelding hierboven) en kan de rits niet meer worden goed gesloten.

3. **Vraag:** Wat kan ik doen als de patiënt langs het gaas krabt?

Antwoord: Haal de patiënt uit het tentbed en raadpleeg de arts of het ZORGPLAN voor informatie over de juiste verzorging.

4. **Vraag:** Hoe reinig ik de tent wanneer deze vervuild raakt?

Antwoord: Raadpleeg de pagina's 24-25 voor informatie over het reinigen.

5. **Vraag:** Hoe verwijder ik pluisjes en/of ander materiaal van het klittenband?

Antwoord: Verwijder alle pluisjes en materialen met een stugge borstel. Sluit al het klittenband voor u de tent uitwast, zodat er geen pluisjes in kunnen komen.

6. **Vraag:** Kan ik infusen en lijnen gebruiken in het Posey tentbed?

Antwoord: Raadpleeg "Drainage openingen" op pagina 18.

7. **Vraag:** Kan ik een opblaasbaar matras gebruiken?

Antwoord: Nee. Het Posey tentbed is bedoeld voor gebruik met het meegeleverde matras. U dient het matras altijd volledig in het matrascompartiment te plaatsen. Ook moet de rits van het matrascompartiment altijd gesloten zijn. Raadpleeg "Comfortmatras en matrascompartiment" op pagina 17.

8. **Vraag:** Kan ik onze eigen matrassen gebruiken tijdens het reinigen van het matras van het Posey tentbed?

Antwoord: Nee.



WAARSCHUWING! Het is NIET toegestaan een ander matras dan het meegeleverde opdekmatras (5cm dik) in de tent te plaatsen!

Frame

1. **Vraag:** Hoe ontgrendel ik de zwenkwielen, zodat ik het bed kan verplaatsen?

Antwoord: Druk met uw voet de rem aan het hoofd- of voeteneinde van het bed omhoog.
Raadpleeg "Vergrendelbare zwenkwielen" op pagina 16.

Veelgestelde algemene vragen

1. **Vraag:** Waar vind ik de barcode van de tent van het Posey tentbed?

Antwoord: U vindt het label met de barcode op het zakje van de gebruiksaanwijzing (zie afbeelding).

2. **Vraag:** Waar bevinden de zijrails zich?

Antwoord: Het Posey tentbed heeft geen zijrails. Gebruik NOOIT een zijrail op het Posey tentbed: daardoor neemt het risico op BEKNELLING toe. Het Posey tentbed is voorzien van omtrekbescherming. Deze fungeert als "zachte" zijrails om de kans op het vallen van patiënten te verminderen wanneer een zijpaneel wordt geopend tijdens het verzorgen van de patiënt.

Raadpleeg "Omtrekbescherming" op pagina 21 voor informatie over het juiste gebruik.

3. **Vraag:** Kan ik een tillift gebruiken bij het Posey tentbed?

Antwoord: Ja, raadpleeg pag. 22-23 voor informatie over het gebruik van tilliften in combinatie met het Posey tentbed. Gebruik echter NOOIT een tillift om patiënten te verplaatsen, tenzij er is gecontroleerd of er genoeg ruimte onder het tentframe is om de lift veilig te gebruiken. De afmetingen van het toegangspaneel aan de openingszijde zijn 97 cm x 117 cm (H x B) aan de onderzijde.



9.11 Probleem oplossen met het PB526II en PB528 onderstel




WAARSCHUWING! Indien de elektriciteit niet meer functioneert, dient u de patiënt direct uit het Posey tentbed te verwijderen.

DEFECT	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Verstellingsfuncties zijn inactief (de hoogte of hoek van het ligvlak kan niet worden veresteld)	De stekker van het netsnoer is niet in het stopcontact gestoken	Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact
	De kabels van de elektrische componenten zijn beschadigd of niet goed bevestigd	Controleer de bekabeling vanuit de besturingseenheid op beschadiging en op correcte bevestiging
	Er staat geen stroom op het stopcontact	Controleer het stopcontact of de stoppenkast (schakel de hulp van de technische dienst of een electricien in)
	De thermische beveiliging is ingeschakeld	Gebruik de verstellingen niet voor een periode van 30 minuten, en probeer het daarna opnieuw
	Eén of meer functies van de handbediening zijn manueel vergrendeld	Gebruik de sleutel om de betreffende functies te ontgrendelen
	De handbediening is beschadigd	Neem contact op met klantenservice
	De besturingseenheid is beschadigd	Neem contact op met klantenservice
Onderbeensteun kan niet veresteld worden	De stelratels zijn beschadigd	Neem contact op met klantenservice
Motoren zijn plotseling gestopt	De maximale toelaatbare belasting werd overschreden	Verminder de belasting, volg de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing en van de informatielabels
	Er bevinden zich obstakels binnen het verstelbereik	Verwijder alle obstakels die zich binnen het verstelbereik bevinden
Motoren zijn gestopt na lange bedrijfsduur	De maximale bedrijfsduur werd overschreven	Laat het systeem afkoelen, verminder de belasting, volg de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing en van de informatielabels
Besturingseenheid is oververhit	De maximale toelaatbare belasting werd overschreden	Laat het systeem afkoelen, verminder de belasting, volg de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing en van de informatielabels
	De thermische beveiliging is ingeschakeld	Gebruik de verstellingen niet voor een periode van 30 minuten, en probeer het daarna opnieuw
Vergrendelbare wielen remmen niet goed	De wielen zijn niet schoon	Maak de wielen schoon, verwijder alle obstructies
	De wielen zijn beschadigd	Neem contact op met klantenservice

3. Bel de storingslijn van Human Protection B.V. via **+31 (0)13-536 38 07** als u het probleem niet krijgt opgelost.

LET OP! In acute situaties (na 17.00uur, in het weekend of op feestdagen) kunt u bellen met **+31 (0)13-52 34 286**.

9.12 Technische specificaties/ afmetingen

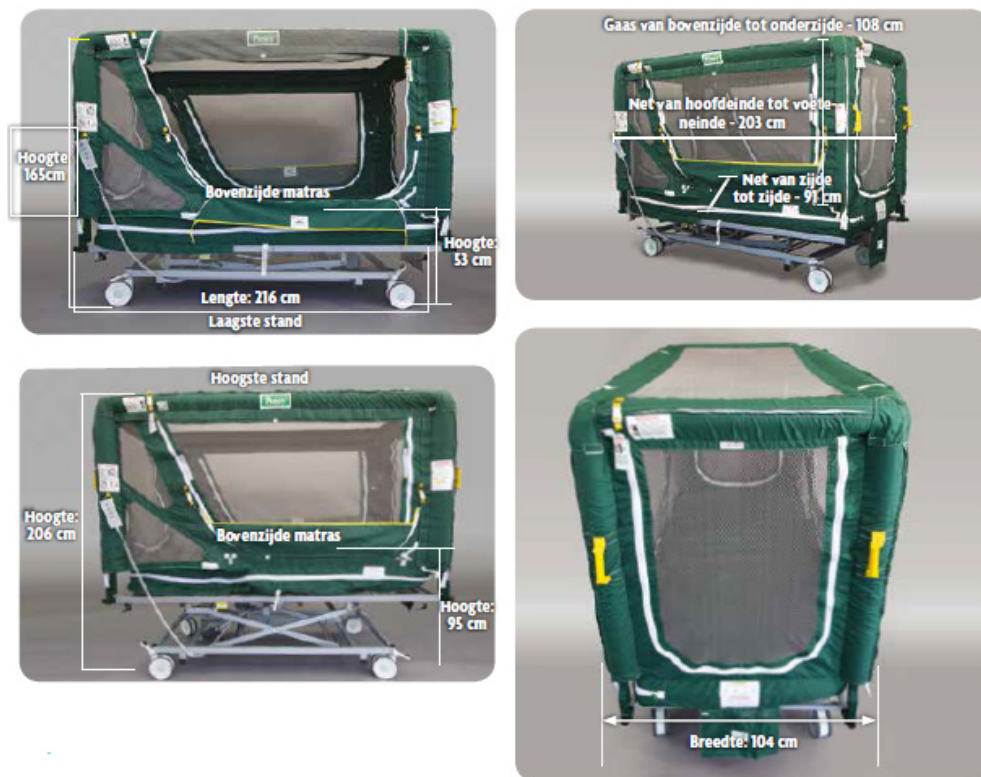

Oppervlak: 2,22 vierkante meter

Volume: (binnenzijde): 2 kubieke meter

Totaalgewicht indien volledig gemonteerd (bedframe en tent): 139,2 kg

Totaalgewicht van de tent: 8 kg

Maximale rughoek: 70° tot horizontaal

Maximale kniehoek: 20° tot horizontaal

Belasting	Maximaal toelaatbare belasting	205 kg
	Maximaal gebruikersgewicht	165 kg
Afmetingen	Extern (BxL)	ca. 90 x 200 cm
	Ligvlak (BxL)	90 x 200 cm
	Vrije ruimte onder het bed	ca. 13,0cm
	Comfortmatras (BxLxH)	90 x 200 x 12 cm
Verstelling	Hoogte	ca. 37,0 tot 79,0 cm (PB528) ca. 36,0 tot 77,0 cm (PB526II)
	Hoek - rugsteun gedeelte	ca. 0° tot 70°
	Hoek - bovenbeensteun gedeelte	ca. 0° tot 32°
	Hoek - onderbeensteun gedeelte	ca. 0° tot 20°
Aandrijving	Hoog/laag motor	Linak LA27 (PB528) Linak LA40 (PB526II)
	Ligvlak motor	Linak LA27
	Besturingseenheid	Linak CB65 (PB528) Linak CA40 (PB526II)
	Handbediening	Linak HL74
	Stroomvoorziening	230V AC, 50 Hz
	Bedieningstijd	2 min aan / 18 min uit
	Beschermingsgraad	IP X4
	Elektrische veiligheidsklasse	I
	Geluidsniveau	< 65 dB (A)
	Accu	BA18 (24V DC) (PB528) BA19 (24V DC) (PB526II)
Gewicht	Totaal verpleegbed	98,8 kg
	Hoofdeinde bedbodem	21,6 kg
	Voeteneinde bedbodem	21,3 kg
	Hefstelsel incl. hoog/laag motor	48,8 kg
	Motor bedbodem	1,5 kg
	Handbediening	0,3 kg
	Besturingseenheid	0,5 kg
	Accu en bekabeling	3,3 kg
Gebruikscondities	Relatieve luchtvochtigheid	30 - 75%
	Temperatuur	+10°C tot +40°C
Opslagcondities	Relatieve luchtvochtigheid	30 - 75%
	Temperatuur	+5°C tot +45°C

9.12.1 Labelling PB526II en PB528 onderstel

9.12.1.1 Typeplaatje



De volgende gegevens worden weergegeven op het typeplaatje:

- Modelnaam;
- Max. gebruikersgewicht;
- Max. toelaatbare belasting;
- Opslagtemperatuur;
- Elektrische parameters
- Gebruikstijd
- Fabrikant

Op een afzonderlijk label is het serienummer in tekst en barcode aangebracht.

9.12.1.2 Aanvullende labelling


- Maximale gebruikersgewicht: 165 kg
- Maximale toelaatbare belasting: 205 kg
- Afmetingen van de comfortmatras: 90 x 200 x 12 cm

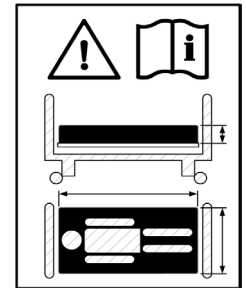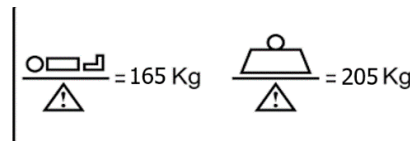

WAARSCHUWING! Ongeschikte matrassen kunnen een risico op vertrikking veroorzaken!



Het verpleegbed beschreven in deze gebruiksaanwijzing is ontworpen voor patiënten met een lengte gelijk aan of hoger dan 146 cm, een gewicht gelijk aan of hoger dan 40 kg en een Body Mass Index (BMI) gelijk aan of hoger dan 17.

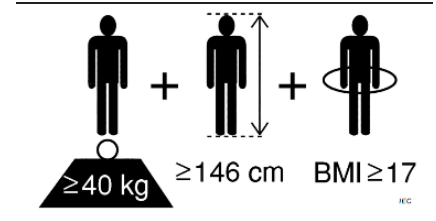

9.12.1.3 Verklaring van symbolen gebruikt op typeplaatje



• Toegepast onderdeel type B volgens EN 60601-1



• Elektrische veiligheidsklasse

IPX6

• Beschermingsgraad van elektrische onderdelen tegen spatwater



• Niet buiten gebruiken



• Product moet worden verwijderd volgens de Europese en lokale wet- en regelgeving



• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen



• Volg de gebruiksaanwijzing

CE

• CE-markering



• Fabrikant



• Maximale gebruikersgewicht



• Maximale toelaatbare belasting

9.13 Vervangende onderdelen

Neem contact op met Human Protection B.V. wanneer u vervangende onderdelen wilt bestellen.

Vervangende onderdelen voor het Posey tentbed

Omschrijving	Artikelnummer
Tent, compleet	8080T
Clipsluiting compleet incl. sleutelringen	8080CLIP
Hoes t.b.v. opdekmatras dun	ELM100037C
Hoes t.b.v. comfortmatras	ELM100037A
Opdekmatras compleet 5cm traagschuim	MA-002
Comfortmatras compleet	MA-001
Reanimatieplank incl. hoes	VI001
Bout t.b.v. frame incl. revet	LT-002
Schuimrol geseald per set	OI-FM
Sleutel metaal tbv handbediening Elbur Onderstel	ELE00914517
Afdekkapje "controlbox" motor t.b.v. CPR	ELE0271244
Rempedaal	ELE02746902
Wiel Tente 150mm centraal beremd	ELE02746905
Verbindingsstang centrale rem	ELE02746908
Verbindingsstuk remstang	ELE02746909
Montageset voor remstang	ELE02746910
Stootbumper	ELE02746911
Montageset voor Tente wiel	ELE02746912
Kabel motor ligvlak/HL/Controlbox (alleen voor PB526II)	ELE0277011-460CA40
Kabel motor ligvlak (alleen voor PB528)	ELE0277011-460
Motor ligvlak	ELE270240-00
Kabel motor controlbox (alleen voor PB528)	ELE0277011-200
Motor Controlbox met CPR aansluiting	ELE270240-00N
Kabel hoog/laag motor (alleen voor PB528)	ELE0277012-400
Hoog/Laag motor (alleen voor PB526II)	ELE270CA40
Hoog/laag motor (alleen voor PB528)	ELE270241-00
QR hendel	ELE5007782
Quick Release pin	ELE5007783
Controlbox CA40 alleen voor (PB526II)	ELECA40
Controlbox Linak wit (alleen voor PB528)	ELECBS614+A2009
Handbediening Linak zwart (alleen voor PB526II)	ELEHL7440726=60600
Handbediening Linak grijs/wit (alleen voor PB528)	ELEHL744V026+B0600
Eindkapje 40x30mm	ELEP23019
Eindkapje 45x35mm	ELEP23143
CPR handbeugel rechts met kabel	ELEP80406
CPR handbeugel links met kabel	ELEP80407
Netsnoer Controlbox CB6	ELESML918141

9.14 Garantie Posey tentbed

LET OP! De tent van het Posey tentbed is uitsluitend ontworpen voor gebruik op het daarvoor aangepast onderstel Elbur-model PB528/PB526II en mag daarom niet op een ander bedplatform worden gebruikt.

Wat valt er onder de garantie?

Human Protection B.V. garandeert de originele koper dat de tent voor het Posey tentbed geen materiële defecten of productiefouten bevat. Indien na onderzoek van de klacht toch materiële defecten en/of productiefouten worden aangetroffen, herstellen of vervangen we de betreffende materialen kosteloos.

Hoe lang geldt de garantie?

De garantie geldt tot één (1) jaar na de datum waarop de tent werd gekocht. De factuurdatum is leidend.

Wat valt NIET onder deze garantie?

Schade aan de nylontent of aan andere componenten als gevolg van:

1. Gebruik in ongeschikte omstandigheden of het niet monteren of onderhouden van het product overeenkomstig onze gebruiks- en onderhoudsinstructies;
2. Foutief gebruik (inclusief, maar niet beperkt tot, schade door patiënten), misbruik, aanpassing, blootstelling aan extreme warmte of schade als gevolg van natuurkrachten of overmacht (zoals overstromingen of brand);
3. Aanpassing, wijziging of reparatie, tenzij deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door Human Protection B.V.;
4. Gevolgschade of incidentele schade, inclusief, maar niet beperkt tot, derving van inkomsten of winsten, worden niet gedekt.

Onderhoud

Neem voor onderhoud of reparatie aan de tent altijd contact op Human Protection B.V. Retourneer de tent NIET aan Human Protection B.V. als de tent niet goed is gereinigd. Verontreinigde tenten kunnen, als het gevolg van hygiëne regels, niet worden geïnspecteerd en worden gerepareerd. De kosten van reiniging komen in dat geval voor uw rekening.

Kosten voor reiniging en verzending

- Deze zijn voor onze rekening indien het product in de garantieperiode valt en indien het materiële defecten en/of productiefouten betreft.
- Na de garantieperiode zijn deze voor uw rekening.

10. Montagehandleiding

Inhoudsopgave Montage-instructies

Deel A - Paklijst en benodigde onderdelen	40
Materialen	40
Deel B - Montage van het frame	41-42
Stap 1 - Metalen staander aan rechterzijde van het hoofdeinde	41
Stap 2 - Metalen staander aan linkerzijde van het hoofdeinde	41
Stap 3 - Metalen staander aan rechterzijde van het voeteneinde	41
Stap 4 - Metalen staander aan linkerzijde van het voeteneinde	42
Stap 5 - Montage van korte rails	42
Stap 6 - Montage van lange rails	42
Deel C - Bevestiging van beschermingsmaterialen, tent en matras	43-44
Stap 1 - De beschermingsmaterialen van schuim installeren	43
Stap 2 - Bevestiging van de tent	43
Stap 3 - Het matras plaatsen	44
Gebruiksaanwijzingen:	
Netsnoer	44
Handbediening van het bed	44

Benodigde gereedschappen voor montage (niet inbegrepen):

1x Moersleutel, 17 mm

MONTAGE INSTRUCTIES Posey tentbed

LET OP! Het Posey tentbed kan het beste door 2 personen worden gemonteerd zodat er tijdens het montageproces sprake is van stabiliteit en zodat verwondingen worden vermeden.

Om het montageproces te vereenvoudigen, bestaat deze montage-instructie uit 3 delen:

- Deel A - Paklijst en benodigde onderdelen;
- Deel B - Montage van het frame;
- Deel C - Bevestiging van beschermingsmaterialen, tent en matras.

** Verwijder vóór u begint met de montage alle beschermende verpakkingsmaterialen van alle onderdelen. Let op! Verwijder niet de plastic seal om de schuimrubberen bepolstering!*




Deel A - Paklijst en benodigde onderdelen

Controle van aanwezige onderdelen: U dient over de volgende onderdelen te beschikken. Neem contact op als onderdelen ontbreken. Raadpleeg pagina 36 voor een volledig overzicht met nummers van vervangende onderdelen.

Metalen onderdelen:

- A. Bouten, M10 x 1,25 x 25 mm (12 stuks)
- B. Borgringen, 10,5 mm (12 stuks)
- C. Beschermmateriaal van schuim, kort (2 stuks);
- D. Beschermmateriaal van schuim, lang (8 stuks);
- E. Rail voor lange zijde (2 stuks);
- F. Metalen staander voor linkerzijde van hoofdeinde;
- G. Metalen staander voor rechterzijde van voeteneinde;
- H. Metalen staander voor rechterzijde van hoofdeinde;
- I. Metalen staander voor linkerzijde van voeteneinde;
- J. Rail voor korte zijde (2 stuks).
- K. Tent

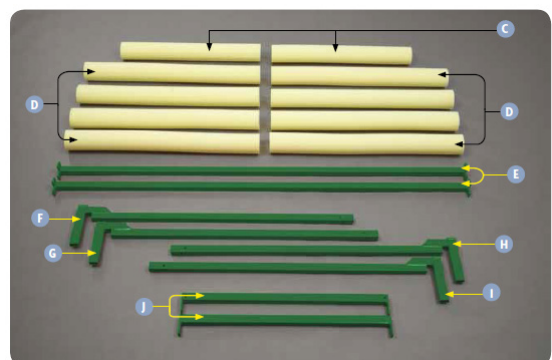

Deel B: Montage van het frame:

LET OP! Voor de montage van onderdelen 1 t/m 4 is hulp van twee personen nodig, zodat verwondingen worden vermeden.

Het frame bestaat uit verschillende Metalen staanders voor de linker- en rechterzijden van het hoofd- en voeteneinde van het bed.


- F. Metalen staander voor linkerzijde van hoofdeinde;
- G. Metalen staander voor rechterzijde van voeteneinde;
- H. Metalen staander voor rechterzijde van hoofdeinde;
- I. Metalen staander voor linkerzijde van voeteneinde

Stap 1: Metalen staander voor rechterzijde van het hoofdeinde (zie pagina 7 voor een afbeelding van het bedframe)

Montagestap 1:


Plaats de Metalen staander voor de rechterzijde van het hoofdeinde (onderdeel H) aan de rechterzijde van het hoofdeinde in het bedframe (zie afbeelding).

NB: Zorg dat de gaten op de Metalen staander aan weerszijden van het frame naar binnen zijn gericht.

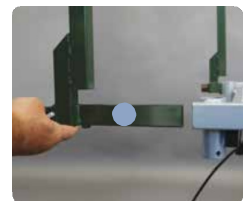

Montagestap 2:

Installeer de verstelbare klemhendel aan de onderzijde van het bedframe. Draai stevig vast.

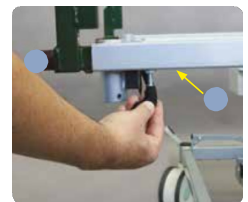

Stap 2: Metalen staander voor linkerzijde van het hoofdeinde

Montagestap 1:

Plaats de Metalen staander voor de linkerzijde van het hoofdeinde (onderdeel F) aan de linkerzijde van het hoofdeinde in het bedframe.

Montagestap 2:

Installeer de verstelbare klemhendel aan de onderzijde van het bedframe.

Stap 3: Metalen staander voor rechterzijde van het voeteneinde

Montagestap 1:

Plaats de Metalen staander voor de rechterzijde van het voeteneinde (onderdeel G) aan de rechterzijde van het voeteneinde in het bedframe.

Montagestap 2:

Installeer de verstelbare klemhendel aan de onderzijde van het bedframe.

Stap 4: Metalen staander voor linkerzijde van het voeteneinde

Montagestap 1:

Plaats de Metalen staander voor de linkerzijde van het voeteneinde (onderdeel I) aan de linkerzijde van het voeteneinde in het bedframe.

Montagestap 2:

Installeer de verstelbare klemhendel aan de onderzijde van het bedframe.

Stap 5: Montage van groene korte rails

Montagestep 1:

Zorg dat de twee personen zich aan het hoofdeinde van het bed bevinden en pak één van de korte rails (onderdeel J).


Lijn deze uit tussen de Metalen staanders aan de linker- en rechterzijde van het hoofdeinde (onderdelen F en H). Zorg dat de gaten op de Metalen staanders aan weerszijden van het frame naar binnen zijn gericht.

Montagestep 2:

Plaats aan één uiteinde van de loodrechte verbinding een sterring op een M10-bout en plaats deze in het gat. Draai de bout vast met de inbusleutel van 6 mm. Herhaal deze stap aan beide zijden van de Metalen staanders.

Montagestep 3:

Herhaal de stappen 1 en 2 aan het voeteneinde van het bed en monteer de korte rail (onderdeel J) aan de metalen staanders aan de linker- en rechterzijden van het voeteneinde (onderdelen G en I).

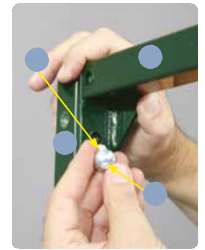

Stap 6: Montage van de lange rails




Montagestep 1:

Zorg dat de twee personen zich aan het hoofdeinde van het bed bevinden en pak één van de lange rails (onderdeel E).

Lijn deze uit tussen de metalen staanders aan de linkerzijden van het hoofdeinde en van het voeteneinde (onderdelen F en I).

Montagestep 2:

Gebruik aan beide uiteinden van de hoekverbinding twee bouten. Plaats op beide M10-bouten een sterring en plaats de bouten in de twee gaten voor de verbindingen.

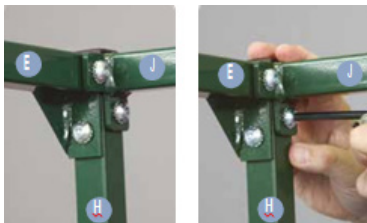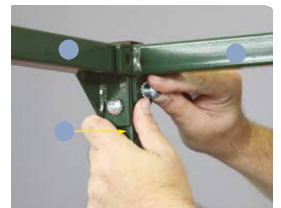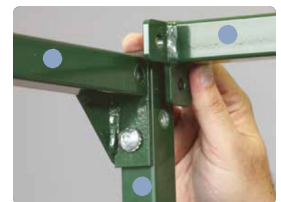

Montagestep 3:

Plaats een borgring op de bout en draai de bout vast met een moersleutel, 17mm.

Herhaal deze stap aan de andere zijde van het bed en lijn de lange rail (onderdeel E) uit met de metalen staanders aan de rechterzijden van het hoofdeinde en voeteneinde (onderdelen G en H).

Het frame is nu gemonteerd, zie onder het eindresultaat:



Deel C: Bevestiging van beschermingsmaterialen, tent en matras

Stap 1: Bevestiging van beschermingsmaterialen van schuim


Montagestep 1:

Open de opening van een kort beschermingsonderdeel (onderdeel C) en plaats het beschermingsmateriaal over de korte rail (onderdeel J) aan het hoofdeinde van het bed. Draai de opening van het schuim naar de buitenzijde van het frame (zie afbeelding onder links). Herhaal deze stap voor het voeteneinde van het bed.

Montagestep 2:

Plaats twee lange beschermingsonderdelen van schuim (onderdeel D) op de lange rail (onderdeel E). Zorg dat de openingen zich in dezelfde richting bevinden als in Montagestep 1 (zie afbeelding onder rechts).

Herhaal de stap aan de andere zijde (onderdeel E) met twee lange twee lange beschermingsmaterialen van schuim (onderdeel D).

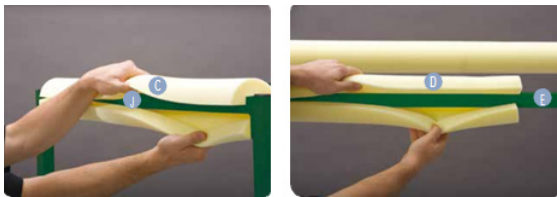

Montagestep 3:

Plaats bij elke hoek één lang beschermingsonderdeel van schuim (onderdeel D) op een verticale Metalen staander. Draai de openingen van het schuim naar de buitenzijde van het frame (zie afbeelding onder links). Herhaal deze stap tot alle vier de zijden van een beschermlaag zijn voorzien (zie afbeelding onder rechts).



Stap 2: Bevestiging van de tent

Montagestep 1:

Vouw de tent (onderdeel K) over het bed en zorg dat de opbergruimte voor de instructies voor het Posey tentbed zich aan het voeteneinde van het bed bevindt.

LET OP! Bevestig de tent **ALTIJD** op de juiste wijze aan het bedframe, zodat de opbergruimte voor de instructies voor het Posey Bed zich aan het voeteneinde van het bed bevindt. Wanneer u dit niet doet, kan de tent of de bedmotor beschadigd raken wanneer de verstelling van het bed wordt gebruikt.



Montagestep 2:

Maak alle ritsen voor de bovenste rail (aan de lange en korte zijden) los.

Montagestep 3:


Begin aan één lange zijde en wikkel het gedeelte voor de bovenste rail om het schuim. Trek daarna de tentonderdelen naar elkaar toe en doe de rits dicht (zie afbeelding). Herhaal deze stap aan de tegenoverliggende lange zijde.

Montagestep 4:

Rits alle vier hoekpoten los.

Montagestep 5:

Rits de twee korte rails aan de bovenzijde dicht.

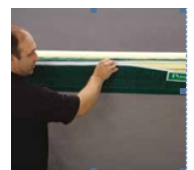

Montagestap 6:

Wikkel de afdektent bij alle hoekpoten om het schuim. Trek daarna de tentonderdelen naar elkaar toe en doe de rits dicht. Zorg dat de tanden van de rits in de juiste positie zijn gepositioneerd.

Gebruik het klittenband om de hoeken af te dekken.

Herhaal de stap aan alle vier de zijden tot alle hoekpoten om het schuim van de tent zijn bevestigd.

Stap 3: Het matras plaatsen*Montagestap 1:*

Open de rits van het matrascompartiment.

Montagestap 2:

Plaats het matras overeenkomstig de instructies van de fabrikant. Plaats het matras vervolgens in het matrascompartiment.




LET OP! Plaats in het matrascompartiment alleen een matras met de volgende afmetingen: 200 cm x 90 cm x 12 cm. Wanneer u een kleiner of groter matras gebruikt, kan de tent van het Posey tentbed beschadigd raken. Ook kan het gebruik van een kleiner of groter matras resulteren in verwondingen van de patiënt.

Montagestap 3:

Rits het matrascompartiment helemaal dicht nadat het matras is geplaatst.

Montagestap 4:

Gebruik de bedriem in het midden van het bed om de tent aan het frame te bevestigen (maak de riem aan beide zijden van het bed vast). Plaats de riem door het bedframe (zie afbeelding 25) en voer hem door de metalen D-ring (zie afbeelding 26). Voer de riem door de tweede metalen D-ring (zie afbeelding 27) en trek vervolgens aan de riem om hem vast te maken (zie afbeelding 28). Herhaal deze stap aan de andere zijde.

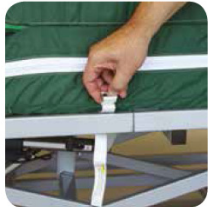


Afbeelding 12 Bedriem door het bedframe



Afbeelding 13 Bedriem door de D-ring



Afbeelding 14 Bedriem door de tweede D-ring

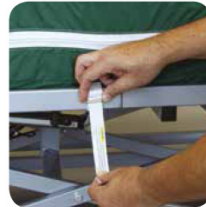

Afbeelding 15 Bedriem voor de tent aan het bedframe

LET OP! Bevestig beide riemen voor de tent aan de beweegbare BOVENdelen van het bedframe. Wanneer u de riemen aan een ander deel van het bedframe bevestigt, kan het matrascompartiment tijdens het verhogen of verlagen van het bed beschadigd raken.

Het netsnoer bevestigen

Gebruik de riem voor het netsnoer om het netsnoer tijdens transporten vast te maken (zie de afbeeldingen 29-30).



Afbeelding 29 Netsnoer in de riem



Afbeelding 30 Bevestiging van het netsnoer aan de riem

Handbediening van het bed

Bevestig de clip aan de achterzijde van de bediening van het bed aan de riem aan het hoofdeinde van het bed (zie afbeeldingen 32 en 33).



Afbeelding 32 Clip aan de bediening van het bed



Afbeelding 33 Bediening van het bed bevestigd

Het Posey tentbed is nu volledig gemonteerd.

De gebruiksaanwijzing en de Beknopte nalooplijst moeten in de opbergruimte voor instructies bij het Posey tentbed aan het voeteneinde van het bed worden bewaard ter naslag.

Bijlage 1

Inspectie van Medische Elektrische Apparatuur volgens EN 62353

Klant / Medische faciliteit: _____

Adres: _____

Type inspectie:

- Eerste inspectie
- Herhalingsinspectie
- Service-inspectie
- Eindinspectie door fabrikant

Elektrische veiligheidsklasse: I II

Fabrikant: Elbur Vertriebs GmbH

Bed type: PB528 PB526II

Serienummer: _____

Inventarisnummer: _____

Locatie: _____

Gebruikte testapparatuur (naam / type / serienummer):

I. Visuele inspectie

1.1. Visuele inspectie van de mechanische componenten		
Zijn het typeplaatje en de informatielabels leesbaar?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEE
Zijn de mechanische constructies vrij van lasfouten en verbuigingen?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEE
Is het bedplatform vrij van verbuigingen?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEE
Zijn de delen van het ligvlak correct geplaatst en afgesteld?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEE
Zijn de metalen rasters van de ligvlakdelen vrij van beschadigingen?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEE
Is de constructie onder het bedplatform compleet en vrij van beschadigingen	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEE
Zijn de wielen vrij van beschadigingen en nog goed genoeg voor gebruik?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEE
Zijn alle schroefverbindingen duurzaam uitgevoerd?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEE
Zijn de behuizingen van de componenten vrij van beschadigingen?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEE
Zijn de bouten met snelsluiting waarmee de motoren zijn bevestigd goed geplaatst?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEE
1.2. Visuele inspectie van de elektrische componenten		
Is het netsnoer correct aangesloten?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEE
Vertonen het netsnoer en de stekker geen schade?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEE
Zijn alle kabels goed aangesloten, met name de trekontlasting en plug?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEE

Zijn alle kabels, in het bijzonder die tussen de bewegende delen van het bed, zonder krassen, deuken, knikken of ontblote draden?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEE
Zijn de behuizingen van de motoren, besturingseenheid en handbediening verzegeld en zonder beschadigingen?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEE
Is het label op de handbediening goed leesbaar?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEE

Beschrijving van de defecten (indien van toepassing):

II. Elektrische metingen (volgens EN 62353)

2.1. Meting van beschermende aardweerstand		
Alleen van toepassing voor Klasse I ME-apparatuur $R \leq 300\ m\Omega$	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEE
Resultaat:		
2.2. Meting van de lekstroom		
Directe methode (voor Klasse I ME-apparatuur) $I \leq 500\ \mu A$	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEE
Resultaat:		
Differentiële methode (voor Klasse II ME-apparatuur): $I \leq 100\ \mu A$	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEE
Resultaat:		
2.3. Meting van isolatieweerstand		
Voor Klasse II ME-apparatuur: $R \geq 7\ M\Omega$	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEE
Resultaat:		

Beschrijving van de defecten (indien van toepassing):

III. Prestatie controle

3.1 Prestatie controle van de elektrische componenten		
Werken de bedienings- en de vergrendelingsfuncties van de handbediening correct?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEE
Werken de motoren correct? (abnormale geluiden, soepele verstelling)	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEE
3.2. Prestatie controle van de mechanische componenten		
Werkt het onderstel naar behoren? (soepele bewegingen, remmen)	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEE
Werkt de CPR-functie goed met een belasting van de rugleuning?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEE

Beschrijving van de defecten (indien van toepassing):

IV. Resultaten van de inspectie

Inspection geslaagd: JA NEE

Indien inspectie niet geslaagd:

- Defect apparaat – Gebruik het verpleegbed niet → Reparatie
- Defect apparaat – Gebruik het verpleegbed niet → Stel buiten gebruik
- Het verpleegbed voldoet niet aan de veiligheidseisen

Opmerkingen:

Datum volgende inspectie: _____

Datum inspectie: _____

Inspectie uitgevoerd door: _____

Handtekening: _____

