

Maak compressietherapie

makkelijker!



Arion aan- en uittrekhulpen
voor medische compressiemiddelen

ARION
SLIDE SOLUTIONS

Maak uw leven

makkelijker met

Arion Slide Solutions!

De specialist in aan- en uittrekhulpen voor medische compressiekleding

Compressietherapie is een behandeling waarbij mensen een kledingstuk krijgen dat druk uitoefent op een lichaamsdeel. Het is voor hen en hun zorgverleners vaak een hele worsteling om zo'n kledingstuk aan te krijgen. Arions CEO Erik Joosten wilde daar wat aan doen. Het werd zijn ambitie om oplossingen te bedenken voor deze problemen en patiënten minder afhankelijk te maken.

Hij wilde compressiedragers hun vrijheid en waardigheid teruggeven, en een glimlach op hun gezicht toveren. Daarom ontwikkelde Arion in 1994 de eerste aantrekhulp van textiel voor medische compressiekousen.

Het leidde tot een eenvoudige oplossing en een gepatenteerd product: Easy-Slide, dat handig, makkelijk en veilig is in het gebruik. Easy-Slide maakt compressietherapie makkelijker voor mensen die compressiekleding dragen en voor hun zorgverleners, elke dag weer.



Easy



Safe



Simple



Hoe Easy-Slide het leven van mensen heeft veranderd

Het was niet makkelijk om de eerste aantrekhulp voor medische compressiekleding op de markt te brengen. Er was namelijk geen enkele ziektekostenverzekering die hem wilde dekken. Erik ondervond in het begin veel weerstand uit de zorgsector. Maar het was zijn missie om het leven van mensen te veranderen, dus hij gaf niet op.

Hij zal nooit de hartverscheurende ansichtkaart vergeten, die hij in 1994 van Emily D. kreeg. Daarin vertelt ze over haar herwonnen vrijheid:

'Dankzij Easy-Slide heb ik mijn vrijheid terug. Want nu kan ik mijn steunkousen zelf aantrekken. Jullie hebben mijn leven ten goede veranderd!'

Dat is wat Arion met zijn Slide Solutions wil bereiken: een positieve impact, die het leven van mensen kan veranderen.

Het origineel sinds 1994

Nadat het patent van/op Arion Easy-Slide was verlopen, hebben velen het geprobeerd na te maken. Maar geen enkel product heeft de kwaliteit en glij-eigenschappen van Easy-Slide kunnen evenaren.

Vertrouw alleen het origineel!



De juiste oplossing voor vele

soorten compressiekleding

Arion Easy-Slide Arm



Aan

Arion Dactyna



Aan

Arion Sim-Slide®




Aan + Uit

Arion SlideX



Aan

Arion Magnide® 2in1

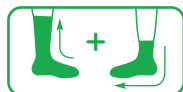

Aan + Uit

Arion aan- en uittrekhulpen

Voordelen van de producten

Makkelijk in gebruik



- Minimaliseert de wrijving tussen compressiekleding en huid.
- Vermindert de fysieke belasting voor zowel de drager als zorgverlener.
- Bevordert de zelfredzaamheid van dragers van compressiekleding.

Veilig aan te trekken



- Verkleint het risico dat de huid beschadigt: is bijzonder waardevol bij een zeer gevoelige huid of open been (beenulcera).
- Zorgt dat compressiekleding langer meegaat, want het voorkomt dat u de kleding met uw vingers of nagels beschadigt.
- Zorgt dat de oorspronkelijke compressie langer behouden blijft en voorkomt dat de kleding te veel uitrekt en vervormt.

Eenvoudige oplossingen



- Voor vele soorten compressiekleding: kousen, panty's, armkousen en handschoenen.
- Ontworpen voor verschillende vormen en maten armen en benen*.
- Vergroot de therapietrouw bij compressietherapie.

*Op aanvraag kunnen we producten op maat maken: vraag ernaar bij uw vakhandel of Arion!

Accessoires die u in combinatie met Arion aantrekhulpen gebruikt

Easy-Grip Gloves



Aan



Uit




Aan

Anti-slip handschoenen als extra aan- en uittrekhulp in combinatie met de andere Arion hulpmiddelen

Deze handschoenen bieden de gebruiker extra grip en helpen bij het soepel aantrekken van compressiekousen, armkousen en compressiehandschoenen. Zij voorkomen dat aan de compressiekleding wordt getrokken en beschermen tegen beschadigingen door sieraden of vingernagels. Dit draagt bij tot het behoud van het materiaal en de verlenging van de levensduur van de compressiekleding.

De Arion anti-slip handschoenen bevatten **latex**.

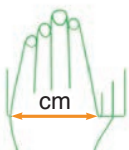

Art. Nr.	Maat	Handbreedte
Eo8030	Small	< 7,5 cm
Eo8010	Medium	7,5 - 8,5 cm
Eo8020	Large	8,5 - 9,5 cm
Eo8040	Extra large	> 9,5 cm

Onderhoud:



Anti-Slip Mat



Aan



Uit

Anti-slipmat om het aan- en uittrekken van compressiekousen makkelijker te maken, als aanvulling op de Arion aantrekhulp.

- Zorgt voor een zacht oppervlak dat niet glijdt.
- Maakt het makkelijker om de kous op de juiste plaats op de hiel te krijgen.
- Lichtgewicht en makkelijk in gebruik

De Anti-Slip Mat is latex vrij



Art. Nr: Eo8003

Afmetingen product: 37,5 x 19,5 x 0,5 cm

Onderhoud:

Reinigen met milde zeep en water, aan de lucht laten drogen.

Aantrekhelp voor kousen en panty's

ARION
Magnide® 2in1

ARION
Sim-Slide®

Twee oplossingen in één product: aan- en uittrekhelp voor compressiekousen en -panty's.


Dankzij de unieke glij-eigenschappen verminderen Magnide® 2in1 en Sim-Slide® de wrijving tussen uw been en de medische compressiekous. Daardoor kunt u de kous makkelijk aantrekken, zonder eraan te trekken.

Onze aantrekhelpen zijn ontworpen voor verschillende vormen en maten armen en benen. Dat is vooral belangrijk voor mensen met oedeem in de onderbenen. Magnide® 2in1 en Sim Slide® zijn simpele oplossingen voor vakmensen en patiënten, en maken medische compressietherapie comfortabeler.

Voor kousen met een gesloten teenstuk



Aan + Uit

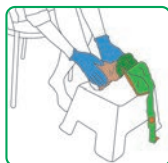

Art. Nr.	Maat	Schoenmaat
E01540	Medium	≤ 38
E01541	Large	39 - 43
E01542	Extra large	≥ 44

XL ook geschikt voor extra brede voeten (voetomtrek tot 28 cm)




Instructievideo:



Voor kousen met een open teenstuk



Aan + Uit

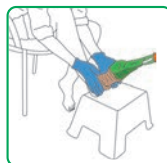

Art. Nr.	Maat	Schoenmaat
EoSLo1	Small	34 - 36
EoSLo2	Medium	37 - 38,5
EoSLo3	Large	39 - 41
EoSLo4	Extra large	≥ 42

ARION
SlideX





Aan

Verlengstuk om medische compressiekousen en panty's aan- en uit te trekken. U combineert SlideX altijd met een andere aantrekhelp, zoals Magnide® (2in1), Easy-Slide of Sim-Slide®.

Arion SlideX bedekt het been en vermindert wrijving en pijn vanaf de enkel tot aan de knie en ook het bovenbeen.*

Arion SlideX biedt compressiedragers en zorgverleners een makkelijke oplossing om compressiekousen en -panty's aan- en uit te trekken van bij:

- Een open wonden met een wondpleister of verband**
- Open been (beenulcera)
- Een onderbeen dat dikker is dan gemiddeld (bijv. door lipoedeem of lymfoedeem)
- Hoge kousen of panty's

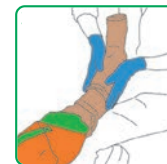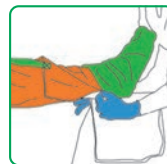

Art. Nr.	Maat	Omtrek van het been***
E01520	Medium	≤ 40 cm
E01521	Large	≤ 60 cm
E01522	Extra large	≤ 100 cm

*Maat L en XL zijn langer en bedekken het bovenbeen: dit zijn de juiste maten als aantrekhelp bij kousen of panty's tot aan de lies.

**Dek open wonden met een passend verband af voordat u de kous aantrekt.

***Van het breedste deel van het been



Instructievideo:

Aantrekhelp voor armkousen en compressiehandschoenen

ARION Easy-Slide ARM



Aan

De gebruiksvriendelijke aantrekhelp voor medische armkousen


Met de aantrekhelp Easy-Slide Arm is het aantrekken van een armkous kinderspel. U of uw zorgverlener heeft niet veel kracht nodig. U trekt de aantrekhelp gewoon over de arm en laat de armkous eroverheen glijden. Easy-Slide Arm bevordert de zelfredzaamheid van degene die de armkous draagt, omdat hij of zij geen hulp meer nodig heeft van anderen. Dat vergroot ook de therapietrouw.



Art. Nr.	Maat	Armlengte*	Maximale omtrek**
E01505	Medium	59 - 67 cm	45,6 cm
E01506	Large	> 67 cm	57,6 cm

* Armlengte van de punt van de middelvinger tot de oksel.

** Voor een volledige verdeling van de Easy-Slide Arm over uw arm, raden wij aan om de omtrek van het breedste deel van uw arm minimaal 1 cm (0,4") kleiner is dan de maximale productomtrek. Als dit niet mogelijk is met de huidige beschikbare maten, vraag dan uw wederverkoper of Arion om een op maat gemaakt product.

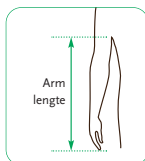

Instructievideo:



ARION Dactyna




Aan

Aantrekhelp voor medische compressiehandschoenen met open vingertoppen.

Bij aandoeningen of beperkingen waardoor uw vinger-, hand- of armgewrichten niet goed functioneren of bij een beperkte grijpfunctie van uw hand, is het bijna onmogelijk om uw compressiehandschoenen correct aan te trekken. Arion Dactyna is ontworpen om dragers en hun zorgverleners daarbij te helpen.

Dactyna wordt aanbevolen bij:

- zeer ontstekingsgevoelige of zeer degeneratieve gewrichtsaandoeningen
- verlammingen
- ziekten die vergroeiingen veroorzaken
- misvormingen aan handen of vingers
- verwondingen en amputaties
- brandwonden aan handen of vingers

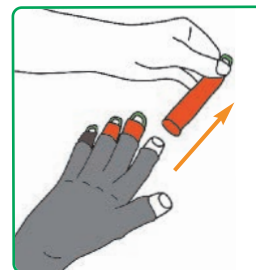

Art. Nr.	Maat	Vingeromtrek	Vingerlengte
E01571	Small	5,5 – 6,5 cm	6,5 cm
E01572	Medium	6,5 – 7,5 cm	7,5 cm
E01573	Large	7,5 – 9 cm	8,5 cm

Instructievideo:



Arion aantrekhelpen

voor kinderen



Medische compressiekleding bij kinderen is voor zowel het kind als zijn ouders of verzorgers een lastige taak en kan voor de patiëntjes zeer pijnlijk zijn. Maar wil de therapie succesvol zijn, dan is het absoluut noodzakelijk dat het kind de kleding elke dag draagt. Daarom heeft Arion een speciale aantrekhelpen voor kinderen ontwikkeld, om het aantrekken makkelijker te maken. Denk aan handschoenen, armkousen, beenkousen of panty's die kinderen dragen om brandwonden, verbranding of littekens te genezen.

De compressiekleding gaat de ontwikkeling van littekens tegen en helpt verdere littekenvorming te voorkomen. Bovendien helpt de compressiekleding de littekens sneller en beter te genezen.

Onze aantrekhelpen zijn gemaakt van bijzonder glad materiaal, zodat er weinig wrijving is op de huid van het kind als hij of zij de kleding aantrekt. Deze dagelijkse taak kost de verzorger daarvoor minder moeite en is voor de patiëntjes minder belastend dan zonder aantrekhelpen.

ARION
Dactyna
Kids



Aan

Aantrekhelpen voor medische compressiehandschoenen met open vingertoppen



Instructie:

Art. Nr.	Maat	Vingeromtrek	Vingerlengte
E01770	Extra Small	≤ 5,5 cm	6 cm



ARION
Easy-Slide
Kids



Aan

Aantrekhelpen voor medische compressiearmkous en beenkousen met een open teen



Art. Nr.	Maat	lengte
E01700	Extra Small	29,5 cm
E01701	Small	39,5 cm



Instructievideo

ARION
Magnide
Kids



Aan

Aantrekhelpen voor medische compressiekousen met gesloten teen



Art. Nr.	Maat	Schoenmaat
E01712	Small	≤ 36



Instructievideo



Arion aan- en uittrekhulpen voor medische compressiekleding

Aan- en uittrekhulpmiddelen voor kousen en pantykousen

Aantrekhulpmiddel voor armkousen

Aantrekhulpmiddel voor handschoenen

	ARION Easy-Slide	ARION Sim-Slide®	ARION Magnide®	ARION Magnide® 2in1	ARION Easy-Off	ARION SlideX In combinatie met een ander Arion aantrekhulp	ARION Easy-Slide ARM	ARION Dactyna																																																																																																																				
Open teenstuk	●	●			●	●	●	●																																																																																																																				
Gesloten teenstuk			●	●	●	●																																																																																																																						
Functie	Aan	Aan + Uit	Aan	Aan + Uit	Uit	Aan	Aan	Aan																																																																																																																				
Maten	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art. Nr.</th> <th>Maat</th> <th>Schoenmaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E01500</td> <td>X-Small</td> <td>≤ 33</td> </tr> <tr> <td>E01501</td> <td>Small</td> <td>34 - 36</td> </tr> <tr> <td>E01502</td> <td>Medium</td> <td>37 - 38,5</td> </tr> <tr> <td>E01503</td> <td>Large</td> <td>39 - 41</td> </tr> <tr> <td>E01504</td> <td>X-Large</td> <td>≥ 42</td> </tr> </tbody> </table>	Art. Nr.	Maat	Schoenmaat	E01500	X-Small	≤ 33	E01501	Small	34 - 36	E01502	Medium	37 - 38,5	E01503	Large	39 - 41	E01504	X-Large	≥ 42	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art. Nr.</th> <th>Maat</th> <th>Schoenmaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EoSLo1</td> <td>Small</td> <td>34 - 36</td> </tr> <tr> <td>EoSLo2</td> <td>Medium</td> <td>37 - 38,5</td> </tr> <tr> <td>EoSLo3</td> <td>Large</td> <td>39 - 41</td> </tr> <tr> <td>EoSLo4</td> <td>X-Large</td> <td>≥ 42</td> </tr> </tbody> </table>	Art. Nr.	Maat	Schoenmaat	EoSLo1	Small	34 - 36	EoSLo2	Medium	37 - 38,5	EoSLo3	Large	39 - 41	EoSLo4	X-Large	≥ 42	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art. Nr.</th> <th>Maat</th> <th>Schoenmaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E01513</td> <td>Medium</td> <td>≤ 38</td> </tr> <tr> <td>E01514</td> <td>Large</td> <td>39 - 43</td> </tr> <tr> <td>E01515</td> <td>X-Large</td> <td>≥ 44</td> </tr> </tbody> </table> <p>XL ook geschikt voor extra brede voeten (voetomtrek tot 28 cm)</p>	Art. Nr.	Maat	Schoenmaat	E01513	Medium	≤ 38	E01514	Large	39 - 43	E01515	X-Large	≥ 44	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art. Nr.</th> <th>Maat</th> <th>Schoenmaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E01540</td> <td>Medium</td> <td>≤ 38</td> </tr> <tr> <td>E01541</td> <td>Large</td> <td>39 - 43</td> </tr> <tr> <td>E01542</td> <td>X-Large</td> <td>≥ 44</td> </tr> </tbody> </table> <p>XL ook geschikt voor extra brede voeten (voetomtrek tot 28 cm)</p>	Art. Nr.	Maat	Schoenmaat	E01540	Medium	≤ 38	E01541	Large	39 - 43	E01542	X-Large	≥ 44	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art. Nr.</th> <th>Maat</th> <th>Schoenmaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E01510</td> <td>Small</td> <td>34 - 36</td> </tr> <tr> <td>E01511</td> <td>Medium</td> <td>37 - 41</td> </tr> <tr> <td>E01512</td> <td>Large</td> <td>42 - 45</td> </tr> </tbody> </table>	Art. Nr.	Maat	Schoenmaat	E01510	Small	34 - 36	E01511	Medium	37 - 41	E01512	Large	42 - 45	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art. Nr.</th> <th>Maat</th> <th>Omtrek van het been*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E01520</td> <td>Medium</td> <td>≤ 40 cm</td> </tr> <tr> <td>E01521</td> <td>Large</td> <td>≤ 60 cm</td> </tr> <tr> <td>E01522</td> <td>X-Large</td> <td>≤ 100 cm</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Maat L en XL zijn langer en bedekken het bovenbeen; dit zijn de juiste maten als aantrekhulp bij kousen of panty's tot aan de lies.</p>	Art. Nr.	Maat	Omtrek van het been*	E01520	Medium	≤ 40 cm	E01521	Large	≤ 60 cm	E01522	X-Large	≤ 100 cm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art. Nr.</th> <th>Maat</th> <th>Armlengte*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E01505</td> <td>Medium</td> <td>59 - 67 cm</td> </tr> <tr> <td>E01506</td> <td>Large</td> <td>> 67 cm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maat Max. productomtrek*</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Maat</th> <th>Max. productomtrek*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Medium</td> <td>45,6 cm</td> </tr> <tr> <td>Large</td> <td>57,6 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Art. Nr.	Maat	Armlengte*	E01505	Medium	59 - 67 cm	E01506	Large	> 67 cm	Maat	Max. productomtrek*	Medium	45,6 cm	Large	57,6 cm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art. Nr.</th> <th>Maat</th> <th>Vingeromtrek</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E01571</td> <td>Small</td> <td>5,5 - 6,5 cm</td> </tr> <tr> <td>E01572</td> <td>Medium</td> <td>6,5 - 7,5 cm</td> </tr> <tr> <td>E01573</td> <td>Large</td> <td>7,5 - 9 cm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maat Vingerlengte</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Maat</th> <th>Vingerlengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Small</td> <td>6,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Medium</td> <td>7,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Large</td> <td>8,5 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Art. Nr.	Maat	Vingeromtrek	E01571	Small	5,5 - 6,5 cm	E01572	Medium	6,5 - 7,5 cm	E01573	Large	7,5 - 9 cm	Maat	Vingerlengte	Small	6,5 cm	Medium	7,5 cm	Large	8,5 cm
Art. Nr.	Maat	Schoenmaat																																																																																																																										
E01500	X-Small	≤ 33																																																																																																																										
E01501	Small	34 - 36																																																																																																																										
E01502	Medium	37 - 38,5																																																																																																																										
E01503	Large	39 - 41																																																																																																																										
E01504	X-Large	≥ 42																																																																																																																										
Art. Nr.	Maat	Schoenmaat																																																																																																																										
EoSLo1	Small	34 - 36																																																																																																																										
EoSLo2	Medium	37 - 38,5																																																																																																																										
EoSLo3	Large	39 - 41																																																																																																																										
EoSLo4	X-Large	≥ 42																																																																																																																										
Art. Nr.	Maat	Schoenmaat																																																																																																																										
E01513	Medium	≤ 38																																																																																																																										
E01514	Large	39 - 43																																																																																																																										
E01515	X-Large	≥ 44																																																																																																																										
Art. Nr.	Maat	Schoenmaat																																																																																																																										
E01540	Medium	≤ 38																																																																																																																										
E01541	Large	39 - 43																																																																																																																										
E01542	X-Large	≥ 44																																																																																																																										
Art. Nr.	Maat	Schoenmaat																																																																																																																										
E01510	Small	34 - 36																																																																																																																										
E01511	Medium	37 - 41																																																																																																																										
E01512	Large	42 - 45																																																																																																																										
Art. Nr.	Maat	Omtrek van het been*																																																																																																																										
E01520	Medium	≤ 40 cm																																																																																																																										
E01521	Large	≤ 60 cm																																																																																																																										
E01522	X-Large	≤ 100 cm																																																																																																																										
Art. Nr.	Maat	Armlengte*																																																																																																																										
E01505	Medium	59 - 67 cm																																																																																																																										
E01506	Large	> 67 cm																																																																																																																										
Maat	Max. productomtrek*																																																																																																																											
Medium	45,6 cm																																																																																																																											
Large	57,6 cm																																																																																																																											
Art. Nr.	Maat	Vingeromtrek																																																																																																																										
E01571	Small	5,5 - 6,5 cm																																																																																																																										
E01572	Medium	6,5 - 7,5 cm																																																																																																																										
E01573	Large	7,5 - 9 cm																																																																																																																										
Maat	Vingerlengte																																																																																																																											
Small	6,5 cm																																																																																																																											
Medium	7,5 cm																																																																																																																											
Large	8,5 cm																																																																																																																											
Onderhoud	A	A	A	A	A	B	A	A																																																																																																																				

A:



30° handwas



Niet bleken



Niet drogen in de droger



Drogen met handdoek



Niet strijken



Niet chemisch reinigen

B:



Max. 60°C (bonte was)



Gebruik geen bleekmiddel



Voorzichtig drogen in de wasdroger (op lage temperatuur)



Niet strijken



Niet chemisch reinigen

U kunt ook vragen naar
producten op maat!*



*Neem contact op met uw vakhandel of Arion!

Stop met trekken.

Begin met glijden!



Maak compressietherapie
makkelijker!

ARION
SLIDE SOLUTIONS

ARION
SLIDE SOLUTIONS

Arion Slide Solutions B.V.
Rutherford 11 . 6422 RE Heerlen . NL
Tel.: +31 45 209 4000
E-Mail: slidesolutions@arion-group.com
www.slide-solutions.com